


CINCOS

división médica

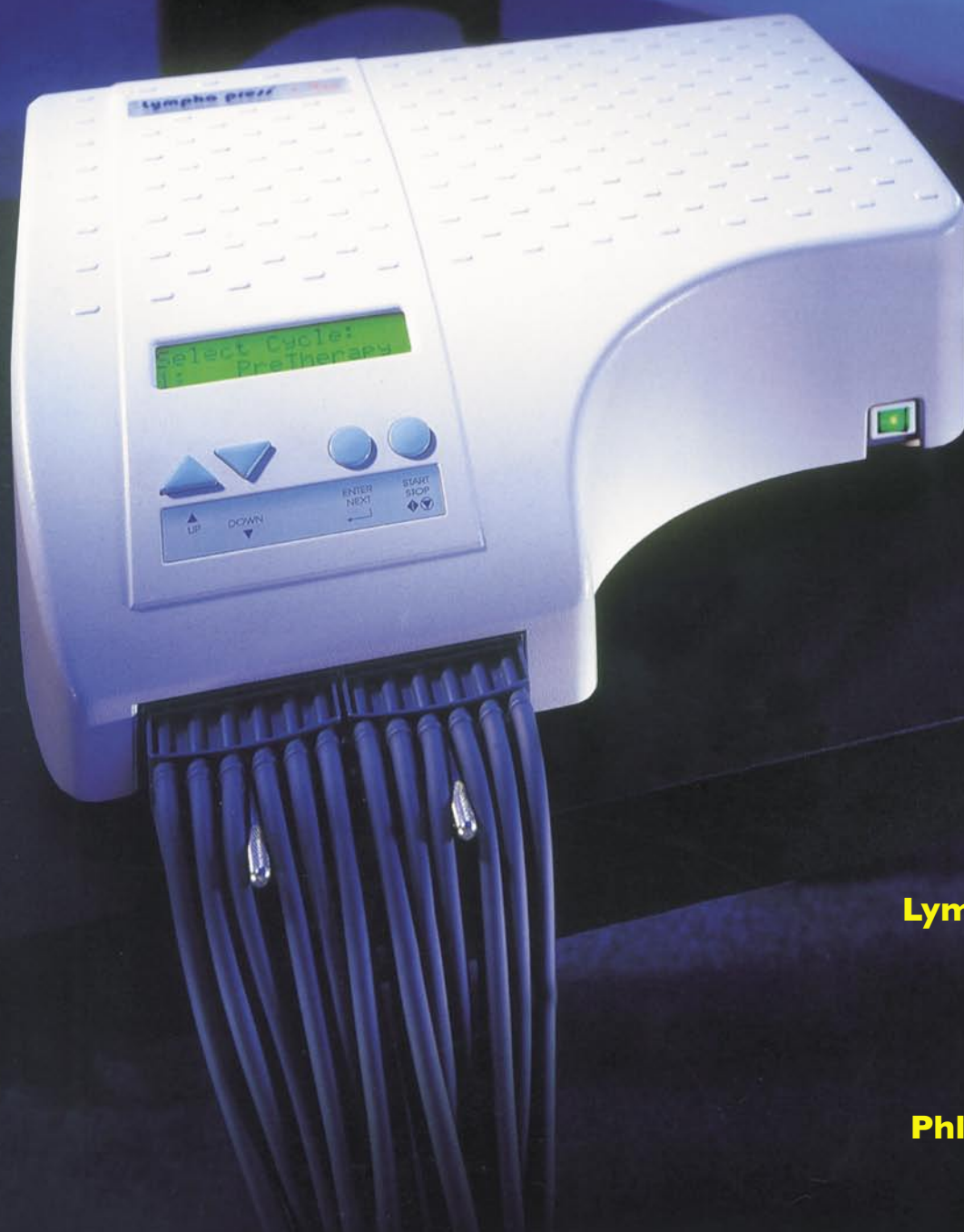

Lympha-Press

Lympha-Press Plus

Lympha-Wave

Phlebo-Press

Phlebo-Press DVT



Índice

¿ Quién somos ?	3
Conceptos de la Presoterapia	3
Lympha Press® y Lympha Wave™	4
Edemas linfáticos	5
Lympha-Press® Plus.....	6-7
Lympha-Press® Mini	8
Lympha-Wave™	9
Mangas Lympha-Press®	10-13
Phlebo-Press®	14
Phlebo Press® DVT	15-17
Bibliografía	18
Condiciones generales de ventas	19

¿Quién somos?

CINCOS, s.l. distribuye en España, Portugal y Marruecos equipos y accesorios de presoterapia basados en la compresión intermitente.

El competente equipo de venta y la red de distribuidores altamente calificados trabajan en todo el ámbito territorial de nuestra responsabilidad en estrecha colaboración con la sede de Barcelona.

Colaboramos con los más importantes hospitales y clínicas especializados en linfología y flebología, con los mejores médicos en estas especialidades y con nuestros asociados en Europa e Israel, con el fin de mejorar continuamente la calidad de nuestros productos, mantenerlos actualizados según los últimos conocimientos médicos y adaptarlos al desarrollo técnico, o - mejor aún - para ir un paso por delante.

CINCOS, s.l. ofrece en todo el territorio nacional un amplio servicio tanto a pacientes como a médicos, hospitales, clínicas y mutuas.

Conceptos de la presoterapia (terapia descongestiva)

Conceptos de la presoterapia (terapia descongestiva)

Competencia, calidad y servicio se complementan volviéndose conceptos para la presoterapia (terapia descongestiva).

Lympha-Press®, Lympha Wave™, Phlebo-Press® y Phlebo-Press® DVT se emplean con éxito desde hace muchos años en todo el mundo. Los fabrica Mego Afek medical division, Kibbutz Afek (Israel).

La eficacia y la calidad de estos aparatos están comprobadas y ampliamente documentadas en numerosos trabajos y estudios médicos.

Todos nuestros aparatos llevan la marca CE y están certificados FDA, UL, CSA, TÜV, IEC-601, Med GV.



Lympha-Press® y Lympha-Wave™

Sistema de presoterapia por compresión

Sistemas de 12 hasta 24 cámaras

La compresión intermitente con aparatos de presoterapia forma hoy parte de las terapias estándar aplicadas a las enfermedades venosas y linfáticas. Permite una descongestión eficaz y protectora.

El sistema Lympha-Press® dispone de más de 40 tipos y tamaños distintos de mangas: manga pierna, manga de cadera, manga pantalón (desde los pies hasta el abdomen), manga de brazo y hombro. Cada manga se ajusta perfectamente a la extremidad a tratar gracias a 3 cremalleras o 3 Velcros. Dispone de cámaras que se solapan longitudinalmente. Cada cámara de aire se hincha o deshinchas individualmente bajo presión controlada.

El sencillísimo manejo del aparato y la manipulación de las mangas, la larga vida útil y el tratamiento adaptable individualmente a las necesidades del paciente hacen que el sistema Lympha-Press® o Lympha-Wave™ sea uno de los equipos preferidos en la compresión intermitente con aparatos.



*Cámaras de aire solapadas,
hinchadas individualmente
bajo presión controlada.*

Indicaciones:

- Linfedemas primarios.
- Linfedemas secundarios sin bloqueo proximal.
- Lipodemas.
- Síndrome post-flebitico.
- Edemas post-traumáticos.
- Edemas crónicos de origen venoso.
- Úlcus cruris.
- Profilaxis trombo embólica.
- Ligadura de venas, post-operatorio.
- Síndrome post-trombótico.
- Varicosis del embarazo.
- Insuficiencia venosa crónica.
- Enfermedad oclusiva arterial bajo estricto control.
- Parálisis de las extremidades superiores e inferiores.
- Post operatorio.
- Pre y post liposucción.
- Inactividad muscular por largo tiempo y/o inmovilización .

Contraindicaciones:

- Infarto de miocardio reciente.
- Insuficiencia cardíaca descompensada.
- Edema pulmonar.
- Edemas por afección renal y cardíaca.
- Tromboflebitis, flebotrombosis.
- Erisipela.
- Linfedema maligno.
- Tumores malignos.
- Enfermedades cutáneas inflamatorias agudas.



**Linfema/Lipodema
tratados mediante
presoterapia con
los equipos
Lympha-Press®**



Lympha-Press® Plus

La terapia de descongestión mas avanzada Aparato hospitalario y clínico

Lympha-Press® Plus: Un nuevo Concepto en la terapia de Edemas

Compresión intermitente con 5 variantes en un solo aparato:

- **Pre-Therapy:**
Programa de apertura de vías.
- **Lympha:**
Programa de ciclo secuencial.
- **Gradiente 12:**
Programa de ciclo secuencial con un control exacto y ajuste de presión individualizada para cada cámara de aire.
- **Wave:**
Programa de ciclo peristáltico profundo.
- **Ballancer:**
Programa de ciclo peristáltico suave.

Características del Lympha-Press® Plus:

- 5 programas de terapia en un solo aparato.
- Controlado por microprocesador.
- Se puede conectar a un PC para memorizar y personalizar las secuencias de tratamiento.
- Programa de apertura de vías trabajando de proximal hacia distal.
- Cada cámara de aire se puede activar individualmente con exactitud.
- Ajustes terapéuticos individuales para cada paciente.
- Equipo adaptado para hospitales, clínicas, ambulatorios o consultorios.
- Se pueden seleccionar y combinar los ciclos de presión, las intensidades de la presión, las pausas, la duración de la terapia y las formas de terapia.
- Control de presión calibrado, ajustable sin escalas de 20 a 130 mmHg.



Lympha-Press® Plus es un equipo de última generación totalmente nuevo con base digital, fruto de años de experiencia y de la estrecha colaboración con especialistas punteros en el campo de la flebología y la linfología.

Gracias a uno ciclo terapéutico totalmente nuevo, la Preterapia, es posible tratar con éxito los pacientes con edemas gracias a una perfecta descongestión previa que proporciona el equipo.

Todos los parámetros se pueden procesar al conectar el Lympha-Press® Plus al PC. Así, para cada paciente se puede preparar, memorizar, consultar o imprimir el plan de tratamiento en todo momento.

El Lympha-Press® Plus es un aparato terapéutico diseñado para hospitales, clínicas, ambulatorios y consultas de especialistas. El aparato permite la elección de 5 programas de terapia y combinarlos entre sí para la preparación de secuencias de tratamiento adaptadas a la necesidad de cada paciente.

Se pueden conectar todos los tipos y tamaños de mangas Lympha-Press®.

Con el Lympha-Press® Plus se pueden tratar todas las formas de edema:


- Linfedemas primarios y secundarios
- Lipodemas
- Edemas postraumáticos
- Edemas de causa venosa, etc.

Gracias a la Preterapia, ciclo único, a los diferentes programas peristálticos o secuenciales y a la activación concreta de cada cámara de aire individual así como las posibilidades de control de cada una de ellas, se pueden tratar pacientes que hasta ahora no eran aptos para dichos tratamientos.

Las posibilidades de terapia compleja que ofrece Lympha-Press® Plus van mucho más allá de los aparatos actualmente utilizados en muchas clínicas especializadas y por médicos especialistas.



Pantalla interface PC

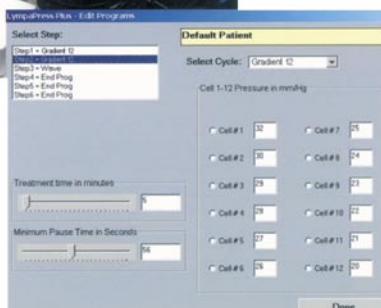

Lympha-Press® Mini

Mod. 201ET

Generalidades

Una versión más pequeña de Lympha Press® Plus con 24 salidas equilibradas y regulación continua para el tratamiento de los edemas linfáticos.


El concepto de este sistema tiene como base amplias investigaciones médicas(*), cuya finalidad ha sido el desarrollo de un aparato con el cual se logra un resultado rápido y duradero.

Este equipo está esencialmente destinado a las clínicas o consultorios para tratamientos de mantenimiento y sobre todo está preparado para tratamientos domésticos con la máxima seguridad y facilidad de manejo para el usuario no profesional.



Características

- Control de compresión por mando graduado de 20 a 80 mmHg.
- Tiempo de tratamiento regulable por temporizador (hasta 120 minutos) y posición manual.
- 2 conectores de 12 salidas para el tratamiento simultáneo de dos extremidades gracias a mangas multicámaras solapadas con posibilidad de añadir una manga para cadera, utilizar un pantalón "Medical Overlapping" de 24 celdas o bien realizar el tratamiento simultáneo de dos pacientes.
- Ciclo secuencial de 30 segundos.
- Tratamiento rápido, eficaz y sin dolor ni daño para los tejidos de los brazos o piernas.
- Fácil manejo, ligero, portátil (5kg).

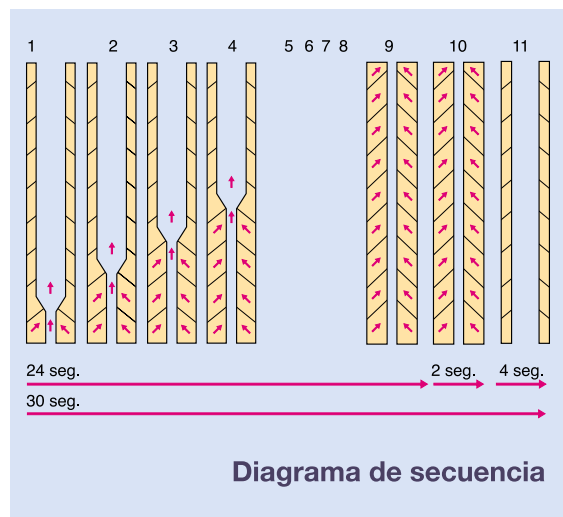

Certificaciones

- FDA, UL, CSA, TÜV, IEC-601, Med GV, CE



lympa-Wave™

Mod. 301E

Generalidades

Sistema que produce un movimiento singular de masaje peristáltico, de hasta 24 salidas equilibradas y regulación continua para el tratamiento de dolencias venosas, úlceras y el estímulo de extremidades.


El concepto de este sistema tiene como base amplias investigaciones médicas(*), cuya finalidad ha sido el desarrollo de un aparato con el cual se logra un resultado rápido y duradero.

Este equipo está especialmente recomendado para hospitales, clínicas, centros especializados y consultorios. Será una ayuda importante en la tarea del médico y permitirá una mejor eficacia y un rendimiento máximo.



Características

- Control de compresión por mando graduado de 20 a 80 mmHg.
- Tiempo de tratamiento regulable por temporizador (hasta 120 minutos) y posición manual.
- 2 conectores de 12 salidas para el tratamiento simultáneo de dos extremidades gracias a mangas multicámaras solapadas con posibilidad de añadir una manga para cadera, utilizar un pantalón "Medical Overlapping" de 24 celdas o bien realizar el tratamiento simultáneo de dos pacientes.
- Ciclo peristáltico de 30 segundos.
- Tratamiento rápido, eficaz y sin dolor ni daño para los tejidos de los brazos o piernas.
- Fácil manejo, ligero, portátil (5kg).

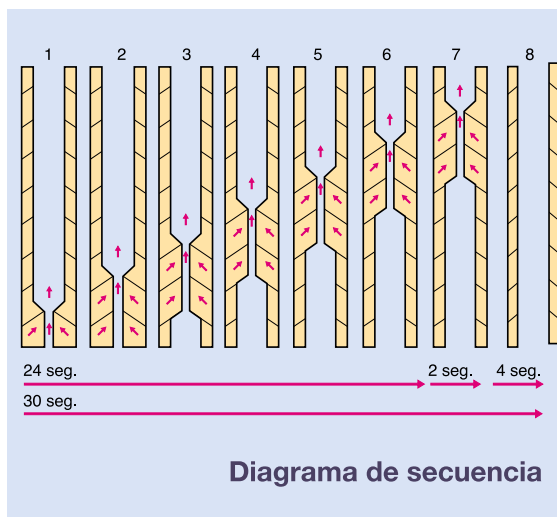

Certificaciones

- FDA, UL, CSA, TÜV, IEC-601, Med GV, CE



Compresión intermitente óptima

Mangas de tratamiento Lympha-Press® y Lympha-Wave™

Las mangas de tratamiento se caracterizan por un manejo sencillo y cómodo. Existen más de 150 tamaños y modelos diferentes. En el concepto Lympha-Press® y el Lympha-Wave™ está garantizada la adaptación óptima para cada paciente.

- Las mangas tienen doble pared.
- Son de material protector de la piel, de alta calidad y máxima duración.
- 48 tamaños estándar para una mejor adaptación individual.
- Triple ajuste de tamaño con cierre de cremallera o Velcro.
- Solape longitudinal.
- Cámaras de aire solapadas e individuales.
- Las mayoría de las mangas son lavables y esterilizables.
- Juegos de tubos flexibles.
- Los tubos vienen numerados y se pueden colocar y quitar individualmente.
- Las cámaras de aire pueden intercambiarse individualmente.
- Calidad hospitalaria.

MANGAS ESTÁNDAR:

Mangas de brazo

con cierre de cremallera

Disponemos de 16 tamaños estándar, cada una ajustable gracias a tres cremalleras, para una adaptación óptima. La mano y los dedos están integrados. Para evitar un desplazamiento de la manga y una buena estimulación en el extremo proximal de la manga en la región axilar, se utiliza para algunas mangas de brazo un complemento de espalda y hombro conectable. Existe para lado derecho e izquierdo.

Complemento de espalda y hombro

para mangas de brazo, derecha e izquierda

Expansor

para mangas de brazo

La mayor parte de las mangas de brazo pueden ampliar adicionalmente su perímetro mediante expansores.





Mangas de piernas (bota)

con cierre velcro

Disponemos de 18 tamaños estándar, cada una ajustable gracias a 3 bandas de Velcro para una adaptación óptima.

Expansor

para mangas de piernas

Amplían las mangas de bota hasta 20 cm de perímetro.

Mangas de cadera

con cierre velcro

Equipadas con cámaras anulares suplementarias en la región de la ingle.

La manga de cadera y la bota se solapan.


Snake-Sleeve

solución de transición para casos extremos

Al iniciar la terapia de edemas, los casos extremos, como podrían ser casos de elefantiasis, representan, en generales, grandes dificultades para el terapeuta o el médico en el buen desarrollo del tratamiento con compresión intermitente. Para paliar este problema se ha creado la manga Snake-Sleeve. Ahora, en la consulta o en la clínica, se puede aplicar una atención de transición sin renunciar a las ventajas del concepto Lympha-Press®. La manga especial se enrolla en espiral en torno a la extremidad. Gracias al solapamiento de las 6 ó las 12 cámaras de aire se consigue una descongestión eficaz antes de que se pueda aplicar la variante adecuada de los 48 manguitos estándar.

Manga pantalón

página siguiente

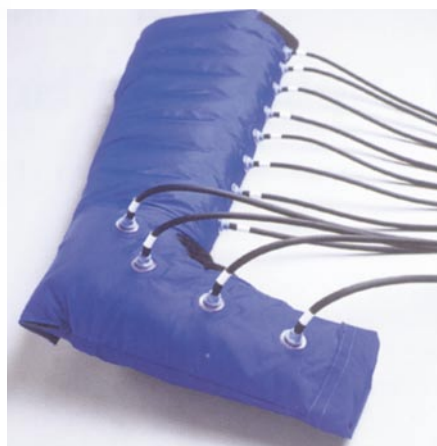

Compresión intermitente óptima

Mangas de tratamiento

Lympha-Press® y Lympha-Wave™

La manga pantalón es ideal para la terapia del linfedema así como del lipodema en el que estén afectadas las regiones de la cadera y del abdomen.

En los linfedemas - según el cuadro clínico - a veces existen problemas debido al desplazamiento del edema hacia el extremo proximal de la manga o extremidad al utilizar solo unas mangas de pierna. Para impedirlo se desarrolló el pantalón "Medical Overlapping".



Manga pantalón

Su ventaja consiste sobre todo en que no sólo se descongestionan los pies y las piernas, sino también la región de la cadera y del abdomen. Se abarca igualmente el cuadrante inferior del tronco en la correspondiente mitad del cuerpo. También ayuda al éxito de la terapia el hecho de que se estimula toda la región inguinal y la Cisterna Mayor (o Cisterna de Pecquet) en el abdomen. Las vías de drenaje quedan libres y el líquido del edema puede ser transportado fuera sin problemas.



Los pies están totalmente integrados con posibilidad de soltar la región del talón

Con la manga de pantalón, la terapia de toda la zona de evacuación de las piernas y los cuadrantes inferiores del tronco se puede aplicar aún mejor que con la combinación de mangas de pierna y de cadera. La manga pantalón de una pieza es de manejo especialmente sencillo (importante para pacientes con movilidad limitada). Permite una descongestión sin transición de toda la región inguinal.

Características especiales:

- Manga de una pieza, de manejo especialmente fácil.
- La manga se solapa longitudinalmente.
- Cámaras de aire solapadas.
- Región del pie totalmente integrada.
- Región inguinal integrada.
- Descongestión sin transición de toda la zona de evacuación.
- Tres cremalleras aseguran un ajuste óptimo.
- Se puede ampliar adicionalmente con expansores.
- 24 cámaras de aire solapadas.
- Conectable a todos los aparatos Lympha-Press® y Lympha-Wave™.
- Aplicación completa también para la terapia doméstica.



Expansor

Phlebo PRESS®

La mejor terapia a domicilio

La utilización del Phlebo PRESS® a domicilio, permite al paciente evitar los problemas de desplazamiento, permitiendo igualmente participar en las reducciones del gasto a la Salud Pública.

Un concepto avanzado para el tratamiento de :

- Piernas hinchadas y/o cansadas
- Edemas
- Úlceras venosas
- Dolores traumáticos.

El Phlebo PRESS® también es ideal para :

- La prevención de Trombosis durante o después de una operación.
- Rehabilitación.

Phlebo PRESS® en las clínicas y residencias :

- Ideal para prevenir las piernas hinchadas.

Indicaciones:

- Edemas venosos crónicos.
- Úlceras venosas.
- Mejora la curación de las heridas.
- Vancosis venoso debido a hinchazón.
- Insuficiencia venosa crónica.
- Síndrome post-trombótico.
- Edema post-traumático.
- Profilaxis trombo-embólica.
- Vancosis del embarazo.
- Profilaxis trombótica.

Contra indicaciones:

- Arteriosclerosis severa.
- Otras enfermedades vasculares.
- Deformación externa de las extremidades.
- Conocida o sospechosa Trombosis Venosa Profunda (TVP).
- Tromboflebitis.
- Gangrena.
- En presencia de dolores o insensibilidad.
- Dermatitis.
- Heridas no tratadas o infectadas.
- Infección reciente de la piel



Características Principales:

- Presión variable entre 20 y 80 mm Hg.
- Pausa regulable entre 0 y 120 segundos.
- Tratamiento regulable entre 0 y 60 minutos.
- Parada automática.
- Tratamiento bilateral.
- Operación fácil y sencilla.
- Peso ligero : 3,8 Kg.
- Portátil.



Phlebo PRESS® DVT

Tratamiento de gran efectividad para la prevención de la trombosis venosa profunda



La profilaxis de TVP es esencial para una óptima atención del paciente.

La trombosis venosa profunda postoperatoria o TVP es una grave afección que supone un riesgo potencial para la vida de la persona. Afecta a un amplio abanico de pacientes, y es causa de graves complicaciones en las operaciones quirúrgicas y durante la hospitalización. las clínicas y hospitales de todo el mundo.

Phlebo Press® DVT

es un instrumento neumático de compresión secuencial para la prevención de la trombosis venosa profunda postoperatoria. Combina una probada tecnología de aumento del flujo con un diseño económico para lograr que esta terapia clave esté disponible en las clínicas y hospitales de todo el mundo.

Phlebo PRESS® DVT

Eficiente, confortable, efectivo.

Muy económico con el fin de lograr que el más alto estándar de cuidados esté presente en todo el mundo.

¿QUÉ SON LA TVP Y LA EP?

La TVP o trombosis venosa profunda (DVT en inglés) consiste en la formación de coágulos de sangre ("trombos") en el interior de las venas profundas, con mayor frecuencia en las piernas. La EP o embolia pulmonar se produce cuando uno de estos trombos llega hasta los pulmones. La TVP puede causar daños importantes con graves consecuencias. La embolia pulmonar es una afección que pone en peligro la vida del paciente.


El estasis venoso, como consecuencia de la posición intraoperatoria, del postoperatorio y de los períodos de recuperación, es una de las principales causas de TVP.

Causas:

- Los cambios en la presión intratorácica asociados con la anestesia y las intervenciones quirúrgicas reducen el retorno venoso desde las extremidades hasta el corazón.
- Los traumatismos quirúrgicos y terapéuticos, incluso si son tan leves como una punción, en cualquier parte del cuerpo, pueden generar una "reacción en cadena" química que causa la proliferación de factores de coagulación en las venas profundas. E incluso más importante: la inmovilización del paciente durante horas, días o semanas aumenta el estasis venoso ya que los músculos de bombeo de la pantorrilla y del pie, los cuales se activan al caminar, no se utilizan.



Los músculos de bombeo de la pantorrilla del pie: la fuerza motriz del retorno venoso.

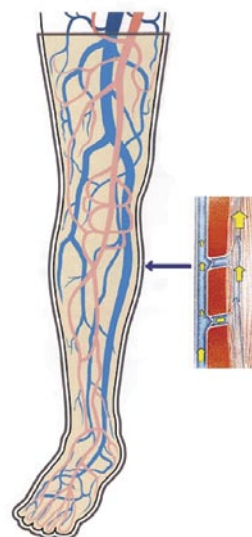

Al caminar, las venas situadas en la planta del pie, el "bombeo del pie", se comprimen y se relajan. Esta acción impulsa la sangre venosa hasta el corazón. Al flexionar los músculos de la parte posterior de la pantorrilla, los "músculos de bombeo", se ejerce presión sobre las venas de las piernas, impulsando el flujo venoso.


Una prolongada inmovilización priva al cuerpo de esta acción de bombeo vital. La sangre se estanca en las venas de las piernas dando lugar a la formación de coágulos.




La solución: PHLEBO PRESS DVT

Phlebo Press® DVT funciona imitando la acción de los músculos de bombeo de la pantorrilla y del pie sobre las venas de las piernas.

El diseño exclusivo de Phlebo Press® DVT proporciona un aumento máximo del flujo sanguíneo:

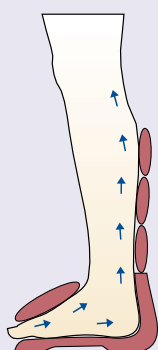

- Un ciclo fisiológicamente óptimo para lograr el máximo drenaje de los vasos sanguíneos.
- Cuatro celdas de compresión en cada extremidad proporcionan una mayor direccionalidad del flujo y aumentan la sensación de confort del paciente.
- Las mangas cubren la pantorrilla, con presión plantar para imitar tanto los músculos de bombeo de la pantorrilla como del pie. Phlebo Press® DVT es el único equipo que activa ambos sistemas para lograr el máximo

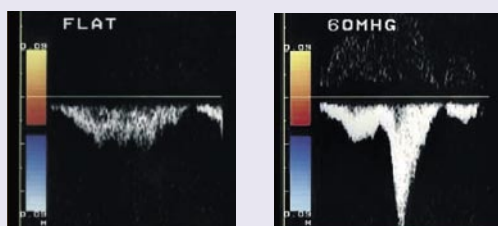

Phlebo Press® DVT: aumento probado del retorno sanguíneo en las venas (ultrasonografía a 0 y 60 mmHg)



• El confort del paciente es clave.

Phlebo Press® DVT se coloca con gran comodidad. La acción de masaje es agradable, calmante y la operación es silenciosa.

• Sin complementos innecesarios, simple y eficaz.

Las mangas son fáciles de poner y quitar. La interface minimalista facilita la operación y su supervisión.

• Económico.

Utilice el Phlebo Press® DVT con mangas lavables o de un solo uso, como prefiera. Las mangas lavables se pueden limpiar con los medios normales de los hospitales. También dispone de calcetines interiores de algodón lavables para absorber el sudor y reducir la suciedad.

Especificaciones Técnicas

Dimensiones:	100 X 260 X 130 mm
Peso:	2.3 kg
Rango de presión:	50-60 mmHg
Electricidad:	115V 50/60 Hz 230V 50/60 Hz
Consumo:	11W

Referencias:

1. Heit JA, Melton 3rd, Lohse CM, Petterson TM, Silverstein MD, Mohr DN, O'Fallon WM incidencia de la tromboembolia en los pacientes hospitalizados versus los residentes en la comunidad. Mayo Clin. Proc. 2001 Nov; 76 (11):1102-10
2. Prevención de la Trombosis Venosa y la Embolia Pulmonar: NIH Consensus Statement, 1986, Mar 24-26;6(2):1-8.
3. Zelikovski A, Ben-Tov I, Koren A, Steiman E, Haddad M. Alteración hemodinámica venosa inducida por el Venopress/DVT (un nuevo equipo neumático de compresión intermitente para la prevención de la trombosis venosa profunda). Phlebology 1995 Suppl. (1):701-703.
4. Hirsh J, Hoak J. Gestión de la Trombosis Venosa Profunda y la Embolia Pulmonar: AHA Medical/Scientific Statement, Circulation 1998 (93):2212-45.

Bibliografía

- Partsch et. al. Experimentelle Untersuchungen zur Wirkung einer Druckwellen-massage (Lympha-Press) beim Lymphödem. Phlebologie und Prok-tologie, 2/1980 May 1980.
- A. Zelikovskl et. al. Lympha-Press, a new pneumatic device tor the treatment of lymphedema of the limbs. Lymphology, 2/1980, June 1980.
- A. Zellkovski et. al. Lympha-Press – a new pneumatic device for the treatment of lymphedema: clinical trial and results. Folia Angiologica, NO. 456, September 1980.
- A. Zelikovski et. al. Non-operative therapy combined with limited surger in manage-ment ot peripheral lymphedema. Lymphology 19(1986)106 - 108.
- Christos J. Pappas, Thomas F. O Donnell jr. Long term results of compression treatment for lymphedema. Journal of vascular surgerv, Voll 6, No. 4, October 1992.
- Aileen Mc Leod et. al. A clinical report an the use of three external pneumatic compres-sion devices in the manangement of lymphedema in a paediatric population. Physiotherapy Canada, July 1991, Vol. 43, No. 3.
- Aileen Mc Leod Clinical report, Home therapy for lymphedema, Hospital for sick children, Toronto, Home Health Care 1989.
- Avigdor Zelikovski, M.D., Alexander Deutsch, M.B., Ch. B., F.R.C.S., Raphael Reiss, M.D. A sequential pneumatic compression device in surgery for lym-phedema in the limbs. The Journal of cardiovascular surgery, Vol 24, No. 2 pp. 122-126 (March – April 1983).
- Avigdor Zelikovski, M.D. Gidon Zucker, M.D., Avonoam Ellashiv, M.D., Raphael Reiss, M.D. and Mordechai Shalit, M.D. A new sequential pneumatic device tor the prevention of deep vein thrombosis. Journal of Neurosurgery Vol 54, No. 5, May 1981.
- A. Zellkovski, M.D., I. Melamed, 1. Kott, M. Manoach and 1. Urca. The Lympha-Press, a new pneumatic device tor the treatment of lymphedema: Clinical trial and Results. Department of surgery „B“, Beilinson Medical Center and the Bio-Engineering Institute, Beilinson Medical Center, Tel-Aviv University Sackler School of Medicine, Israel.
- David M. Richmand, M.D., Thomas R O Donnell jr., M.D. Avigdor Zelikovski, M.D. Sequential Pneumatic Compression tor Lymphedema. A Controlled Trial. Arch Surg-Vol 120, October 1985.
- A. Zelikovski, M.D., M. Haddad, M.D., and R. Reiss, M.D. The Lympha-Press intermittent sequential pneumatic device for the treatment of lymphedema: five years of clinical experience. The journal of cardiovascular Surgery Vol 27, No. 3, pp. 288-290 (May – June 1986).
- J. Gruffaz One year's experience of treatment of lymphedema of the limbs with the lympha-press. Phlebologie No. 4, October/December 1981, 585 to 593.

(*) Existe a disposición de nuestros clientes, una extensa bibliografía de los tratamientos.
El fabricante se reserva el derecho a cambiar o modificar cualquier concepto o característica de los equipos.

Condiciones generales de venta

PLAZOS :

Nuestros plazos de entrega están dados a título indicativo. Un retraso no puede dar lugar a una indemnización o a una anulación de pedido.

GARANTÍA :

Garantizamos nuestros aparatos de acuerdo con las recomendaciones de las empresas que representamos. Generalmente la garantía cubre todo defecto de materia o vicio de fabricación durante una duración mínima (ver garantía adjuntada a cada aparato). Están excluidos de dicha garantía los daños ocasionados por un uso anormal, o en caso de intervención por personas no autorizadas por CINCOS,s.l.

DEVOLUCIÓN DE MERCANCIA :

Ninguna devolución de mercancía será aceptada sin el previo acuerdo de CINCOS,s.l. Toda devolución no autorizada será inmediatamente devuelta con gastos a cargo del destinatario.

Ninguna devolución con portes debidos será aceptada

CONDICIONES DE PAGO :

- 30% del valor del material a la formalización del pedido.
- 70% (saldo) a recepción del material.

RETRASO EN EL PAGO :

Todo retraso de pago conlleva automáticamente el bloqueo de los pedidos siguientes, e intereses calculados sobre la base de los datos del Banco de España, además de los gastos que se pudieran generar.

CLÁUSULA PENAL :

Toda acción contenciosa conlleva el pago de una indemnización del 15% del total de lo debido a título de daños y perjuicios, además de los intereses legales y los gastos judiciales eventuales.

CLÁUSULA DE RESERVA DE PROPIEDAD :

Las mercancías siguen siendo propiedad de CINCOS,s.l. hasta el pago integral del precio convenido, el reglamento judicial o la liquidación de los bienes del comprador no pueden modificar la presente cláusula.

CONDICIONES PARTICULARES DE VENTA

- Nuestras tarifas se entienden sin I.V.A.
- Todas nuestras mercancías viajan a cargo del destinatario
- CINCOS,s.l. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características de los aparatos y sus accesorios y se compromete a la entrega en el mínimo tiempo posible siempre que estén disponibles de stock.

CINCOS | *división médica*

C/ Foneria, 49 entlo.
08038 BARCELONA
(ESPAÑA)
Tel : +34 934 329 970
Fax : +34 932 964 158

www.cincos.es
e.mail: info@cincos.es

