

Sistemas preventivos de Sujeción Ligera



Una completa gama de productos diseñados para controlar a pacientes desorientados o alterados que precisen de una sujeción ligera y eficaz, pensados para la comodidad del paciente y la tranquilidad del personal de enfermería.

Muñequeras, manopla, cinturón, banda frontal para quirófano, fabricados con materiales ligeros y transpirables para obtener el máximo confort y el mínimo impacto visual.

Salvace[®]



**MEDICARE
SYSTEM**

Abad Escarré, 15, 1ª Planta
08302 Mataró/Barcelona (Spain)
Tel. +34 937 570 048 Fax +34 937 414 068
info@medisystemsl.com
www.medisystemsl.com

CONTENCIÓN

MUÑEQUERA Y MANOPLA con ANILLA



Ventajas

Impide la presión sobre las muñecas. Incluye Anilla de seguridad. El recubrimiento exterior de suave Velour permite ajustar el cierre por Velcro de forma fácil y rápida. Tejido interior blanco de poliéster 75% y viscosa 25% para evitar alergias. Transpirable, cómoda y confortable. Gran facilidad de ajuste. Cierre rápido por Velcro. Gran capacidad de contención. Puede usarse indistintamente para contención de muñecas o tobillos.

Beneficios

Mayor tolerancia para el paciente. Previene lesiones cutáneas por maceración y abrasión. Es hipoalérgica. Facilita el trabajo de enfermería. Más confort y seguridad para el paciente. Polivalente.

Referencias MUÑEQUERA

SVC 2475 Muñequera Anilla Nylon Fuerte
SVC 2476 Muñequera Anilla Metálica Extra Fuerte
SVC 2476 XL Muñequera Anilla Metálica Extra Fuerte, talla XL
SVC 2476 XL2 Muñequera Anilla Metálica Extra Fuerte, talla XL doble cintas
SVC 2450 Muñequera básica con gaza y Velcro para adulto

Envasado

Caja de 24 pares

Referencias MANOPLA

SVC 2500 Manopla con Velcro talla M
SVC 2510 Manopla con Velcro talla L

Envasado

SVC 2500 Caja de 12 unidades
SVC 2510 Caja de 10 unidades



Modo de aplicación

1. Coloque la sujeción alrededor de la muñeca con la anilla hacia el exterior. Ajuste y fije con el cierre de Velcro.
2. Pase la cinta de sujeción por la anilla y sujétela con una doble vuelta.
3. Anúdela al bastidor de la cama. Obtendremos una fijación fuerte, confortable y segura.



MUÑEQUERA con VELCRO



Ventajas

Acolchado integral transpirable que absorbe y reduce la presión. Es hipoalérgica. El recubrimiento exterior de suave Velour permite un fácil y rápido ajuste por Velcro. Interior blanco de poliéster 75% y viscosa 25% hipoalérgico. Diseñado para obtener una apertura rápida, ideal para utilizarse en pacientes en UVI/UCI que necesiten ser liberados rápidamente. Fijación por Velcro, más ajustable, versátil, segura. Fácil y rápida de aplicar y quitar.

Beneficios


Muy confortable para el paciente. Evita lesiones por maceración o abrasión. Permite liberar rápidamente al paciente sin desatar las cintas del bastidor. Ahorra tiempo al personal de enfermería. Gran capacidad de contención. Lavable y Reutilizable.

Referencias

SVC 2580 Muñequera con Velcro para neonato
SVC 2590 Muñequera con Velcro Pediátrica
SVC 2400 Muñequera con Velcro para adulto

Envasado

Caja de 24 pares

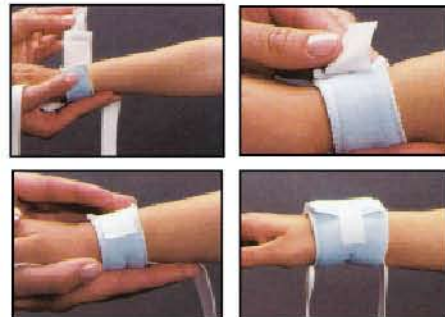

Modo de aplicación

1. Colocar la muñeca del paciente sobre la cara de color blanco dejando las cintas caer por ambos lados.
2. Ajuste y fije la muñequera con el cierre de Velcro.
3. Tense y anude las cintas a ambos lados del bastidor de la cama.

CINTURÓN ABDOMINAL



Ventajas

Se ajusta y adapta sin deformarse. No se altera en contacto con fluidos. Fijación mediante cintas extrafuertes de poliéster y anillas de nylon ligeras, resiste una tracción de hasta 160 kg. Acolchado confortable de tacto suave. Transpirable. Capacidad de absorber la presión. Interior blanco de poliéster 75% y viscosa 25%.

Beneficios

No oprime, permite cambios posturales. No interfiere en exploraciones radiológicas, resonancias magnéticas o TAC. Facilita el trabajo de enfermería. Fresco y confortable para el paciente.

Product REF

SVC 2100 Cinturón Abdominal Pediátrico
SVC 2200 Cinturón Abdominal Adulto
SVC 2300 Cinturón Abdominal Adulto talla L

Envasado

Caja de 10 unidades



Modo de aplicación

1. Colocar el cinturón alrededor de la cintura del paciente.
2. Cruce las cintas por detrás.
3. Anude las cintas a ambos lados del bastidor de la cama. El paciente podrá girar 90 grados hacia cada lado sin peligro de caída.
4. Si desea mayor sujeción vuelva a pasar las cintas a través de las anillas laterales y átelas de nuevo al bastidor.

BANDA FRONTAL ABSORBENTE



Ventajas

La Banda Frontal incorpora una zona absorbente para evitar la molestia del sudor de la frente durante las operaciones y tiene una banda elástica para colocarse de forma fácil y rápida. Interior blanco de poliéster 75% y viscosa 25%.

Referencias

SVC 2600 Banda Frontal Absorbente

Envasado

Caja de 100 unidades

Todos los productos SALVACEL pueden reutilizarse y ser lavados con agua tibia y jabón neutro.