

# Sistemas de CONTENCIÓN TERAPÉUTICA

CONTENCIÓN



# Salvafix<sup>®</sup>

Memory *PRO* | Standard | Slim | Transport

 **MEDICARE  
SYSTEM**

# Salvafix®

Memory PRO | Standard | Slim | Transport



## SISTEMAS DE CONTENCIÓN TERAPÉUTICA

Reconocido y recomendado por los profesionales sanitarios como el sistema preventivo de contención terapéutica más cómodo, rápido y seguro del mercado. Pensado para pacientes con agitación psicomotriz, facilita el autocontrol y evita el riesgo de autolesión o lesión a terceros y caídas de la cama, camilla, silla o sillón. También permite flexibilizar de forma segura el grado de contención según requiera el tratamiento.



## SEGURIDAD DE SALVAFIX®



Estructura reforzada de forma estandarizada en todas las zonas susceptibles de sufrir esfuerzos elevados.

Ollaos sellados por ultrasonido para evitar desgarros



**Latexfree**



Bordes con costura reforzada, acolchados y suaves para evitar lesiones al paciente.

Velcro® para facilitar una rápida y segura aplicación.



# SISTEMAS DE CIERRE SEGURO

de fácil y rápida colocación y se abren con llave específica.

\* No funciona en condiciones de mojado.



## SISTEMA DE CIERRE SEGURO ESTÁNDAR

Para uso general, resiste hasta 150 kg de tracción. Está compuesto por tres elementos:

- BOTÓN amarillo de cierre seguro\*
- PIVOTE de acero inoxidable con ranura de anclaje
- LLAVE magnética con centrador



## SISTEMA DE CIERRE SEGURO ALUMINIO

Especial para uso en psiquiatría y urgencias, resiste hasta 300 kg de tracción. Está compuesto por tres elementos:

- BOTÓN amarillo de cierre seguro con base reforzada de aluminio\*
- PIVOTE de acero inoxidable con ranura de anclaje
- LLAVE magnética con centrador



## SISTEMA DE CIERRE SEGURO MECÁNICO

El sistema de más alta resistencia. Apto para el lavado del paciente y funciona correctamente incluso después de haberse mojado. Está compuesto por tres elementos:

- BOTÓN de cierre con mecanismo de acero inoxidable y carcasa de aluminio
- PIVOTE de acero inoxidable de 7 mm de diámetro
- LLAVE mecánica de acero inoxidable

## LLAVE MAGNÉTICA

La nueva llave magnética con el sistema centrador mejora el posicionamiento de la llave en el botón de cierre seguro. Esta característica facilita el desbloqueo y la apertura del botón.



### Potencia magnética de materiales



· Apertura rápida y segura  
· Con imán de **Neodimio** con numerosas ventajas:

- 3 a 6 veces mas potente
- Pequeño y fácil de llevar
- Buen aspecto y acabado
- No pierde partículas magnéticas

## LLAVE MECÁNICA

Llave fabricada con acero inoxidable especialmente diseñada para una rápida y segura apertura del botón mecánico. Funciona correctamente bajo cualquier condición de humedad o temperatura.




## ETIQUETADO

Diagrama de etiquetado para el sistema SALVAFIX®:

- Nombre de gama SALVAFIX®:** Memory<sup>PRO</sup>
- Código de referencia:** SVF3000 P
- Posición:** Indicadores de posición (cinturón, muñequera, arnés, perineal, DUO).
- Orientación:** UP (indicador de orientación).
- Material:** M0912
- Información de lavado:** 100% PES, 90°C, símbolos de lavado.
- Número de lote:** LOT M0912
- Tallas:** M, S, L, XL.
- Logotipo:** MEDICARE SYSTEM S.L.U. www.medisystemsll.com

## CÓDIGO DE COLOR

Para facilitar la identificación del sistema SALVAFIX® se hace la siguiente distinción:

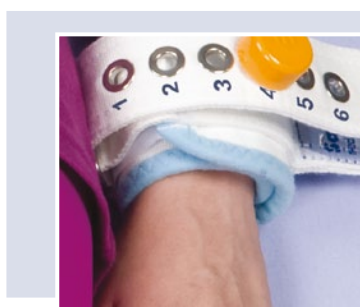

### Ribete AZUL

- Cinturones
- Muñequeras
- Arnés
- Perineal
- DUO



### Ribete BEIGE

- Tobilleras
- Muslera


# SALVAFIX® Memory PRO

Simplifica la aplicación y aumenta la seguridad y control, evitando riesgos para el paciente por demasiado ajuste o para el personal sanitario por demasiada holgura.

El **CÓDIGO ALFANUMÉRICO** es un nuevo sistema patentado que permite aplicar el producto de una manera más fácil, rápida y segura. Informa de cambios en la medida abdominal y permite una configuración constante en cada aplicación.

## CINTURÓN ABDOMINAL con BANDA PERINEAL

El cinturón de sujeción abdominal incluye un sistema articulado que permite al paciente girarse hacia ambos lados, incorporarse o sentarse en la cama. Se puede instalar fácilmente antes o después de que el paciente se haya acostado. La parte inferior, con bandas de sujeción, se fija al bastidor de la cama o camilla, la superior se coloca alrededor de la cintura del paciente. Las bandas de sujeción lateral deben aplicarse y usarse siempre y sirven para evitar que el paciente gire sobre el eje del cinturón.

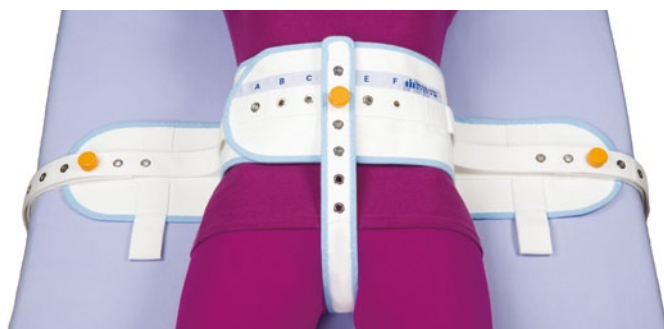

| CÓDIGO   | TALLA     | PERÍMETRO    | ANCHURA |
|----------|-----------|--------------|---------|
| SVF3001P | <b>S</b>  | 46 - 76 cm   | 16 cm   |
| SVF3000P | <b>M</b>  | 68 - 108 cm  | 18 cm   |
| SVF3002P | <b>L</b>  | 95 - 135 cm  | 18 cm   |
| SVF3003P | <b>XL</b> | 115 - 150 cm | 18 cm   |

- 1 cinturón con 2 bandas laterales y perineal cosidos
- 3 botones de cierre (tallas L y XL 4 botones de cierre)
- 2 llaves magnéticas

**ATENCIÓN:** Utilizar siempre este cinturón conjuntamente con las bandas laterales y el perineal, por seguridad y para evitar accidentes y lesiones al paciente.



Sistema MEMORY patentado



Facilita la colocación y registra la condición del paciente

Banda lateral cosida



Mejora la seguridad del paciente evitando el efecto helicóptero

Banda perineal



Previene que el paciente se deslice hacia abajo evitando lesiones y riesgo de asfixia

Articulación



Permite el cambio postural

3 ollaos en el base de cinturón



Mejora la adaptación a las distintas anchuras de las camas

Banda lateral con más ollaos



Permite la contención terapéutica

Ribetes acolchados reforzados




Aumenta el confort del paciente

Dobles ollaos para XL



Mejora la seguridad del paciente

## CINTURÓN ABDOMINAL sin BANDA PERINEAL

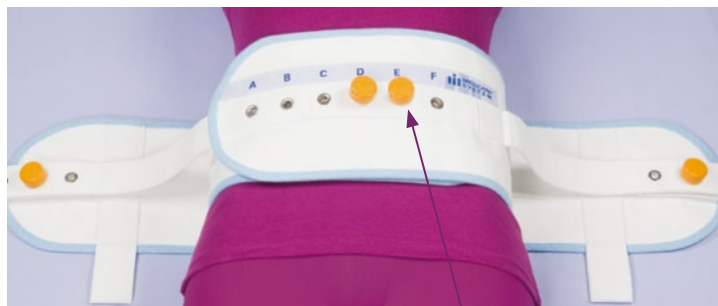


\* Recomendación para talla "L":  
añadir segundo botón por seguridad.

| CÓDIGO  | TALLA     | PERÍMETRO    | ANCHURA |
|---------|-----------|--------------|---------|
| SVF3001 | <b>S</b>  | 46 - 76 cm   | 16 cm   |
| SVF3000 | <b>M</b>  | 68 - 108 cm  | 18 cm   |
| SVF3002 | <b>L</b>  | 95 - 135 cm  | 18 cm   |
| SVF3003 | <b>XL</b> | 115 - 150 cm | 18 cm   |

- 1 cinturón con 2 bandas laterales cosidas
- 3 botones de cierre (tallas L y XL 4 botones de cierre)
- 2 llaves magnéticas

## MUÑEQUERAS

Las muñequeras de sujeción SALVAFIX® permiten asegurar una o ambas manos del paciente. El Velcro® facilita la aplicación de las muñequeras de una forma más ajustada, incrementando la seguridad del sistema.

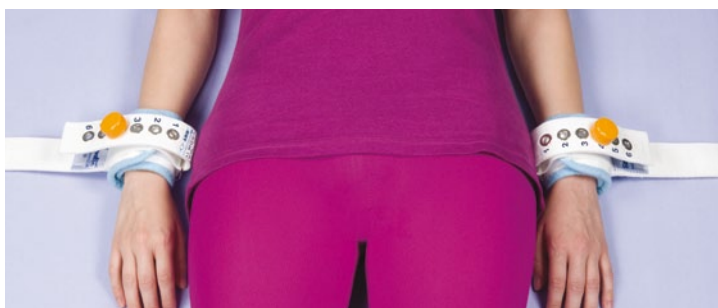

| CÓDIGO  | TALLA     | PERÍMETRO  | ANCHURA |
|---------|-----------|------------|---------|
| SVF3251 | <b>S</b>  | 9 - 15 cm  | 8 cm    |
| SVF3250 | <b>M</b>  | 14 - 20 cm | 8 cm    |
| SVF3252 | <b>L</b>  | 19 - 25 cm | 8 cm    |
| SVF3253 | <b>XL</b> | 24 - 30 cm | 8 cm    |

- 2 muñequeras
- 4 botones de cierre
- 2 llaves magnéticas



Acolchado envolvente de tacto suave.  
Elimina lesiones por presión o abrasión.

Combinadas con el cinturón abdominal  
SALVAFIX® y sujetas a las presillas  
situadas en su base, limitan movimientos  
fuera del perímetro de la cama.



## TOBILLERAS

Las tobilleras de sujeción SALVAFIX® permiten adecuar los niveles de sujeción a las necesidades clínicas del paciente. Los acolchados de protección son de características idénticas a las muñequeras. El Velcro® facilita la aplicación de las tobilleras de una forma más ajustada, incrementando la seguridad del sistema.



| CÓDIGO  | TALLA     | PERÍMETRO  | ANCHURA |
|---------|-----------|------------|---------|
| SVF3351 | <b>S</b>  | 13 - 18 cm | 8 cm    |
| SVF3350 | <b>M</b>  | 18 - 24 cm | 8 cm    |
| SVF3352 | <b>L</b>  | 24 - 28 cm | 8 cm    |
| SVF3353 | <b>XL</b> | 28 - 34 cm | 8 cm    |

- 2 tobilleras
- 1 cincha de sujeción a la cama para tobillera
- 4 botones de cierre
- 2 llaves magnéticas

## ARNÉS + TÓRAX

Evita que el paciente se deslice verticalmente hacia arriba y es altamente flexible en su aplicación. Una cinta alrededor del tórax impide que puedan deslizarse y soltarse del arnés. Con este producto se adjunta una banda transversal cuyo uso impide la incorporación violenta e inmediata para que no pueda lesionarse a sí mismo o a otras personas. Para pacientes no violentos se utiliza este arnés sin la banda transversal y el paciente obtiene un grado de movilidad mas alto al poderse incorporar en la cama, pero no deslizarse hacia arriba.



| CÓDIGO  | TALLA      | PERÍMETRO    |
|---------|------------|--------------|
| SVF3431 | <b>S</b>   | 50 - 90 cm   |
| SVF3430 | <b>M/L</b> | 70 - 126 cm  |
| SVF3433 | <b>XL</b>  | 109 - 165 cm |

- 1 arnés de sujeción con cinta de tórax
- 1 cincha de sujeción a la cama para arnés
- 4 botones de cierre
- 1 llave magnética

## SISTEMA COMPLETO

Este sistema permite elevar al máximo el nivel de seguridad del paciente y del personal médico. Dado que se compone de elementos individuales se pueden utilizar según necesidad en el momento.



| SIN<br>perineal cosido | CON<br>perineal cosido | TALLA     |
|------------------------|------------------------|-----------|
| CÓDIGO                 | CÓDIGO                 |           |
| SVF3151                | SVF3151P               | <b>S</b>  |
| SVF3150                | SVF3150P               | <b>M</b>  |
| SVF3152                | SVF3152P               | <b>L</b>  |
| SVF3153                | SVF3153P               | <b>XL</b> |

- 1 cinturón con 2 bandas laterales cosidas (incluye perineal cosido en los códigos SVF315\*P)
- 1 banda perineal (no incluida en los códigos SVF315\*P)
- 1 arnés de sujeción con cinta de tórax
- 1 cincha de sujeción a la cama para arnés
- 2 muñequeras
- 2 tobilleras
- 1 cincha de sujeción a la cama para tobillera
- 15 botones de cierre (16 para L y XL)
- 4 llaves magnéticas

Cinturón con perineal



Arnés + tórax



Muñequeras



Tobilleras



# SALVAFIX® Standard

La gama STANDARD permite una contención segura y adaptada a la necesidad del momento. Productos fabricados con materiales muy resistentes, confortables y sencillos de utilizar.

## CINTURÓN ABDOMINAL con BANDA PERINEAL

El cinturón de sujeción abdominal se puede instalar fácilmente antes o después de que el paciente se haya acostado. La parte inferior, con bandas de sujeción, se fija al bastidor de la cama o camilla, la superior se coloca alrededor de la cintura del paciente. Las bandas de sujeción lateral deben aplicarse y usarse siempre y sirven para controlar o fijar el giro a derecha o izquierda y permiten realizar los cambios posturales pertinentes.



| CÓDIGO   | TALLA    | PERÍMETRO   | ANCHURA |
|----------|----------|-------------|---------|
| SVF3031P | <b>S</b> | 46 - 76 cm  | 16 cm   |
| SVF3030P | <b>M</b> | 68 - 108 cm | 18 cm   |
| SVF3032P | <b>L</b> | 95 - 135 cm | 18 cm   |

- 1 cinturón con 2 bandas laterales y perineal cosidos
- 3 botones de cierre (talla L 4 botones de cierre)
- 1 llave magnética

**ATENCIÓN:** Utilizar siempre este cinturón conjuntamente con las bandas laterales y el perineal, por seguridad y para evitar accidentes y lesiones al paciente.

Banda lateral cosida



Mejora la seguridad del paciente evitando el efecto helicóptero

Banda perineal



Previene que el paciente se deslice hacia abajo evitando lesiones y riesgo de asfixia

Articulación



Cosido central

3 ollaos en el base de cinturón



Mejora la adaptación a las distintas anchuras de las camas

Banda lateral con más ollaos



Permite la contención terapéutica

Ribetes acolchados reforzados



Aumenta el confort del paciente

## CINTURÓN ABDOMINAL sin BANDA PERINEAL



| CÓDIGO  | TALLA    | PERÍMETRO   | ANCHURA |
|---------|----------|-------------|---------|
| SVF3031 | <b>S</b> | 46 - 76 cm  | 16 cm   |
| SVF3030 | <b>M</b> | 68 - 108 cm | 18 cm   |
| SVF3032 | <b>L</b> | 95 - 135 cm | 18 cm   |

- 1 cinturón con 2 bandas laterales cosidas
- 3 botones de cierre (talla L 4 botones de cierre)
- 1 llave magnética

## MUÑEQUERAS, TOBILLERAS y MUSLERAS

Permiten asegurar las extremidades del paciente. El confortable acolchado envolvente y de tacto suave elimina las posibles lesiones por presión o abrasión que se dan con los sistemas de contención tradicionales. Su particular diseño permite una cómoda aplicación sobre las presillas del cinturón, eliminando así las dificultades de fijación al bastidor de la cama con distintos anchos. El Velcro® del interior impide el deslizamiento de las partes solapadas.



| CÓDIGO  | TALLA    | PERÍMETRO  | ANCHURA |
|---------|----------|------------|---------|
| SVF3221 | <b>S</b> | 9 - 15 cm  | 8 cm    |
| SVF3220 | <b>M</b> | 14 - 20 cm | 8 cm    |
| SVF3222 | <b>L</b> | 19 - 25 cm | 8 cm    |

- 2 muñequeras
- 2 botones de cierre
- 1 llave magnética



| CÓDIGO  | TALLA    | PERÍMETRO  | ANCHURA |
|---------|----------|------------|---------|
| SVF3321 | <b>S</b> | 13 - 18 cm | 8 cm    |
| SVF3320 | <b>M</b> | 18 - 24 cm | 8 cm    |
| SVF3322 | <b>L</b> | 24 - 28 cm | 8 cm    |

- 1 conjunto de tobilleras cosidas
- 4 botones de cierre
- 1 llave magnética



| CÓDIGO  | TALLA        | PERÍMETRO  | ANCHURA |
|---------|--------------|------------|---------|
| SVF3600 | <b>ÚNICA</b> | 32 - 62 cm | 8 cm    |

- 1 muslera
- 4 botones de cierre
- 1 llave magnética

## ARNÉS

El arnés de sujeción torácica se utiliza para evitar que el paciente pueda desplazarse verticalmente y realizar agresiones con la cabeza. Se sujeta por medio de una amplia banda de Velcro® a la parte posterior del cinturón y con el sistema de cierre a la anterior. Un ribete azul cosido en el borde de las bandas les confiere una superficie suave y acolchada para mayor confort del paciente.



| CÓDIGO  | TALLA        |
|---------|--------------|
| SVF3400 | <b>ÚNICA</b> |

- 1 arnés de sujeción
- 1 cincha de sujeción a la cama para arnés
- 3 botones de cierre
- 1 llave magnética

## SISTEMA COMPLETO

Este sistema permite elevar al máximo el nivel de seguridad del paciente y del personal médico. Dado que se compone de elementos individuales se pueden utilizar según necesidad en el momento.



| SIN<br>perineal cosido | CON<br>perineal cosido |          |
|------------------------|------------------------|----------|
| CÓDIGO                 | CÓDIGO                 | TALLA    |
| SVF3121                | SVF3121P               | <b>S</b> |
| SVF3120                | SVF3120P               | <b>M</b> |
| SVF3122                | SVF3122P               | <b>L</b> |

- 1 cinturón con 2 bandas laterales cosidas (incluye perineal cosido en los códigos SVF312\*P)
- 1 banda perineal (no incluida en los códigos SVF312\*P)
- 1 arnés de sujeción
- 1 cincha de sujeción a la cama para arnés
- 2 muñequeras
- 1 conjunto de tobilleras cosidas
- 12 botones de cierre (13 para L)
- 2 llaves magnéticas

## SALVAFIX® Duo

### DUO UNIVERSAL

Este par universal permite una contención indistinta de manos y/o pies en caso de emergencia. Tiene una gran capacidad de fijación de perímetro y bandas largas con muchos ojalos para el amarre seguro a cualquier tipo de cama, camilla u otro sitio necesario en cualquier momento.



| CÓDIGO  | TALLA        | PERÍMETRO  | ANCHURA |
|---------|--------------|------------|---------|
| SVF3800 | <b>ÚNICA</b> | 10 - 34 cm | 8 cm    |

- 1 par de DUO
- 4 botones de cierre
- 2 llaves magnéticas



| CÓDIGO  | TALLA        | PERÍMETRO  | ANCHURA |
|---------|--------------|------------|---------|
| SVF3820 | <b>ÚNICA</b> | 10 - 34 cm | 8 cm    |


- 1 par de DUO
- 4 botones de cierre
- 2 llaves magnéticas

# SALVAFIX® Slim

Permite una contención segura y adaptada al paciente de complejión delgada en cama, silla de ruedas, silla o sillón. Ideales para la atención domiciliar por su seguridad, comodidad y sencillez.

## CINTURÓN PARA CAMA con BANDA PERINEAL

Cinturón con bandas laterales y perineal fijado al cinturón para mayor seguridad del paciente. El perineal evita que el cinturón se deslice hacia arriba. Las bandas laterales impiden que el paciente gire sobre el eje del cinturón.

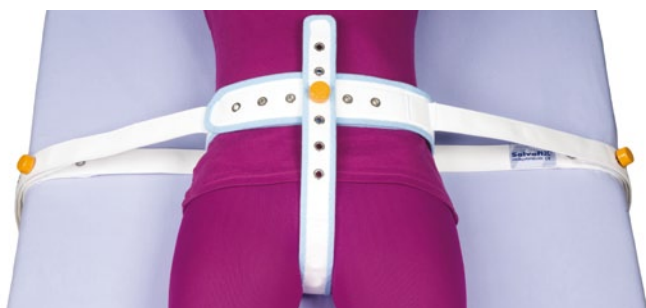

| CÓDIGO   | TALLA    | PERÍMETRO   | ANCHURA |
|----------|----------|-------------|---------|
| SVF3050P | <b>M</b> | 68 - 108 cm | 8 cm    |

- 1 cinturón con dos bandas laterales y perineal cosido
- 3 botones de cierre
- 1 llave magnética

## CINTURÓN PARA CAMA sin BANDA PERINEAL



| CÓDIGO  | TALLA    | PERÍMETRO   | ANCHURA |
|---------|----------|-------------|---------|
| SVF3050 | <b>M</b> | 68 - 108 cm | 8 cm    |

- 1 cinturón con dos bandas laterales cosidas
- 3 botones de cierre
- 1 llave magnética

## CINTURÓN PARA SILLA DE RUEDAS | SILLA | SILLÓN

Modelo diseñado para paciente sentado. De fácil montaje gracias a la longitud adecuada de sus cintas, abarcando los diferentes perímetros que pueda tener la silla de ruedas, silla o sillón.



| CÓDIGO  | TALLA    | PERÍMETRO   | ANCHURA |
|---------|----------|-------------|---------|
| SVF3060 | <b>M</b> | 68 - 108 cm | 8 cm    |
| SVF3062 | <b>L</b> | 74 - 114 cm | 8 cm    |

- 1 cinturón
- 2 botones de cierre
- 1 llave magnética

## BANDA PERINEAL

Elemento adicional de seguridad que impide el deslizamiento involuntario del paciente. Fácil de colocar y quitar.



| CÓDIGO  | TALLA    | LONGITUD | ANCHURA |
|---------|----------|----------|---------|
| SVF3411 | <b>M</b> | 110 cm   | 5 cm    |
| SVF3412 | <b>L</b> | 150 cm   | 5 cm    |

- 1 banda de perineal (cinturón no incluido)

# SALVAFIX® Transport

Sistema de contención seguro y adaptado específicamente para el transporte de pacientes agitados y/o desorientados en camilla. Permite una colocación rápida, ofreciendo alta seguridad y confort al paciente.



## MUÑEQUERAS

Muñequeras adaptadas al montaje en camilla sin descuidar las prestaciones habituales de seguridad y confort. Su particular diseño permite una cómoda aplicación sobre la camilla gracias a su sistema de fabricación en monoblock, eliminando así las dificultades de fijación de otros sistemas tradicionales.

| CÓDIGO  | TALLA    | PERÍMETRO  | ANCHURA |
|---------|----------|------------|---------|
| SVF3270 | <b>M</b> | 14 - 20 cm | 8 cm    |

- 1 conjunto de muñequeras cosidas para camilla
- 3 botones de cierre
- 1 llave magnética

## TOBILLERAS

Tobilleras adaptadas al montaje en camilla sin descuidar las prestaciones habituales de seguridad y confort. Su particular diseño permite una cómoda aplicación sobre la camilla gracias a su sistema de fabricación en monoblock, eliminando así las dificultades de fijación de otros sistemas tradicionales.

| CÓDIGO  | TALLA    | PERÍMETRO  | ANCHURA |
|---------|----------|------------|---------|
| SVF3370 | <b>M</b> | 18 - 24 cm | 8 cm    |

- 1 conjunto de tobilleras cosidas para camilla
- 3 botones de cierre
- 1 llave magnética

## ARNÉS

El arnés de sujeción torácica se utiliza para evitar que el paciente pueda desplazarse verticalmente y para evitar que pueda realizar agresiones con la cabeza. Un ribete azul cosido en el borde de las bandas las dotan de una superficie suave y acolchada para mayor confort del paciente. Su particular diseño permite una cómoda aplicación sobre la camilla gracias a su sistema de fabricación en monoblock, eliminando así las dificultades de fijación de otros sistemas tradicionales.

| CÓDIGO  | TALLA        |
|---------|--------------|
| SVF3470 | <b>ÚNICA</b> |

- 1 arnés para camilla
- 3 botones de cierre
- 1 llave magnética

# ACCESORIOS

## SISTEMAS DE CIERRE SEGURO

|                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | SVF3500<br>Caja de 10 sistemas de cierre seguro estándar<br>(10 botones + 10 pivotes)                    |  | SVF3510<br>Caja de 10 sistemas de cierre seguro en aluminio<br>(10 botones + 10 pivotes)                                         |
|  | SVF3503<br>Caja de 20 botones amarillos sin pivotes<br>SVF3504<br>Caja de 20 pivotes de acero inoxidable |  | SVF3520<br>Caja de 10 sistemas de cierre seguro mecánicos lavables<br>SVF3570<br>Caja de 10 llaves mecánicas de acero inoxidable |
|  | SVF3551<br>Caja de 10 llaves magnéticas azules<br>con imán reforzado de Neodimio                         |  | SVF3950<br>Caja de 10 llaveros extensibles                                                                                       |

|                                                                                   |                                                              |                                                                                    |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | SVF3920<br>Kit de emergencia:<br>Caja + Herramienta de corte |  | SVF3460<br>Cinta de extensión de 60cm                                                          |
|  | SVF3900<br>Herramienta de corte                              |   | BAG 4560<br>Bolsa de lavado SALVAFIX® 45x60cm<br>BAG 6090<br>Bolsa de lavado SALVAFIX® 60x90cm |

## OTROS PRODUCTOS

### Salvafast®

Sistema rápido de contención/liberación



### Salvaclip® Safe & Comfort

Chaleco/Cinturón



## FORMACIÓN PROFESIONAL

Medicare System, como empresa especializada en sistemas de contención, dispone de un completo programa de formación para profesionales, con material didáctico, clases prácticas y asistencia a distancia, dirigidas a una utilización más eficaz y segura de nuestros sistemas.



Para una información más detallada de todos los productos ver folleto de instrucciones de uso e información de seguridad incluido en cada unidad de producto.



Medi Care System S.L.U.  
Abad Escarré, 15 · 08302 Mataró (Barcelona) SPAIN  
Tel. +34 937 570 048 · Fax +34 937 414 068  
info@medisystemsll.com · www.medicaressystem.es

