

Medi-roller®

Tabla para Transferencias laterales con Funda tubular deslizante



La tabla con Funda deslizante para transferencias laterales Medi-ROLLER permite transferir cómodamente a pacientes a o desde Camas, Camillas, Camillas de Ambulancia, Mesas de Operaciones, Mesas de Rayos X, o similares, etc.

Es apropiada para transferir pacientes de hasta 120 kg de peso entre dos superficies, situadas a un desnivel máximo de hasta 20 cm, y separadas entre sí hasta 20 cms de distancia máxima.

La tabla Medi-ROLLER es la más ligera del mercado, dispone en su interior de un núcleo rígido acolchado en las dos caras y una funda exterior deslizante. La funda sinfín exterior de material super-deslizante de muy baja fricción facilita el deslizamiento lateral del paciente permitiendo realizar una transferencia fácil, rápida, eficaz y segura con un mínimo esfuerzo, evitándole al cuidador las lesiones por sobreesfuerzos.

La tabla Medi-ROLLER también puede usarse con sábanas desechables para proteger tanto al dispositivo como al paciente, de acuerdo a las pautas establecidas en el protocolo de Control de Infecciones.

La funda exterior es recambiable y puede ser sustituida por desgaste o por el uso, y todo el conjunto permite una limpieza fácil y rápida.

CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN
TMR 6200	Medi-ROLLER Plegable 180x50 cm
TMR 6220	Medi-ROLLER Corto 90x50 cm
TMR 6250	Funda Exterior Deslizante - Recambio para TMR6200
TMR 6252	Funda Exterior Deslizante - Recambio para TMR6220
TMR 6270	Funda tubular de plástico desechable 180x55 cm (Rollos de 100 unidades)



RECOMENDACIÓN

Se aconseja utilizar Medi-ROLLER con una sábana de ayuda, o con la sábana desechable TTE-6160.



ATENCIÓN

Las tablas Medi-ROLLER deben utilizarse con unas técnicas adecuadas y por un personal debidamente entrenado en su uso.

Limpieza:

Funda: Lavado a máquina a temperatura máxima de 90°. No usar lejía. No secar a máquina. No planchar. No limpiar en seco.

Tabla y Funda: Pueden limpiarse con un tejido humedecido en solución jabonosa neutra.

Desinfección: Usar desinfectantes de superficies compatibles con los materiales utilizados en la tabla y en la funda.

Medi-glide®

Tablas de Ayuda para Transferencias

Diseñadas para su uso por el Personal Sanitario, Terapeuta ocupacional, Cuidador o Persona dependiente, como ayuda para realizar las transferencias a o desde una cama, camilla, silla de ruedas, silla, sillón, lavabo, asiento de automóvil, etc. reduciendo el esfuerzo a realizar y efectuando la tarea más fácil, rápida, cómoda, efectiva y segura. Las tablas son muy ligeras y disponen de una cara muy deslizante en un lado y 2 bandas anti-deslizantes en el otro para realizar las transferencias con seguridad, e incluyen asas ergonómicas para facilitar su manejo y traslado. Fabricadas en PE, polietileno extrusionado y mecanizado, de color azul, termoestable, inalterable y resistente a los rayos UV.



Medi-GLIDE TMG-6400 - 600x330x5 mm, Lisa

Tabla standard y económica.

Medi-GLIDE TMG-6410 - 750x330x6 mm, Ranurada

Dispone de 2 ranuras mecanizadas longitudinales, lo que le permite doblarse y adaptarse mejor al contorno de la silla de ruedas.

RECOMENDACIÓN

Para mejorar el proceso de las transferencias se aconseja el uso de los Cinturones TMT-6512 y 6513, Banda de Ayuda TMT-6500 y Tubulares Acollados Deslizantes TMS-6300 y 6310.




Medi-GLIDE TMG-6420 - 1500x650x5 mm, 2 asas

Medi-GLIDE TMG-6430 - 1700x500x5 mm, 6 asas

Tablas diseñadas para realizar transferencias laterales horizontales de Pacientes a o desde cama, camilla, mesa de operaciones, mesa de rayos X, etc. de una forma fácil, rápida, confortable, efectiva y segura y con el mínimo esfuerzo para los Cuidadores, aplicando las técnicas de uso.

RECOMENDACIÓN

Para mejorar el proceso de las transferencias se aconseja el uso de una sábana de ayuda o el uso de las sábanas desechables Translide TTE-6160.

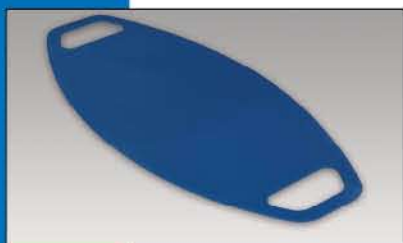

Medi-GLIDE TMG-6440 - 850x380x3mm

Tabla diseñada para realizar transferencias laterales horizontales y posicionamientos del paciente en la cama sin necesidad de lateralizarlo, de una forma fácil, cómoda, segura, y con el mínimo esfuerzo para el personal sanitario si es utilizada aplicando las técnicas de uso adecuadas.

La tabla es muy ligera y flexible e incorpora dos asas para facilitar su manejo y traslado. Su reducido espesor permite introducirla bajo el paciente sin lateralizarlo, aprovechando los huecos naturales del cuerpo.

RECOMENDACIÓN

Para mejorar el proceso de las transferencias se aconseja el uso de una sábana de ayuda o el uso de la sábana desechable Translide TTE-6160 y sábanas deslizantes Translide TTE-6110 y 6112.



Medi-GLIDE TMG-6450 - 750x250x200x6 mm

Tabla diseñada para realizar transferencias laterales horizontales de pacientes a o desde una cama, camilla, mesa de operaciones, mesa de rayos X, etc. Incorpora un lado en ángulo a 90° para ofrecer más seguridad durante la transferencia. Su reducido espesor, permite introducirla sin molestias bajo el paciente sin necesidad de lateralizarlo, aprovechando los huecos naturales del cuerpo.

La tabla incluye una banda complementaria de seguridad y se suministra en juegos de 2 unidades.

RECOMENDACIÓN

Para mejorar el proceso de las transferencias se aconseja el uso de la sábana Translide TTE-6110 y 6112.

⚠ ATENCIÓN: antes de usar, REVISE que la tabla esté en óptimas condiciones de uso.

Lavado: Puede limpiarse con un trapo húmedo en solución jabonosa neutra, o desinfectarse con desinfectantes de superficies compatibles con el material tipo PE.

Medi-slide®

Tubulares acolchados deslizantes para Transferencias y Posicionamiento


Los tubulares deslizantes Medi-SLIDE están diseñados para su uso por el Terapeuta Ocupacional, Cuidador o Persona dependiente para ayudar a realizar las transferencias y posicionamientos de una forma cómoda, fácil, rápida, segura, y con el mínimo esfuerzo por parte del Cuidador o del Paciente, debido a sus especiales características deslizantes. Los tubulares Medi-SLIDE se fabrican con un sándwich de tejidos técnicos compuesto de un material super-deslizante de muy baja fricción en su parte interna, un acolchado confortable en el interior y un tejido muy suave en el exterior.



Medi-SLIDE TMS-6300 de 25x60 cm

Medi-SLIDE TMS-6310 de 50x60 cm

Indicado para ayudar a realizar las transferencias de pacientes a o desde una cama, silla de ruedas, silla o sillón, vehículo, lavabo, etc. Está también indicado para ayudar al paciente a girarse o posicionarse en la cama por sí mismo o con ayuda del Cuidador.

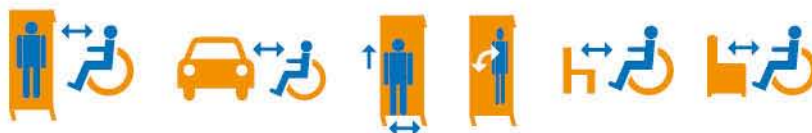

Medi-SLIDE TMS-6340 de 190x60 cm

Indicado para realizar transferencias de Pacientes a o desde cama, camilla, etc.



Medi-SLIDE TMS-6325 de 100x85 cm

Medi-SLIDE TMS-6335 de 140x85 cm

Medi-SLIDE TMS-6345 de 190x85 cm

Indicados para colocarlos bajo el paciente todo el tiempo que sea necesario y ayudar al Cuidador a realizar las tareas de cambios posturales, lateralización y correcto posicionamiento de Pacientes encamados. Es ideal para que el Paciente encamado pueda ayudarse a girar o posicionarse en la cama por sí mismo fácilmente y sin esfuerzo.



Medi-SLIDE TMS-6360 Unidireccional Tubular de 50x45 cm

Medi-SLIDE TMS-6370 Unidireccional de 130x45 cm con asas

Indicados para su uso en los asientos de las sillas de ruedas, sillas o sofás. Disponen de un material antideslizante unidireccional para evitar que el Paciente se deslice, resbale o desplace horizontalmente en el asiento hacia adelante. Con Medi-SLIDE Unidireccional es muy fácil re-posicionar al Paciente en el asiento de forma fácil, rápida y sin esfuerzo por parte del Cuidador.



LAVADO: Lavado a máquina a temperatura máxima de 40°. No usar lejía. Secado a máquina suave. No planchar. No limpiar en seco.

Medi-tools

Elementos de Ayuda técnica para Pacientes y Cuidadores



TMT-6500

TMT-6505
TMT-6506

BANDA de ayuda TMT-6500


BANDA de ayuda flexible TMT-6505 (50cm), TMT-6506 (60cm)

La banda de ayuda está diseñada para proporcionar una extensión extra a los brazos del terapeuta o cuidador, destinada a su uso en terapia ocupacional para ayudar a realizar más fácilmente las diferentes tareas con pacientes dependientes como movilizar, posicionar, trasladar, elevar, transferir, sentar, reclinar, incorporar, etc. de una forma fácil, cómoda, segura y eficaz, evitando lesiones por sobre-esfuerzo a los cuidadores. El conjunto está reforzado con costuras super-resistentes que garantizan un uso seguro, efectivo y duradero.



CINTURÓN de ayuda TMT-6512 talla M, TMT-6513 talla L

Los cinturones de ayuda proporcionan una serie de asas como puntos de sujeción extra para las manos del terapeuta ocupacional, cuidador y el mismo paciente dependiente. Destinado a su uso en terapia ocupacional para ayudar a realizar las diferentes tareas como deambular, incorporar, trasladar, elevar, movilizar, posicionar, transferir, sentar, etc. de una forma fácil, cómoda, segura y eficaz, evitando lesiones por sobre-esfuerzo a los cuidadores. El conjunto está reforzado con costuras super-resistentes que garantizan un uso seguro y duradero. Se adapta a la cintura del usuario mediante una banda y clip de nylon ajustables.

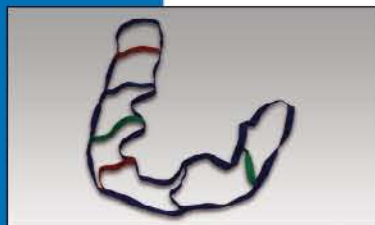

ESCALERA de Ayuda TMT-6540 de 200x20 cms

La escalera de ayuda está diseñada como un elemento de ayuda a la incorporación para el paciente encamado o en silla de ruedas. Se utiliza atándola a un punto seguro de la cama y dispone de 6 bandas separadas en diferentes colores para que el paciente identifique fácilmente donde cogerse de acuerdo a las instrucciones del cuidador. Fabricada en tejido técnico de gran durabilidad y resistencia.



DISCO rotación duro TMT-6550

Este disco giratorio ligero permite al profesional girar fácilmente al paciente durante una transferencia (p.e. cama a silla) y reduce el riesgo de tensión o lesión de espalda en el cuidador. Ambas caras del disco son de base antideslizante para una rotación controlada que garantice máxima estabilidad. Su altura es de sólo 15 mm; práctico, fácil de limpiar, seguro y duradero. Incorpora un asa de transporte.

Diámetro: 38 cm

Capacidad de carga: 135 kg

Peso: 1,7kg



DISCO rotación blando TMT-6555

El disco giratorio blando facilita la transferencia de una persona mientras está sentada en el asiento del coche, cama o silla. Se compone de dos discos flexibles de baja fricción, girando uno contra el otro sobre un eje central. Es altamente durable, a la vez que portátil y lavable a máquina.

Diámetro: 40 cm

Capacidad de carga: 135 kg

Altura: 20 mm

Peso: 0,4 kg



Translide®

Tubulares y Sábanas deslizantes para Transferencias de Pacientes



Translide TUBULAR deslizante

Los tubulares deslizantes TRANSLIDE están diseñados para ayudar a realizar las tareas de transferencias de Pacientes a o desde cama, camilla, silla de ruedas, silla, sillón, vehículo, mesa de operaciones, mesa de rayos X, mesa de TAC, etc. de una forma fácil, cómoda y rápida, y con el mínimo esfuerzo por parte del personal sanitario, debido a sus óptimas características deslizantes, evitando lesiones por sobre-esfuerzos.

Los tubulares se fabrican en un tejido técnico de alta tenacidad, superdeslizante y de muy baja fricción.

Translide TUBULAR es muy económico, práctico y fácil de usar por personal debidamente entrenado, ideal para transferencias y posicionamiento

TTE-6100 de 60x41 cm Rojo



TTE-6102 de 72x71 cm Rojo



TTE-6104 de 122x71 cm Rojo



TTE-6106 de 122x100 cm Rojo



TTE-6108 de 200x70 cm Rojo



Translide SÁBANA deslizante

Las Sábanas deslizantes TRANSLIDE son la solución más simple y económica en las ayudas técnicas destinadas a realizar las tareas de Transferencias y reposicionamiento de Pacientes

Se fabrican en un tejido técnico de alta tenacidad, superdeslizante y de muy baja fricción.

Para obtener un efecto multidireccional se recomienda usar 2 sábanas a la vez, pudiéndose combinar medidas, o usar la talla grande doblada por el centro.

TTE-6110 de 200x71 cm Rojo

TTE-6112 de 200x140 cm Rojo



Translide SÁBANA deslizante con Asas

Las Sábanas deslizantes TRANSLIDE con asas son una óptima solución para realizar transferencias y reposicionamientos de Pacientes de una forma más segura.

Se fabrican en un tejido técnico de alta tenacidad, superdeslizante y de muy baja fricción disponiendo de asas en 3 lados.

Para obtener un efecto multidireccional se recomienda usar 2 sábanas a la vez, pudiéndose combinar medidas o calidades, o usarlas en combinación con las Sábanas deslizantes sin asas.

TTE-6120 de 200x71 cm Rojo


TTE-6122 de 200x90 cm Rojo

TTE-6125 de 200x71 cm Azul para uso Bariátrico

TTE-6127 de 200x90 cm Azul para uso Bariátrico

TTE-6129 de 200x140 cm Azul para uso Bariátrico

Tubulares y Sábanas deslizantes para Transferencias de Pacientes

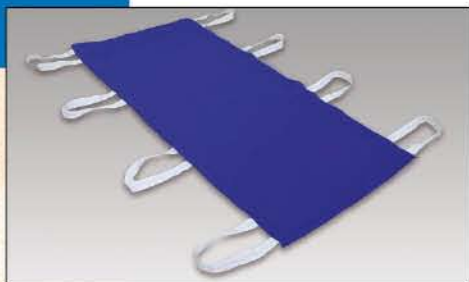

Translide **SÁBANA** deslizante con Asas para uso Bariátrico

Las Sábanas deslizantes TRANSLIDE con asas para uso Bariátrico son una óptima solución para realizar transferencias de Pacientes con gran peso de una forma más segura y ergonómica.

Se fabrican en un tejido técnico de alta tenacidad, superdeslizante y de muy baja fricción disponiendo de asas en 2 lados.

Para obtener un efecto multidireccional se recomienda usar 2 sábanas a la vez, pudiéndose combinar medidas o calidades, o usarlas en combinación con otras Sábanas deslizantes con o sin asas.

La sábana TTE-6145 NO INCORPORA deslizante y está diseñada para su uso en transferencias a o desde camilla y mesa de operaciones para evitar que el paciente se deslice o desplace.

TTE-6140 de 200x90 cm Azul con 6 asas

TTE-6142 de 200x90 cm Azul con 8 asas

TTE-6145 de 200x100 cm Azul con 6 asas NO DESLIZANTE



Translide **SÁBANA** Desechable con Asas

Las Sábanas desechables TRANSLIDE con asas son una óptima solución para realizar transferencias de Pacientes infecciosos o susceptibles de contaminar con líquidos corporales, sangre, etc.

Se fabrican con un tejido especial tipo TNT de color azul y disponen de 5 asas troqueladas en cada lado para facilitar la transferencia.

Se recomienda el uso de esta sábana desechable en combinación con las tablas de transferencia TMG-6420 + 6430 y TMR-6200.

Pueden usarse en combinación con cualquier Sábana deslizante Translide para mejorar el proceso de la transferencia.

TTE-6160 de 194x85 cm azul con 5+5 asas



Translide **TUBULAR** deslizante para medio húmedo

Estos tubulares deslizantes están diseñados para realizar transferencias en medio húmedo.

Los tubulares se fabrican en un tejido técnico de alta tenacidad, superdeslizante y de muy baja fricción y con un efecto de secado rápido.

TTH-6000 de 55x66 cm

TTH-6010 de 70x66 cm

TTH-6020 de 100x66 cm

TTH-6030 de 130x66 cm

TTH-6040 de 150x66 cm

