



Catálogo General

IV EDICIÓN

Micerium S.p.A.

Via G. Marconi, 83-16036 Avegno (GE) • Italy

Tel. +39 0185 7887 880 • Fax +39 0185 7887 970

e-mail: hfo@micerium.it • pedidos:sales@micerium.it

Oficina en España:

Calle Verdi, 38-40 bajos 2º- 08172 San Cugat del Valles (Barcelona)

Fax/Tel. +34 93 674 31 18

e-mail: michele@micerium.it • <http://www.micerium.es>

V.A.T. CEE IT01199870104

Cap. Soc. int. Vers. 1.000.000 euro

Cod. Fiscale e nr. iscrizione Reg.Imprese

Ge n° 01199870104 – R.E.A.265808






Estimado Cliente,

Nuestra empresa está presente en el sector dental desde hace más de 30 años y cuya actividad consiste en diseñar y fabricar dispositivos médicos para el sector dental.

Micerium S.p.A. considera que la calidad es un principio fundamental para su propia actividad. Entiende que el término "calidad" significa garantizar a sus clientes, productos y servicios innovadores que satisfagan e incluso superen sus expectativas.

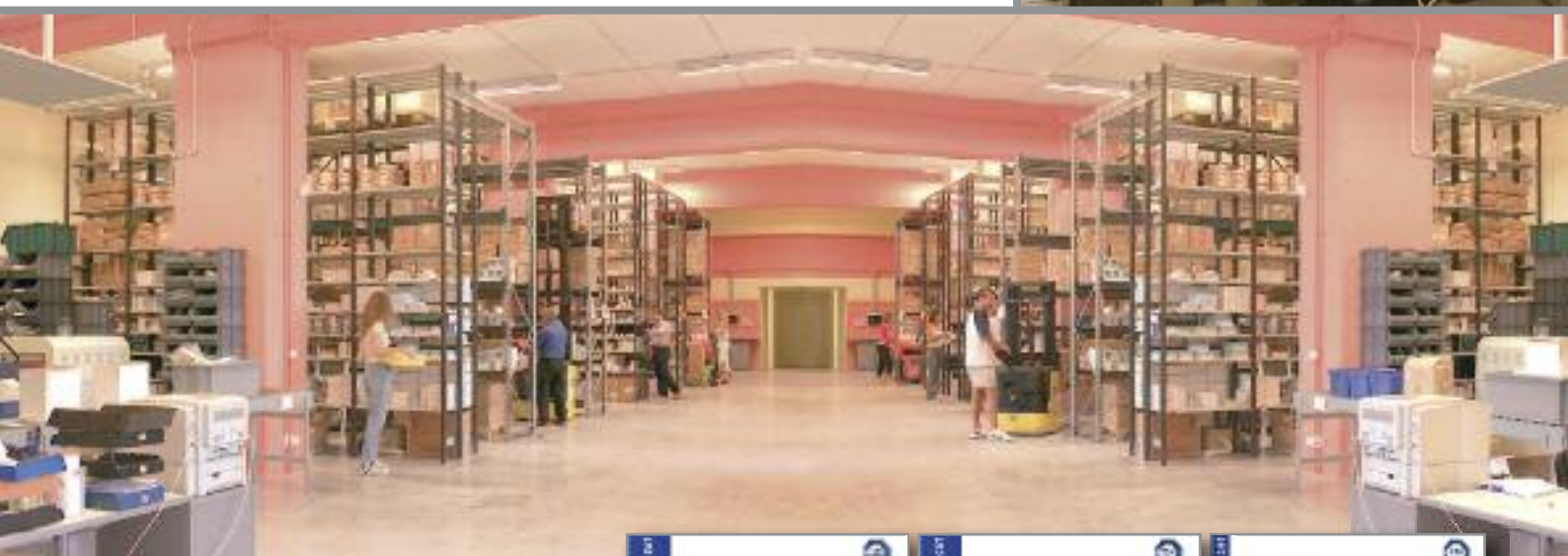

Este nivel no solo es factible con la existencia de un sistema de calidad en el ámbito de UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 13485:2012 y DIR 93/42 EEC - Anexo II.3, Anexo V y Anexo VII (D.L. 25 enero 2010, N.37 y ulteriores modificaciones) y de otros requisitos obligatorios, como por ejemplo la Good Manufacturing Practice americana (da 21 CFR 820.1 a 21 CFR 820.250) y la CMDR Canadiense, pero ajustado al grado de satisfacción de los propios clientes.



QUALITY

Índice



ESTÉTICA

Enamel plus HRi-HFO Composite	8	Tratamiento discromías	36
Composite Fluorescente,	16	Resina Provisional	38
Tintes y Pinceles		Ena Soft	39
Composite Acabado y Pulido	18	Tender Fiber Fibras	40
Ena Post Glass Fiber Post	24	Productos Ortodónticos	41
Ena Cem Cemento	26	Dentoprep	42
Adhesivos y acondicionadores	28	Lámparas	43
Matriz Seccional	33	Higiene Oral	44



LABORATORIO

Resina	48	Tender Tray	
Tender Composite	50	muñones desmontable	59
Light Curing Unit y Vacumix	54	Cortadora y Router	60
Aleaciones y revestimientos	55	Instrumentos	61
Ceras	56	Zircoshiny	62
Resinas calcinables	58		

Dirección



Maria Picarelli
Presidenta
Jefe Administrativa y
Responsable de R.R.H.H.



Gisella Allemand Miceli
Adm. Delegada.
Coordinadora R&D
División Estética
Directora de Ventas
Internacionales



Eugenio Miceli
Administrador Delegado
Director General Dpto.
Dental



Ottaviano Miceli
Administrador Delegado
Director General de la
Div. Ortodóntica



**Michèle Allemand
de Frouchtman**
Adm. Delegada
Directora España

Departamento de exportación



Nathalie Ramponi
Responsable Internacional
de Cursos



Mario Schilman
Director de Ventas
de España

Servicio al cliente



Francesca Tanghetti
Responsable servicio
al cliente



Isabella Ruggia
Responsable servicio
al cliente



Valentina Bacigalupo
Responsable servicio
al cliente



Carla Tazzer
Responsable
Control de Calidad



Diego Conca
Control de Calidad

Calidad

Packaging y almacén



Jolanda Picarelli
Responsable de
Packaging



Daniela Castelli
Packaging



Paola Manesso
Packaging



Concetta Incorvaia
Packaging



Rita Correale
Responsable Facturación

Asistentes de dirección Seguridad



Giuliana Bozzo
Responsable
Correspondencia y
archivos



Claudia Masi
Responsable
Correspondencia y pedidos



Paola Barberis
Responsable de la
seguridad

Contabilidad



Riccardo Mumenthaler
Responsable de
Contabilidad clientes



Laura Medici
Contabilidad



Fiorenza Martinotti
Contabilidad

Grafica & Internet



Gianluca Zeri
Responsable Informático



Giorgia Rea
Responsable Grafica



Viviane Tsubaki
Grafica

Envíos



Alessandro Farinelli
Envíos



Diego Marzocchi
Envíos

Uno de los principales objetivos de **Micerium S.p.A.** es la continua mejora de la calidad, con la la participación activa de todos sus recursos internos.

A tal efecto, la dirección de la empresa se compromete a gestionar los medios necesarios para satisfacer dichas expectativas, haciendo participar a todos sus recursos internos y externos, representantes y proveedores, con el propósito de elevar el nivel profesional de manera continua y dirigida a la obtención de la plena satisfacción del cliente, con una propuesta de productos y servicios cada vez más eficientes.

Todo el personal de la empresa está comprometido en alcanzar el más elevado estándar cualitativo, manteniendo un alto nivel de colaboración.

Otro objetivo es el de proponer al sector dental y odonto técnico, productos de última generación utilizables mediante técnicas simples fiables y reproducibles. Para ello Micerium S.p.A. promueve y organiza cursos con la finalidad de enseñar y transmitir a los profesionales la mejor utilización de sus productos y las técnicas más innovativas del sector.

Micerium S.p.A.

Maria Picarelli

Presidenta

Estética

VENEZIA





Estética

- 8 Enamel plus HRi - HFO Composite
- 16 Composite Fluorescente, Tintes y Pinceles
- 18 Composite Acabado y Pulido
- 24 Ena Post Glass Fiber Post
- 26 Ena Cem Cemento
- 28 Adhesivos y acondicionadores
- 33 Matriz Seccional
- 36 Tratamiento discromías Ena White
- 38 Resina Provisional
- 39 Ena Soft
- 40 Tender Fiber Fibras
- 41 Productos ortodónticos
- 42 Dentoprep
- 43 Lámparas
- 44 Higiene Oral

ENAMEL PLUS HRi FUNCTION

El único **esmalte**
que **se asemeja** a las
prestaciones del **ORO**

Después de revolucionar, junto con el Prof. Lorenzo Vanini, la estética de los composites con Enamel Plus HFO y después de haber conseguido con Enamel Plus HRi el único composite con el índice de refracción igual al del esmalte natural, hoy lanzamos al mercado Enamel Plus HRi Function, el único composite con características mecánicas y funcionales equivalentes a las del oro y similares a las del esmalte natural.



ESTÉTICA > FUNCIÓN

ANTES



DESPUÉS



POSTURA

by Lorenzo Vanini



ENAMEL PLUS HRi FUNCTION

estética

DATOS FÍSICOS

- Dureza Vickers: 760 Mpa
- Resistencia a la flexión: 150 Mpa
- Modulo de elasticidad: 11.500 Mpa
- Resistencia a la compresión: 460 Mpa

Sistema esmalte-composite para restablecer la función de manera mínimamente invasiva respetando el sistema neuromuscular y obteniendo una perfecta integración estética.

Masas sujetas a baja abrasión que se acercan a las de los esmaltes naturales. Ideales para la utilización en los sectores posteriores con técnica directa e indirecta y en particular para rehabilitaciones protésicas.

Son disponibles tres esmaltes "Function":

EF1 valor bajo, EF2 valor medio, EF3 valor alto.


DESGASTE: ANÁLISIS COMPARATIVO

DESPUÉS DE 120.000 CICLOS CON CHEWING MACHINE VS. ZIRCONIA

	Abrasión en Profundidad (mm)	Abrasión en Volumen (mm ³)	Abrasión Antagonista (mm)
Enamel plus HRi UE2 Fotopolimerizado	0.485 (0.064) ^c	1.452 (0.245) ^d	0.010 (0.007)
Composite F* (esmalte) Fotopolimerizado	0.464 (0.069) ^c	0.972 (0.247) ^{b,c,d}	0.004 (0.002)
Enamel plus HRi Function EF3 Fotopolimerizado	0.335 (0.069) ^b	0.529 (0.139) ^{a,b,c}	0.006 (0.001)
Enamel plus HRi UE2 Fotopolimerizado en un horno con calor	0.463 (0.063) ^c	1.016 (0.198) ^{c,d}	0.015 (0.013)
Composite F* (esmalte) Fotopolimerizado en un horno con calor	0.459 (0.068) ^c	1.017 (0.239) ^{c,d}	0.016 (0.017)
Enamel plus HRi Function EF3 Fotopolimerizado en un horno con calor	0.276 (0.058) ^{a,b}	0.464 (0.191) ^{a,b}	0.016 (0.003)
Cerámica prensada	0.303 (0.065) ^{a,b}	0.531 (0.143) ^{a,b,c}	0.002 (0.002)
Oro tipo III	0.219 (0.060) ^a	0.328 (0.140) ^a	0.004 (0.005)
Esmalte natural	0.216 (0.070) ^a	0.404 (0.200) ^a	0.013 (0.004)

(Universidad de Chieti - Prof. Camillo D'Arcangelo)

*Composite de referencia elegido después de haberlo seleccionado como el mejor entre los testados en fase preliminar

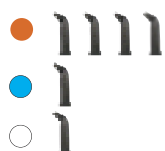

La boca forma parte del Sistema Postural del paciente. El odontólogo debe conocer y respetar este sistema.

ODONTOLOGÍA BIOFUNCIONAL

Código	Descripción	Cdad
CHR6FC	TRIAL KIT ENAMEL PLUS HRi FUNCTION Incluye 6 jeringas de 2,5 g 4 dentinas: UD1 (A1), UD2 (A2), UD3 (A3), UD4 (A4) 1 esmalte universal: UE2 1 esmalte "Function": EF3	6x2,5g
CHREF1	Enamel Plus HRi Function reposición EF1	5g
CHREF2	Enamel Plus HRi Function reposición EF2	5g
CHREF3	Enamel Plus HRi Function reposición EF3	5g

Código	Descripción	Cdad
CHR6FCT	TRIAL KIT ENAMEL PLUS HRi FUNCTION Incluye 36 tips (6 tips x 6 colores) 4 dentinas: UD1 (A1), UD2 (A2), UD3 (A3), UD4 (A4) 1 esmalte universal: UE2 1 esmalte "Function": EF3	6x6uds
CHRTEF1	Enamel Plus HRi Function tips EF1	12x0,3g
CHRTEF2	Enamel Plus HRi Function tips EF2	12x0,3g
CHRTEF3	Enamel Plus HRi Function tips EF3	12x0,3g

ENAMEL PLUS HRi FUNCTION


EL PROBLEMA

LA REFRACCIÓN DE LOS COMPOSITES Y LAS CERÁMICAS



Efecto vidrio en las reconstrucciones en composite con halo gris sobre el margen (línea oscura)

INDICE DE REFRACCIÓN RELATIVO A LA LUZ (n)

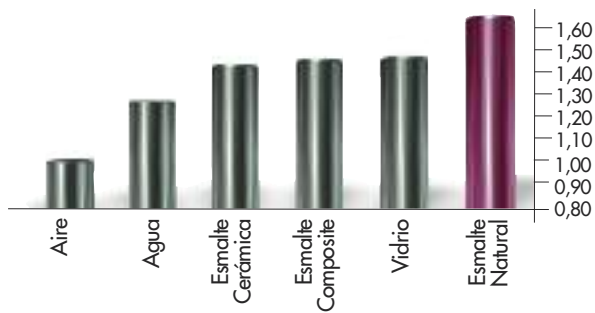

El índice de refracción relativo de algunos elementos, medido a una temperatura de 20°C y con una longitud de onda de la luz de 589 nm indica la desviación de la luz que atraviesa un cuerpo translúcido.

Vanini Mangani Klimovskaia "Il Restauro Conservativo dei denti anteriori" Acme 2005

HRi: EL ESMALTE NATURAL



Efecto natural de el esmalte HRi



Aplicación de dentina y opalescente OBN

Trabajando con espesores semejantes a los del esmalte natural, se obtienen los mismos efectos presentes en el diente natural que varían según el espesor.

El espesor de 0,6 mm proporciona una transparencia ideal.




UE1 valor bajo (ámbar)

UE2 valor medio


UE3 valor alto (para dientes muy blancos o blanqueados)

EL MISMO ÍNDICE DE REFRACCIÓN DEL ESMALTE NATURAL

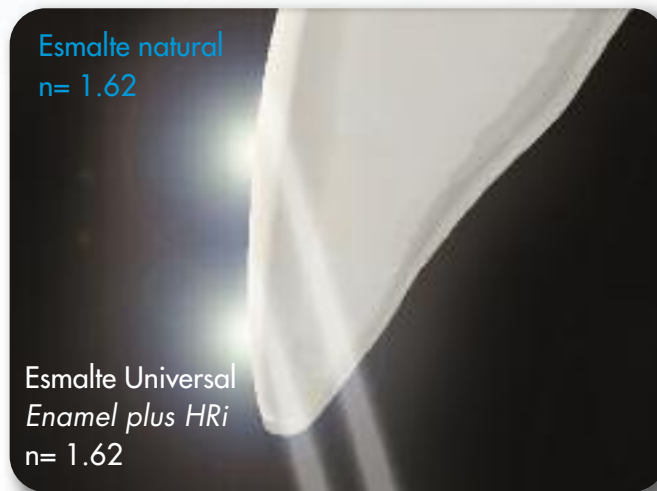


Se obtienen márgenes invisibles reproduciendo con **HRi** el mismo espesor del esmalte natural

ÍNDICE DE REFRACCIÓN

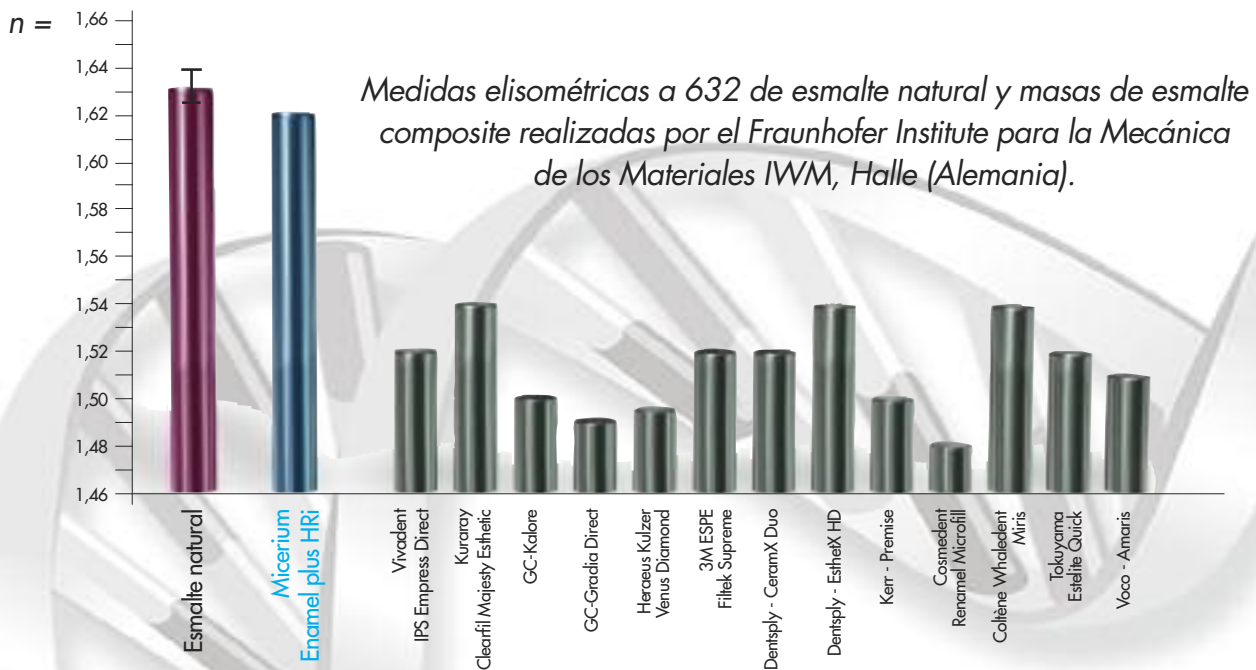

NANOTECNOLOGÍA REM

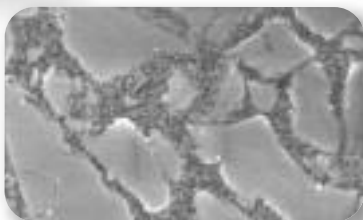

• Composición del relleno (80% PESO - 63% VOLUMEN)

- Nano óxidos de Zirconio tratados en superficie de alto índice de refracción (12% en peso)
- Nuevo tipo de relleno vítreo con alto índice de refracción (68% en peso)

• Datos físicos elevados

Ideales para cualquier tipo de reconstrucción directa o indirecta

- Dureza Vickers 700 MPa
- Módulo de elasticidad 14.500 MPa
- Resistencia a la flexión 170 MPa
- Resistencia a la compresión 450 MPa
- Elevada radio opacidad 600% AI



El proyecto HRi ha sido ideado por el Dr. L. Vanini y desarrollado en colaboración con el Dr. T. Niem (patente pendiente).

El proyecto de investigación que ha llevado a la realización de Enamel Plus HRi, por sus méritos innovativos, ha sido elegido entre los 10 mejores presentados en la región de Hessen (Frankfurt), en el sector médico para ser financiado por la Comunidad Europea (HA-proyecto N° 130-07-01).

ENAMEL PLUS HRi

Características y casos clínicos

VENTAJAS TECNOLÓGICAS

DENTINAS UNIVERSALES



- **Nuevas dentinas** con fluorescencia y elevada translucidez calibrada con la dentina natural.
- **Dentinas Ultra-light:** UD0 y UD 0,5 para dientes blanqueados.

ESMALTES UNIVERSALES




Universales (bajo, medio y alto valor)

- **Margen invisible gracias al alto índice de refracción**, sin "efecto vidrio" que baja el valor de la restauración.
- **Efecto opalescente azul/ámbar** producido por el esmalte HRi (transparencia 30% hasta 0,8mm).


Function (bajo, medio y alto valor)

- **Baja abrasividad** ideal para posteriores

ESMALTES FUNCTION PARA POSTERIORES

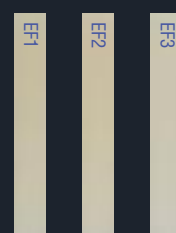

COLORES ADICIONALES PARA LA TÉCNICA MÁSTER

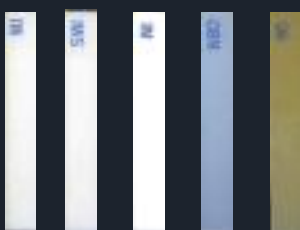

COLORES ADICIONALES

- **Caracterizaciones e intensivos** producidos por los esmaltes intensivos (IM, IWS, IW) y opalescente ámbar (OA).
- **Efecto opalescente azul/ámbar** aumentado con la utilización de la masa opalescente OBN.

VENTAJAS OPERATIVAS: TÉCNICA SIMPLE

TÉCNICA "SÓLO ESMALTE"

con una sola masa de esmalte universal HRi



TÉCNICA "BÁSICA"

con dentinas y esmaltes universales HRi



TÉCNICA "MASTER"

masas adicionales para opalescencias, intensivos y caracterizaciones






CHR15




CHR6B

Código	Descripción	C.dad
CHR15	ENAMEL PLUS HRi Kit Completo incluye 15 jeringas 5 g con soporte 9 dentinas: UD0, UD0,5, UD1 (A1), UD2 (A2), UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4), UD5, UD6 3 esmaltes universales: UE1, UE2, UE3 3 esmaltes intensivos: White (IWV), White Spot (IWVS), Milky (IM)	15x5g
CHR11	ENAMEL PLUS HRi Kit Completo incluye 11 jeringas 5 g con soporte 7 dentinas: UD0, UD1 (A1), UD2 (A2), UD3 (A3), UD4 (A4), UD5, UD6 3 esmaltes universales: UE1, UE2, UE3 1 esmalte intensivo: White Spot (IWVS)	11x5g
CHR6B*	TRIAL KIT ENAMEL PLUS HRi incluye 6 jeringas 2,5 g con soporte 4 dentinas: UD1 (A1), UD2 (A2), UD3 (A3), UD4 (A4) 2 esmaltes universales: UE1, UE2	6x2,5g
CHR5B	"Bleach" KIT ENAMEL PLUS HRi incluye 5 jeringas 2,5 g con soporte 4 dentinas: UD0, UD0,5, UD1 (A1), UD2 (A2) 1 esmalte universal: UE3	5x2,5g

*Es posible sustituir UE1 con UE3 (Código kit CHR6)

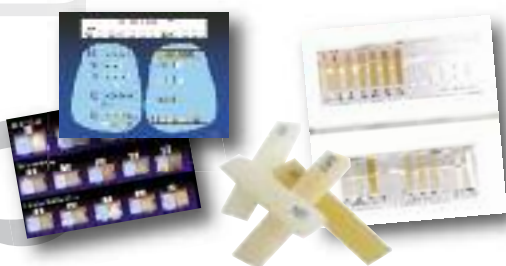

Código	Descripción	C.dad
CSG15	Guía de color Enamel plus HRi	15 tintes
HFOMAP2	Block de mapas cromáticos	50 mapas
PLEXI26D	Soporte PLEXIGLASS 26 orificios	1 Ud
PLEXI9D	Soporte PLEXIGLASS 9 orificios	1 Ud

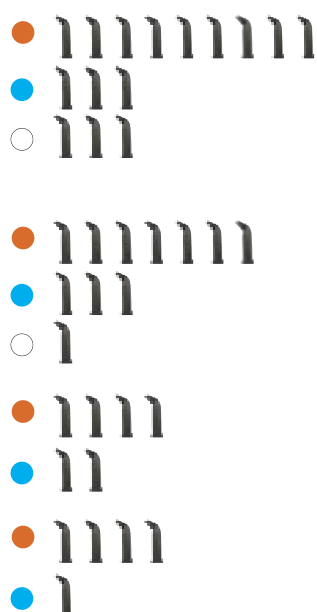

Código	Descripción	C.dad
CHR15T	ENAMEL PLUS HRi Kit Tips Completo incluye 90 tips (6 tips x 15 colores) 9 dentinas: UD0, UD0,5, UD1 (A1), UD2 (A2), UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4), UD5, UD6 3 esmaltes universales: UE1, UE2, UE3 3 esmaltes intensivos: White (IWV), White Spot (IWVS), Milky (IM)	15x6 Uds
CHR11T	ENAMEL PLUS HRi Kit Tips Completo incluye 66 tips (6 tips x 11 colores) 7 dentinas: UD1 (A1), UD2 (A2), UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4), UD5, UD6 3 esmaltes universales: UE1, UE2, UE3 1 esmalte intensivo: White Spot (IWVS)	11x6 Uds
CHR6T*	ENAMEL PLUS HRi TRIAL KIT Tips incluye 36 tips (6 tips x 6 colores) 4 dentinas: UD1(A1), UD2(A2), UD3(A3), UD4(A4) 2 esmaltes universales: UE2, UE3	6x6 Uds
CHR5BT	ENAMEL PLUS HRi "Bleach" KIT Tips incluye 30 tips (6 tips x 5 colores) 4 dentinas: UD0, UD0,5, UD1 (A1), UD2 (A2) 1 esmalte universal: UE3	5x6 Uds

*Es posible sustituir UE3 con UE1 (Código kit CHR6BT)

● Dentinas ● Esmalte Universal ○ Esmalte Intensivo

ENAMEL PLUS HRi REPOSICIONES



Código	Descripción	Jeringas
CHRU1	Enamel plus HRi esmalte universal UE1	5 g
CHRU2	Enamel plus HRi esmalte universal UE2	5 g
CHRU3	Enamel plus HRi esmalte universal UE3	5 g

CHRIW	Enamel plus HRi esmalte intensivo White	5 g
CHRIIM	Enamel plus HRi esmalte intensivo Milky	5 g
CHRIWS	Enamel plus HRi esmalte int. White Spot	5 g

CHRU0	Enamel plus HRi dentina UD0	5 g
CHRU0,5	Enamel plus HRi dentina UD0,5	5 g
CHRU1	Enamel plus HRi dentina UD1 (A1)	5 g
CHRU2	Enamel plus HRi dentina UD2 (A2)	5 g
CHRU3	Enamel plus HRi dentina UD3 (A3)	5 g
CHRU3,5	Enamel plus HRi dentina UD3,5 (A3,5)	5 g
CHRU4	Enamel plus HRi dentina UD4 (A4)	5 g
CHRU5	Enamel plus HRi dentina UD5	5 g
CHRU6	Enamel plus HRi dentina UD6	5 g

CHFOA	Enamel Plus esmalte opalescente Ambar	5 g
CHFOBN	Enamel Plus esmalte opal. Blue Natural	5 g

● Esmalte Universal ○ Intensivo ● Dentina ● Opalescente

Código	Descripción	Tips
CHRTUE1	Enamel plus HRi esmalte universal UE1	12x0,3g
CHRTUE2	Enamel plus HRi esmalte universal UE2	12x0,3g
CHRTUE3	Enamel plus HRi esmalte universal UE3	12x0,3g

CHRTIW	Enamel plus HRi esmalte intensivo White	12x0,3g
CHRTIM	Enamel plus HRi esmalte intensivo Milky	12x0,3g
CHRTIWS	Enamel plus HRi esmalte int. White Spot	12x0,3g

CHRTUD0	Enamel plus HRi dentina UD0	12x0,3g
CHRTUD0,5	Enamel plus HRi dentina UD0,5	12x0,3g
CHRTUD1	Enamel plus HRi dentina UD1 (A1)	12x0,3g
CHRTUD2	Enamel plus HRi dentina UD2 (A2)	12x0,3g
CHRTUD3	Enamel plus HRi dentina UD3 (A3)	12x0,3g
CHRTUD3,5	Enamel plus HRi dentina UD3,5 (A3,5)	12x0,3g
CHRTUD4	Enamel plus HRi dentina UD4 (A4)	12x0,3g
CHRTUD5	Enamel plus HRi dentina UD5	12x0,3g
CHRTUD6	Enamel plus HRi dentina UD6	12x0,3g

CHFTOA	Enamel Plus esmalte opalescente Ambar	12x0,3g
CHFTOBN	Enamel Plus esmalte opal. Blue Natural	12x0,3g



JERINGA PARA TIPS

Acero inoxidable esterizable en autoclave

Facilita una correcta dosificación del composite



Código	Descripción	C.dad
COSSIR	Jeringas de precisión para tips	1 Ud

ENAMEL PLUS HFO

Composite fotopolimerizable, microhíbrido, radio opaco.

El clásico HFO para reconstrucciones estéticas directas e indirectas.

- Dentinas fluorescentes calibradas como el diente natural
- Esmaltes genéricos: tres valores para reproducir el diente anciano (GE1) adulto (GE2) y joven (GE3).
- Esmaltes opalescentes e intensivos para reproducir las opalescencias y caracterizaciones del esmalte natural.

Código	Descripción	Jeringas
CHFGE1	Enamel Plus HFO esmalte genérico GE1	5 g
CHFGE2	Enamel Plus HFO esmalte genérico GE2	5 g
CHFGE3	Enamel Plus HFO esmalte genérico GE3	5 g
CHFOW	Enamel Plus HFO esmalte opalescente White	5 g
CHFOG	Enamel Plus HFO esmalte opalescente Gray	5 g
CHFOA	Enamel Plus HFO esmalte opalescente Ambar	5 g
CHFOBN	Enamel Plus HFO opalescente Blue natural	5 g
CHFIM	Enamel Plus HFO intensivo Milky	5 g
CHFIW	Enamel Plus HFO intensivo White	5 g
CHFUD1	Enamel plus HFO dentina UD1 (A1)	5 g
CHFUD2	Enamel plus HFO dentina UD2 (A2)	5 g
CHFUD3	Enamel plus HFO dentina UD3 (A3)	5 g
CHFUD3,5	Enamel plus HFO dentina UD3,5 (A3,5)	5 g
CHFUD4	Enamel plus HFO dentina UD4 (A4)	5 g
CHFUD5	Enamel plus HFO dentina UD5	5 g
CHFUD6	Enamel plus HFO dentina UD6	5 g
COSHFOB1	Enamel Plus HFO dentina B1	5 g
COSHFOB2	Enamel Plus HFO dentina B2	5 g
COSHFOB3	Enamel Plus HFO dentina B3	5 g
COSHFOB4	Enamel Plus HFO dentina B4	5 g
COSHFOC1	Enamel Plus HFO dentina C1	5 g
COSHFOC2	Enamel Plus HFO dentina C2	5 g
COSHFOC3	Enamel Plus HFO dentina C3	5 g
COSHFOC4	Enamel Plus HFO dentina C4	5 g
COSHFOD3	Enamel Plus HFO dentina D3	5 g



Código	Descripción	C.dad
CHF15	ENAMEL PLUS HFO Kit Completo incluye: 15 jeringas 5 g con soporte 7 dentinas: UD1 (A1), UD2 (A2), UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4), UD5, UD6 3 esmaltes genéricos: GE1, GE2, GE3 3 esmaltes opalescentes: OBN, OA, OW 2 esmaltes intensivos: White (IW), Milky (IM)	15x5g
CHF7	TRIAL KIT ENAMEL PLUS HFO incluye: 7 jeringas 2,5 g con soporte 4 dentinas: UD2 (A2), UD3 (A3), UD4 (A4), UD5 2 esmaltes genéricos: GE2, GE3 1 esmalte opalescente: OBN	7x2,5g

*Disponibles kits (Ref. CHR15T) y reposiciones de tips de 12 unidades (Ref. CHFTGE1, CHFT...)

JERINGAS/TIPS CALENTADOR

ENA HEAT Calentador jeringas

Calienta el composite a una temperatura aproximada de 39°C convirtiéndolo en una masa más fluida y reduciendo el estrés en las fases de extrusión de la jeringa o de los tips, y de estratificación. De este modo se reduce el riesgo de separación entre la matriz y el relleno, se mejoran las características bio-mecánicas del material y se impide la formación de burbujas. Se puede regular la temperatura a 55°C para convertir el material más fluido y apto para la cementación. Dispone de 6 cavidades para las jeringas y 4 para tips. Se puede utilizar para calentar hipoclorito y anestésicos.



Código	Descripción	C.dad
CHC3	CALENTADOR DE JERINGAS ENA HEAT 110-240V, 50-60 Hz, 500mA Permite calentar el material a dos temperaturas: 39°C ideal para modelar y 55°C para cementar	1 Ud

ENAMEL PLUS HFO TINTES E INSTRUMENTOS

Tinte de composite fluorescente

Únicos, para realizar caracterizaciones sea en clínica o en laboratorio. Debido a su alta fluorescencia estos tintes se integran perfectamente al diente natural. Los tintes se pueden utilizar solos o mezclados con composite sin que se alteren las características de fluorescencia.



COSSTAINKIT

PINCELES MICERIUM PARA EL MODELADO DEL COMPOSITE



Código	Descripción	C.dad
COSSTAINKIT	ENAMEL PLUS HFO STAIN KIT Tintes supercolores flow fluorescentes en jeringa: blanco, amarillo, naranja, azul, marrón, marrón oscuro, pinceles (2 tipo C - 2 tipo F - 2 tipo M)	6x2 g 6 Uds
COSSTAIN1N	Stain flow reposición blanco	2 g
COSSTAIN3N	Stain flow reposición azul	2 g
COSSTAIN4N	Stain flow reposición marrón	2 g
COSSTAIN5N	Stain flow reposición marrón oscuro	2 g
COSSTAIN7N	Stain flow reposición amarillo	2 g
COSSTAIN8N	Stain flow reposición naranja	2 g
COSSTAIN T	Stain flow reposición transparente	2 g
COSSTAIN01	Paleta de colores con tapa para una manipulación más cómoda del composite	1 Ud
COSPEN11	Pincel C para supercolores	1 Ud
COSPEN12	Pincel F para fossa	1 Ud
COSPEN13	Pincel M para modelación	1 Ud
TPENS	Pinceles de goma blancos blandos pequeños para modelación del composite	5 Ud
TPENN	Pinceles de goma negros duros pequeños para modelación del composite	5 Uds
TPENMC	Pinceles de goma autoclavables mango de metal 45°/45° para modelación del composite	5 Uds 1 Ud
TPENMS	Pinceles de goma autoclavables mango de metal 180°/90° para modelación del composite	5 Uds 1 Ud
TPENMP	Reposición puntas de goma autocl. pequeñas	5 Uds
TLV1	Instrumento de modelación para composite Para anteriores con espátula fija Espátula extra flexible gris Espátula flexible blanca	1 Ud 1 Ud 1 Ud
TLV2	Instrumento de modelación para composite Para posteriores	1 Ud
TRAW	Espátula blanca	2 Uds
TRAG	Espátula extra flexible gris	2 Uds

Nuevo "Flow HF"

Material para utilizar como base en los dientes posteriores para restauraciones directas e indirectas (antes de la toma de impresión) y en las restauraciones de clase V.

- Altamente relleno
- Altas viscosidad y elasticidad
- Altas radiopacidad y propiedades físicas
- Sin burbujas



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

	RELLENADO %	DUREZA VICKERS MPa	YOUNG MODULOUS MPa	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN MPa	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN MPa	RADIOPACIDAD
Flow HF	77	770	13485	148	394	210% Al
Standard Flow	55	350	6000	120	350	30% Al

Código	Descripción	C.dad
CHR1F	ENAMEL PLUS HRi FLOW INTRO KIT Dentinas en jeringas: UD1 (A1), UD2 (A2), UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4), UD5, UD6. Puntas negras ø 1,2 mm Soporte en Plexiglass	7x2 g 25 Uds 1 Ud
CHRFUD0	HRi Flow UDO reposición + 3 puntas	2 g
CHRFUD0,5	HRi Flow UDO,5 reposición + 3 puntas	2 g
CHRFUD1	HRi Flow UD1 (A1) reposición + 3 puntas	2 g

Código	Descripción	C.dad
CHRFUD2	HRi Flow UD2 (A2) reposición + 3 puntas	2 g
CHRFUD3	HRi Flow UD3 (A3) reposición + 3 puntas	2 g
CHRFUD3,5	HRi Flow UD3,5 (A3,5) reposición + 3 puntas	2 g
CHRFUD4	HRi Flow UD4 (A4) reposición + 3 puntas	2 g
CHRFUD5	HRi Flow UD5 reposición + 3 puntas	2 g
CHRFUD6	HRi Flow UD6 reposición + 3 puntas	2 g
CHRF25	Puntas negras 1,2 mm	25 Uds
PLEX11	Soporte Plexiglass 11 agujeros pequeños	1 Ud

Composite fluido de baja viscosidad



ENAMEL PLUS HFO FLOW

Código	Descripción	C.dad
CHF1F	ENAMEL PLUS HFO FLOW INTRO KIT Dentinas en jeringas: UD1 (A1), UD2 (A2), UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4), UD5, UD6. Puntas negras ø 0,8 mm Soporte en Plexiglass	7x2 g 25 Uds 1 Ud
CHFFUD1	HFO Flow UD1 (A1) reposición + 3 puntas	2 g
CHFFUD2	HFO Flow UD2 (A2) reposición + 3 puntas	2 g
CHFFUD3	HFO Flow UD3 (A3) reposición + 3 puntas	2 g
CHFFUD3,5	HFO Flow UD3,5 (A3,5) reposición + 3 puntas	2 g
CHFFUD4	HFO Flow UD4 (A4) reposición + 3 puntas	2 g
CHFFUD5	HFO Flow UD5 reposición + 3 puntas	2 g
CHFFUD6	HFO Flow UD6 reposición + 3 puntas	2 g
COSHFB3	HFO Flow B3 reposición + 3 puntas	2 g
COSHFB4	HFO Flow B4 reposición + 3 puntas	2 g
CHFF25	Puntas negras ø 0,8 mm	25 Uds

Masa fluida de difusión calibrada que reproduce el estrato proteico del diente natural.

- Aumenta la difusión interna de la luz en las restauraciones directas e indirectas, reduciendo el descenso de valor típico de las masas vitrosas (no es necesaria su utilización con los esmaltes universales HRi).
- Potencia la fluorescencia del cuerpo dentinal devolviendo luminosidad a los dientes no vitales.

GLASS CONNECTOR



Código	Descripción	C.dad
COSHFOFGC	Enamel plus HFO Glass Connector + 3 puntas	1 g

Shiny



Corrección de la geografía de superficie:

Acabado y pulido con las puntas de goma Shiny 14, pasta diamantada Shiny A 3 μ y Shiny B 1 μ con cepillo.

Para el acabado y pulido de reconstrucciones directas e indirectas, carillas, inlays, coronas de laboratorio realizadas en composite. Los discos, fresas, fieltros, cepillos y pequeños accesorios son producidos por Micerium.

EL SISTEMA INCLUYE

- Pastas diamantadas: SHINY A 3 μ m, SHINY B 1 μ m,
- Pasta de óxido de aluminio SHINY C
- Air Block SHINY G
- Cepillos y fieltros SHINY S, SHINY F
- Puntas de goma para pre-pulido Shiny 14 y Shiny 33
- Accesorios para el pulido

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE

	Dureza Vickers	Dev.
Enamel plus HRi Micro híbrido	55	1,2
HRi Micro híbrido (a.b.+p.d.)	+10%	0,8
Micro relleno	18-30	4

Tratamiento de superficie: dureza Vickers y su desviación (AB= Air Block • PD= pastas diamantadas)





Pasta de óxido de aluminio Shiny C con fieltro. Reconstrucción terminada, bajo luz directa (izquierda) y polarizada (derecha).



Código	Descripción	C.dad
COSSHINYKIT	KIT DE ACABADO SHINY	
	Pasta diamantada SHINY A 3 micrón	2 g
	Pasta diamantada SHINY B 1 micrón	2 g
	Pasta abrillantadora SHINY C	35 g
	Glicerina Air Block SHINY G	7 tips
	Fresas SHINY	4 Uds
	Cepillo de pelo de cabra RA Shiny S	3 Uds
	Laca SHINY	3 ml
	Cepillo para posteriores SHINY 4 ...	3 Uds
	Tiras diamantadas SHINY 5 ...	4 Uds
	Bandas de papel SHINY M...	16 Uds
	Discos SHINY D...	12 Uds
	Fielros para discos SHINY FD	5 Uds
	Fielros blancos SHINY F	5 Uds
	Puntas de Gomas SHINY 14	2 Uds
	Mandril RA	2 Uds
	Pinceles monodosis	10 Uds
	Mango para pincel	1 Ud



COSSHINY+G	KIT DE PASTAS DE PULIDO SHINY	
	Pasta diamantada SHINY A 3 micrón	2 g
	Pasta diamantada SHINY B 1 micrón	2 g
	Pasta abrillantadora SHINY C	35 g
	Cepillo de pelo de cabra RA	3 Uds
	Fielros para discos SHINY FD	3 Uds
	Fielros blancos SHINY F	3 Uds
	Mandril RA	1 Ud
	Glicerina Air Block SHINY G	2 tips
	Puntas de Gomas SHINY 14	1 Ud
	Cepillo para posteriores SHINY 4 ...	2 Uds
	Tiras diamantadas SHINY 5 ...	4 Uds
	Bandas de papel SHINY M...	4 Uds



COSSHINY-Y+G	MINI KIT DE PASTAS DE PULIDO	
	Pasta diamantada SHINY A 3 micrón	0,5 g
	Pasta diamantada SHINY B 1 micrón	0,5 g
	Pasta abrillantadora SHINY C	4 g
	Cepillo de pelo de cabra RA	2 Uds
	Mandril RA	1 Ud
	Fielros blancos SHINY F	2 Uds
	Puntas de Gomas SHINY 14	1 Ud
	Glicerina Air Block SHINY G	2 tips
	Cepillo para posteriores SHINY 4 ...	1 Ud
	Tiras diamantadas SHINY 5 ...	2 Uds
	Bandas de papel SHINY M...	2 Uds

TSY	KIT DE ACABADO PARA LABORATORIO	
	Pasta diamantada SHINY A 3 micrón	0,5 g
	Pasta diamantada SHINY B 1 micrón	0,5 g
	Pasta abrillantadora SHINY C	4 g
	Tip de glicerina	1 Ud
	Cono de papel con mandril	1 Ud
	Cepillo de pelo de cabra Shiny S-HP	1 Ud
	Fielros Shiny F-HP	1 Ud
	Fresa de Carbide FG	1 Ud
	Punta verde de carborundum HP	1 Ud
	Fresas diamantadas HP (D717-D725-D727)	3 Uds
	Disco diamantado de dos caras 0,15 mm D751	1 Ud

ENAMEL PLUS SHINY REPOSICIONES


Código	Descripción	Cdad
COSSHINYG7	SHINY G Glicerina Air Block en tips 0,3 g	7 Uds
COSSHINYG	SHINY G Glicerina Air Block en jeringa	2 g
COSSHINYG10	SHINY G Glicerina Air Block en jeringa	10 g
COSSHINYL2	SHINY L Laca Para micro-macro geografía	3 ml
COSSHINYA	SHINY A 3 micrón Pasta diamantada Para pulir utilizando Shiny S	2 g
COSSHINYB	SHINY B 1 micrón Pasta diamantada Para pulir utilizando Shiny S	2 g
COSSHINYC	SHINY C Pasta óxido de aluminio Para utilizar con Shiny F	35 g
COSSHINYS	SHINY S Cepillo de pelo cabra RA	12 Uds
COSSHINYSHP	SHINY S Cepillo de pelo cabra HP	12 Uds
COSSHINYF	SHINY F fieltros blancos 2 mm Para utilizar con COSSHINY 6	30 Uds
COSSHINYFD	SHINY FD fieltros discos interproximales 0,5 mm	100 Uds
COSSHINYFHP	SHINY FHP Disco de fieltro	12 Uds
COSSHINY13	SHINY gomas para pre-pulido	12 Uds
COSSHINY33	SHINY gomas para pre-pulido marrón	12 Uds
CS014	SHINY14 Gomas diamantadas para pre pulir el composite	6 Uds
CS015	SHINY15 Gomas diamantadas para pulir el composite	3 Uds
CS041	SHINY41 Cepillo impregnado para posteriores a punta	6 Uds
CS042	SHINY42 Cepillo impregnado para posteriores en forma de pequeña copa	6 Uds
CS043	SHINY43 Cepillo impregnado para posteriores en forma de media copa	6 Uds



NEW!




Código	Descripción	Cdad
COSSHINYCON	Conos de papel HP	25 Uds
COSSHINYCONM	Mandril para cono de papel Shiny	1 Ud
COSSHINY6	SHINY mandril RA para fieltros	6 Uds
COSSHINYFM	SHINY mandril para discos	1 Ud
COSSHINYDF	SHINY DISCOS finísimos marrón	100 Uds
COSSHINYDX	SHINY DISCOS finos azul	100 Uds
COSSHINYDM	SHINY DISCOS medios verde	100 Uds
COSSHINYDC	SHINY DISCOS gruesos ivory	100 Uds
COSSHINYSF	SHINY TIRAS finos (azul) - finísimos (marrón)	100 Uds
COSSHINYSFS	SHINY TIRAS finos-finísimos sutil	100 Uds
COSSHINYSM	SHINY TIRAS medio (verde) - grueso (ivory)	100 Uds
COSSHINYSMS	SHINY TIRAS medio - grueso sutil	100 Uds
COSSHINY1	Mango para pincel	1 Ud
COSSHINY50	Pinceles de recambio	50 Uds
COSSHINY25	Puntas negras 0,9 mm	25 Uds
CS050-2R	Tiras diamantadas de lija fina roja 12mm x 2mm	5 Uds
CS050-2Y	Tiras diamantadas de lija extra-fina amarilla 12mm x 2mm	5 Uds
CS050-4R	Tiras diamantadas de lija fina roja 12mm x 4mm	5 Uds
CS050-4Y	Tiras diamantadas de lija extra-fina amarilla 12mm x 4mm	5 Uds

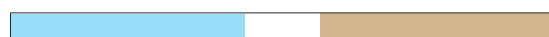

ENA SHINY KIT DE FRESAS DR. LORENZO VANINI

KIT DE FRESAS PARA ANTERIORES DIRECTOS EN COMPOSITE

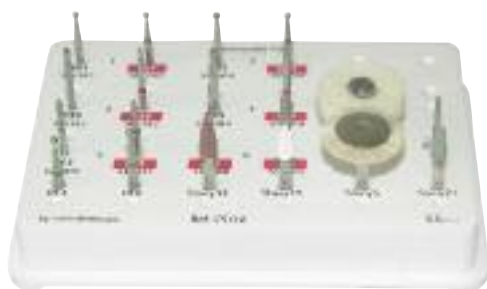

Código	Descripción	C.dad
CS1LV	Kit de preparación, acabado y pulido para anteriores directos en composite	
	Fresas diamantadas Shiny FG	12 Uds
	Fresas de bola en tungsteno Shiny RA	2 Uds
	Fresas en tungsteno 30 lamas FG	1 Ud
	Punta montada de Carborundo RA (CS21)	1 Ud
	Puntas de goma Shiny marrones y diamantadas blancas RA	2 Uds
	Cepillo de pelo de cabra RA	1 Ud
	Disco de fieltro RA	1 Ud
	Pastas para pulido Shiny A, B, C, G	

KIT DE FRESAS PARA POSTERIORES DIRECTOS E INDIRECTOS EN COMPOSITE



Código	Descripción	C.dad
CS2LV	Kit de preparación, acabado y pulido para posteriores directos e indirectos en composite	
	Fresas diamantadas Shiny FG	16 Uds
	Fresas de bola de tungsteno Shiny RA	2 Uds
	Puntas de goma Shiny marrones y diamantadas blancas RA	2 Uds
	Cepillo de pelo de cabra RA	1 Ud
	Disco de fieltro RA	1 Ud
	Pastas para pulido Shiny A, B, C, G	

KIT DE FRESAS PARA COMPOSITE Y CERÁMICA SIN METAL



Código	Descripción	C.dad
CS3LV	Kit de preparación y acabado para carillas y coronas sin metal en composite y cerámica	
	Fresas diamantadas Shiny FG	12 Uds
	Punta de goma Shiny marrón RA	1 Ud

KIT DE FRESAS PARA CORONAS EN METAL 50° 90°



Código	Descripción	C.dad
CS4LV	Kit de preparación y acabado para coronas en metal 50° y 90°	
	Fresas diamantadas Shiny FG	18 Uds
	Punta de goma Shiny marrón RA	1 Ud

estética

KIT DE FRESAS


ENA SHINY

CS1LV	CS2LV	CS3LV	CS4LV

 ShinyF

MICROSCOPIA



Prof. Vassilios Katsas

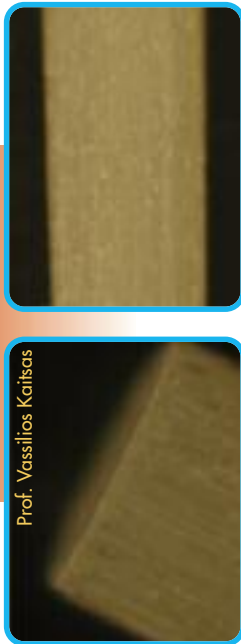

SECTION



UV LIGHT

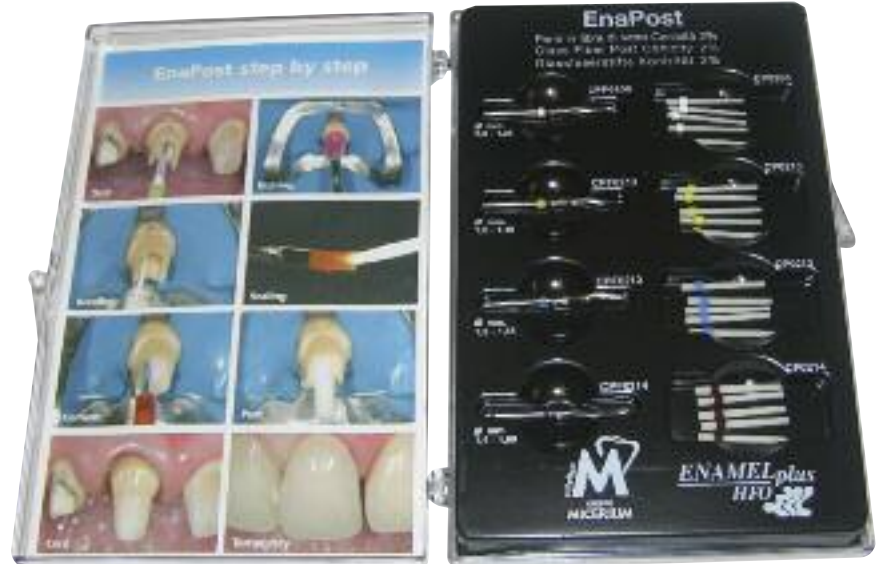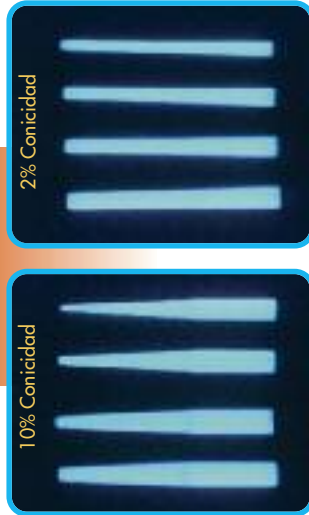

EnaPost



Perfecta integración estética y funcional con postes de fibra de vidrio y composite.

Restauración realizada por el doctor Lorenzo Vanini

VENTAJAS TECNOLÓGICAS Y OPERATIVAS

- Estético: color de la dentina y fluorescente
- Funcional: la misma elasticidad que la dentina
- Perfecta cohesión fibras-composite
- Las fibras han sido introducidas en la misma matriz resinosa del composite microhíbrido para restauraciones (Enamel plus HRi)
- Perfecta silanización
- Radio-opaco: visible con rayos X
- Anillas coloreadas para una fácil identificación



Código	Descripción	C.dad
CP0200	KIT PERNOS ESTÉTICOS ENAPOST 2% CONICIDAD: Ena Post perno en fibra ø 0,8 - 1,25 mm Ena Post perno en fibra ø 1,0 - 1,45 mm Ena Post perno en fibra ø 1,2 - 1,65 mm Ena Post perno en fibra ø 1,4 - 1,88 mm Ena Post fresa 1 cada medida	5 Uds 5 Uds 5 Uds 5 Uds 4 Uds
CP0208	Ena Post Anilla blanca perno en fibra ø 0,8 - 1,25 mm	10 Uds
CP0210	Ena Post Anilla amarilla perno en fibra ø 1,0 - 1,45 mm	10 Uds
CP0212	Ena Post Anilla azul perno en fibra ø 1,2 - 1,65 mm	10 Uds
CP0214	Ena Post Anilla negra perno en fibra ø 1,4 - 1,88 mm	10 Uds
CP0208-30	Ena Post Anilla blanca perno en fibra ø 0,8 - 1,25 mm	30 Uds
CP0210-30	Ena Post Anilla amarilla perno en fibra ø 1,0 - 1,45 mm	30 Uds
CP0212-30	Ena Post Anilla azul perno en fibra ø 1,2 - 1,65 mm	30 Uds
CP0214-30	Ena Post Anilla negra perno en fibra ø 1,4 - 1,88 mm	30 Uds
CPF0208	Ena Post fresa blanca ø 0,8 - 1,25 mm	1 Ud
CPF0210	Ena Post fresa amarilla ø 1,0 - 1,45 mm	1 Ud
CPF0212	Ena Post fresa azul ø 1,2 - 1,65 mm	1 Ud
CPF0214	Ena Post fresa negra ø 1,4 - 1,88 mm	1 Ud

Código	Descripción	C.dad
CP1000	KIT PERNOS ESTÉTICOS ENAPOST 10% CONICIDAD: Ena Post perno en fibra ø 0,5 - 1,6 mm Ena Post perno en fibra ø 0,7 - 1,8 mm Ena Post perno en fibra ø 0,9 - 2,0 mm Ena Post perno en fibra ø 1,1 - 2,2 mm Ena Post fresa 1 cada medida	5 Uds 5 Uds 5 Uds 5 Uds 4 Uds
CP1005	Ena Post Anilla blanca perno en fibra ø 0,5 - 1,6 mm	10 Uds
CP1007	Ena Post Anilla verde perno en fibra ø 0,7 - 1,8 mm	10 Uds
CP1009	Ena Post Anilla roja perno en fibra ø 0,9 - 2,0 mm	10 Uds
CP1011	Ena Post Anilla azul perno en fibra ø 1,1 - 2,2 mm	10 Uds
CP1005-30	Ena Post Anilla blanca perno en fibra ø 0,5 - 1,6 mm	30 Uds
CP1007-30	Ena Post Anilla verde perno en fibra ø 0,7 - 1,8 mm	30 Uds
CP1009-30	Ena Post Anilla roja perno en fibra ø 0,9 - 2,0 mm	30 Uds
CP1011-30	Ena Post Anilla azul perno en fibra ø 1,1 - 2,2 mm	30 Uds
CPF1005	Ena Post fresa (1 muesca) ø 0,5 - 1,6 mm	1 Ud
CPF1007	Ena Post fresa (2 muescas) ø 0,7 - 1,8 mm	1 Ud
CPF1009	Ena Post fresa (3 muescas) ø 0,9 - 2,0 mm	1 Ud
CPF1011	Ena Post fresa (4 muescas) ø 1,1 - 2,2 mm	1 Ud




Ena Cem^{HF}



Perfecta biocompatibilidad ...respecto a la cementación
con Ena Post (2% conicidad) con una técnica tradicional y Ena Cem HF...

ANÁLISIS AL MICROSCOPIO

Las imágenes al microscopio muestran la homogeneidad de Ena Cem^{HF}, a diferencia del cemento fluido dual que presenta burbujas de aire.

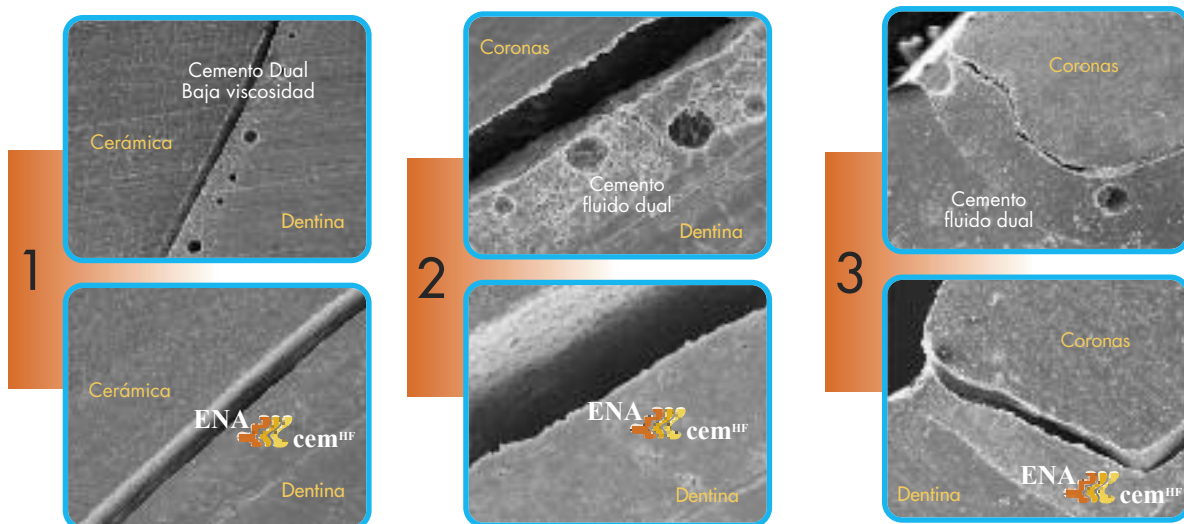

VENTAJAS OPERATIVAS

- Altamente relleno (77% en peso)
- Mismas características físicas que Enamel Plus HRi
- Sin burbujas
- Espesor mínimo < 50µm
- Fluorescente y radio opaco (210% Al)

VENTAJAS TECNOLÓGICAS

- Cementación de puentes y coronas
- Cementación de pernos y reconstrucción de muñones
- Cementación de carillas, incrustaciones en composite y cerámica





Perfecto sellado del canal (Ena Post 10%)
con Ena Cem^{HF}

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS


PRODUCTO	ESPESOR/ m (FUERZA 35N)	DUREZA VICKERS / MPa	YOUNG MODULUS/ MPa	RESISTENCIA A LA CURVATURA/ MPa	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN/ MPa	RADIOPACIDAD
Ena Cem HF	45	670	12850	116	342	210% Al
Cement-Flow dual/fotopol.	28/55	270	5471	88	216	30% Al
Composite alta viscosidad	> 500	600/700	8000/11000	140	400	

Código	Descripción	C.dad
CPCK	ENA CEM HF ALTAMENTE CARGADO Cemento dual Intro Kit: Ena Cem HF color UD1-UD2-UD3-UD4 Ena-bond Bonding Ena-bond Bonding catalizador Ena-Etch Etching Gel 37% Automezclantes Tips + Puntas intraorales Aplicadores naranja	4x3 g 2 ml 2 ml 2 ml
CPCUD1	Ena Cem HF UD1 Jeringa automezclante	8 g
CPCUD2	Ena Cem HF UD2 Jeringa automezclante	8 g
CPCUD3	Ena Cem HF UD3 Jeringa automezclante	8 g
CPCUD4	Ena Cem HF UD4 Jeringa automezclante	8 g
CPCTIPN	Automezclantes tips Ena Cem	50 Uds
CPCTIPL	Puntas blancas intraorales Ena Cem	25 Uds
COSM3A	Aplicadores naranja	50 Uds

Código	Descripción	C.dad
CPCTK	ENA CEM TRY-IN KIT Ena Cem TRY-IN color UD1 Ena Cem TRY-IN color UD2 Ena Cem TRY-IN color UD3 Ena Cem TRY-IN color UD4 Aplicadores tips CHFF25	2 g 2 g 2 g 2 g 25 Uds
CPCTUD1	Ena Cem TRY-IN color UD1	2 g
CPCTUD2	Ena Cem TRY-IN color UD2	2 g
CPCTUD3	Ena Cem TRY-IN color UD3	2 g
CPCTUD4	Ena Cem TRY-IN color UD4	2 g
CPCTUD5	Ena Cem TRY-IN color UD5	2 g
CPCTUD6	Ena Cem TRY-IN color UD6	2 g
Código	Descripción	C.dad
CPC	ENA CEM BAJA VISCOSIDAD cemento dual baja viscosidad	8 g

Cemento para zirconia

Cemento autopolimerizable con primer especial para cementar elementos protésicos en zirconia sobre muñones en zirconia y titanio.

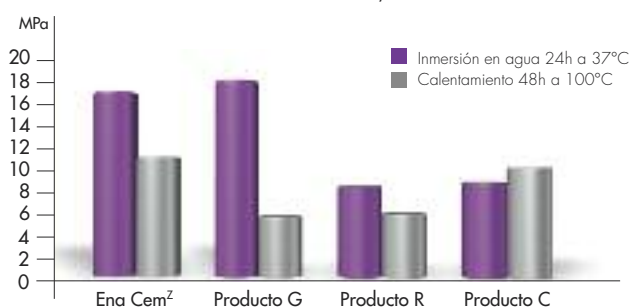


ENA CEM^Z

Código	Descripción	C.dad
CPCZK	ENA CEM Z para ZIRCONIO Intro kit Cemento autopolimerizable Primer	8 g 5 ml
CPCZ	Ena Cem Z cemento autopolimerizable	8 g
CPCZP	Ena Cem Z Primer	5 ml

ENA BOND ADHESIVO ETCH & RINSE

EnaBond

one-bottle

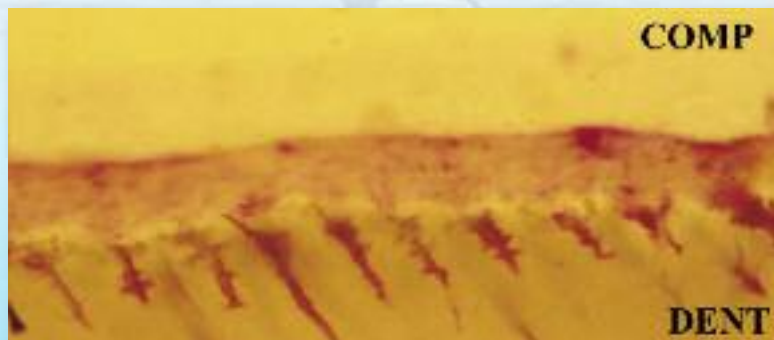

Restauración HFO/dentina utilizando Ena Bond con LaserScan microscopio Zeiss 500x.

La coloración histológica evidencia la capa híbrida y los "Tags de resina" que garantizan un perfecto sellado y una perfecta adhesión (Dr. Francesco Mangani)

Adhesivo de V generación

One-Bottle

Ena Bond es utilizado con la técnica Etch & Rinse y aplicado por lo menos en dos capas después del grabado con Ena Etch.



CARACTERÍSTICAS

- Estética y retención
- Fluorescente como el diente natural
- Valores de adhesión superiores a 30 MPa
- Composición especial a base de etanol
- Catalizador dual usado con el composite dual



CATALIZADOR

Código	Descripción	C.dad
COSM300	ENA BOND ADHESIVO ONE-BOTTLE: Bonding Ena Bond fotopolimerizable Ácido ortofosfórico 37% Accesorios	5 ml 2 ml
COSM300A	Bonding Ena Bond fotopolimerizable	5 ml
COSM300D	Ena Bond Catalizador hace el bonding dual	5 ml
COSM3B	Mini cubeta mezcladora	20 Uds

Código	Descripción	C.dad
COSM101B	ENA ETCH Ácido ortofosfórico 37% Jeringa bulk utilizar con jeringas recargables	1x25ml 2x2 ml
COSM101	Ácido ortofosfórico 37%	2x2ml
COSM3S	Ena Bond aplicador pequeño naranja	50 Uds
COSM3M	Ena Bond aplicador medium azul	50 Uds



COSM101B

ENA BOND ADHESIVO ETCH & RINSE

Adhesivo de IV generación

Two-Bottle

Utilizando Ena Bond como Primer (después del grabado con Ena Etch) y Ena Seal como segunda capa de resina adhesiva no cargada, se pueden conseguir muy buenos resultados de adhesión y un sellado perfecto, convirtiendo Ena Bond en un sistema adhesivo Two-Bottle.

CARACTERÍSTICAS

- Muy buenos valores de adhesión*
 - 24 Mpa sobre dentina

* Estudio realizado por la Universidad de Chieti (Italia) – Prof. Camillo D'Arcangelo, en comparación con dos otros sistemas adhesivos self-etching con Primer.



EnaBond

two-bottle

Código	Descripción	C.dad
COSM300K	ENA BOND ADHESIVO TWO-BOTTLE	
	Ena Bond Bonding "Primer" fotopolimerizable	5 ml
	Ena Seal resina fluida fotopolimerizable	5 ml
	Ácido ortofosfórico 37%	2 ml
	Accesorios	

Sellante fotopolimerizable de baja viscosidad

- Resina adhesiva en combinación con Ena Bond
- Acondicionador de superficie del composite y de los pinceles para el modelado de composites (no utilizar con HRi esmalte universal)
- Sellado de superficies en composite
- Sellado de márgenes de restauraciones en composite
- Sellador para provisionales en acrílico



ENA SEAL

Código	Descripción	C.dad
COSZ100	ENA SEAL SELLADOR	
	Ena Seal sellador fotopolimerizable	5 ml
	Ácido ortofosfórico gel 37%	2 ml
	Accesorios	
COSZ10	Ena Seal sellador fotopolimerizable	5 ml



Pit & Fissure Sealant

Sellante fotopolimerizable fluido

- Sellado de superficies de dientes naturales
- Sellado de márgenes de restauraciones en composite



ENA SEALANT

Código	Descripción	C.dad
EHFS	ENA FLOW SEALANT SELLADOR	
	Pit & Fissure sellador	2 ml
	Carpules/Tips desechables 0,8 mm	3 Uds

Rock Bond





Rock Bond Adhesivo de IV generación con Primer bicomponente y Resina adhesiva

Es un sistema adhesivo esmalte dentinal, extremadamente eficaz. Se compone de grabador, Primer y Resina Adhesiva. El Primer dental tiene dos componentes que se tienen que mezclar y se aplica para un pretratamiento que garantiza una buena adhesión del bonding esmalte dentinal, incluso en un ambiente no perfectamente seco; esta característica diferencia el Primer ROCK BOND de los demás primer monocomponentes que se comercializan en la actualidad.

Código	Descripción	C.dad
COSM100	MICERIUM ROCK BOND SISTEMA ADHESIVO	
	Primer A	10 ml
	Primer B	10 ml
	Resina Adhesiva	10 ml
	Ácido Ortofosfórico en gel al 37%	2 ml
COSM102	Rock Bond resina Adhesiva	10 ml
COSM103	Rock Bond primer A	10 ml
COSM104	Rock Bond primer B	10 ml

ENA BOND SE ADHESIVO SELF-ETCHING

estética

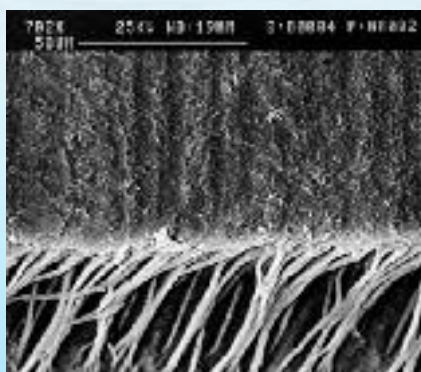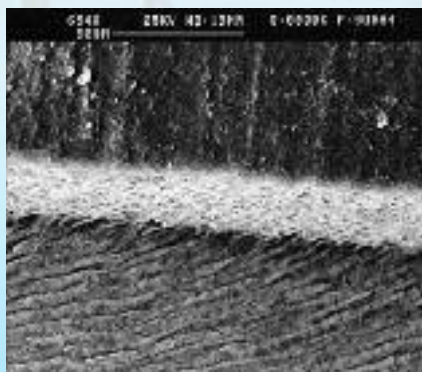

Esmalte grabado y dentina tratados con Ena Bond SE al microscopio de barrido (SEM)

La microscopía enseña la superficie del esmalte y los "resin-tags" que resaltan la penetración de Ena Bond SE en los túbulos dentinarios.

Universidad de Tor Vergata de Roma (Prof. Francesco Mangani).


Ena Bond SE

CARACTERÍSTICAS

- Valores de adhesión* superiores a la media del mercado:
 - 24 Mpa sobre dentina
 - 17 Mpa sobre esmalte no grabado
 - 20 Mpa sobre esmalte grabado
- Composición especial en solución acuosa



MICRO TENSILE BOND STRENGTH (MPA)*

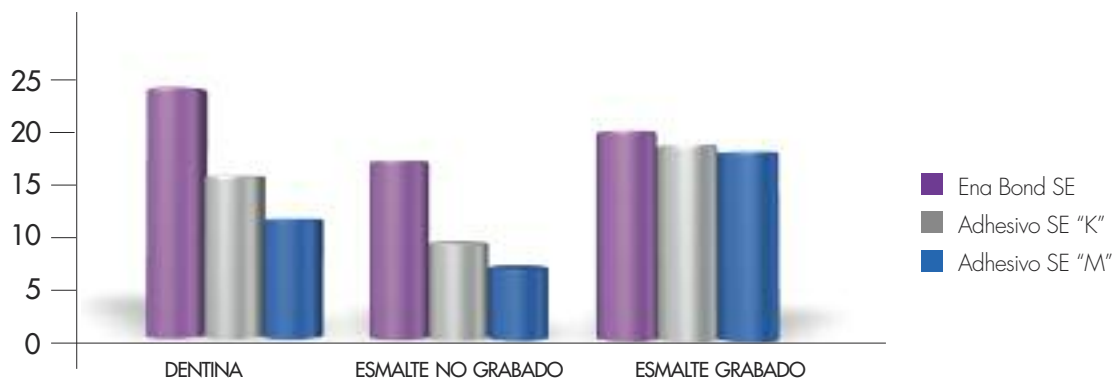

*Estudio realizado por la Universidad de Chieti (Italia) – Prof. Camillo D'Arcangelo, en comparación con dos otros sistemas adhesivos self-etching con Primer (ver gráfico)



Código	Descripción	C.dad
CFOTK	ENA BOND SE ADHESIVO SELF-ETCHING	
	Primer	5 ml
	Bonding fotopolimerizable	5 ml
	Ácido ortofosfórico 37%	2 ml
	Accesorios	

Código	Descripción	C.dad
CFOT	ENA BOND SE ADHESIVO SELF-ETCHING	
	Primer	5 ml
	Bonding fotopolimerizable	5 ml
CFOTP	Ena Bond SE Primer	5ml
CFOTS	Ena Bond SE Bonding fotopolimerizable	5ml

ENA BOND SE SISTEMA ADHESIVO


TENDER REPAIR

Sistema de reparación metal-cerámica sin ácido

- Mayor biocompatibilidad
- Sin riesgos para los tejidos
- Mayor adhesión



Código	Descripción	C.dad
COSRIP1	KIT para reparación de metal-cerámica	
	Tender Bond primer metal-cerámica	2,5 ml
	Tender pasta opake para metal	3 g
	Tender pasta opake clear para cerámica	3 g
	Enamel Plus M pincel	1 Ud
COSRIP2	KIT para reparación de cerámica	
	Tender Bond primer metal-cerámica	2,5 ml
	Tender paste opake clear para cerámica	3 g
	Enamel Plus M pincel	1 Ud
ETBOND	Tender primer metal-cerámica	5 ml
ETOL	Tender paste opake para metal	3 g
ETOCLEAR	Tender paste opake clear para cerámica	3 g

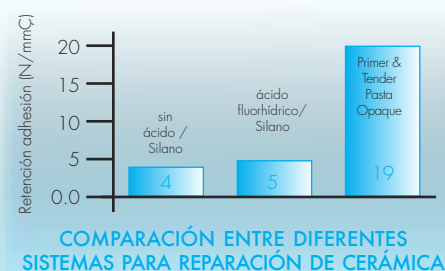

ENA ETCH REPAIR

Reparaciones de cerámicas

Con ácido fluorhídrico y silano



Código	Descripción	C.dad
COSM661	KIT DE REPARACIÓN CERÁMICA MICERIUM	
	Laca protectora	3 ml
	Ácido fluorhídrico al 9,6% para cerámica	3 ml
	Silano	3 ml
COSZ15	Ácido fluorhídrico al 9,6% para cerámica	3 ml
COSZ25	Primer silano porcelana	3 ml
COSSHINYL2	Laca protectora	3 ml
COSM3T	Punta para jeringa (ácido)	25 Uds

V4-Ring & Clear Metal Matrix

V4 es un sistema de matrices seccionales

para restauraciones de Clase II, que crea puntos de contacto predecibles y precisos y perfiles naturales con el beneficio adicional de la transparencia para permitir una mejor fotopolimerización, especialmente en cavidades profundas.

ANILLOS V4 Nuevos anillos con muelle de níquel titanio que ofrece una óptima separación de los dientes para contactos estrechos. Las alas transparentes más finas y resistentes ofrecen una mayor estabilidad también en el caso de una mínima estructura dentaria residual. La luz pasa a través de las alas permitiendo una mejor polimerización. Más lisos para una limpieza más fácil.

MATRICES V4 CLEAR METAL ultra flexibles.

Las únicas pre curvadas para abrazar al diente anatómicamente y permitir el posicionamiento del anillo sin interferencias. Forma anatómica vertical con crestas marginales pronunciadas para reducir los tiempos de acabado. Micro-ventanas en resina transparente anti-adherente para facilitar la polimerización, y evitar que el composite se adhiera a la matriz facilitando su remoción.

CUÑAS "W" se adaptan anatómicamente a la zona interproximal y permiten sellar completamente sea vestibular que lingualmente; la forma en "W" no estresa la papila y evita que la cuña se desplace. 2 muescas dividen la cuña en tres secciones que se adaptan mejor a las variaciones anatómicas interproximales. Transparentes para permitir una mejor fotopolimerización.



Código	Descripción	C.dad
EMKV4C	KIT V4-RING & MATRIX:	
	Matrices seccionales V4 Clear Metal 4,5mm	25 Uds
	Matrices seccionales V4 Clear Metal 5,5mm	50 Uds
	Matrices seccionales V4 Clear Metal 6,5mm	25 Uds
	Cuñas en "W" surtidas V4 Clear (4 medidas)	100 Uds
	Anillo de bloqueo en NiTi V4 Ring para molares	1 Ud
	Anillo de bloqueo en NiTi V4 Ring para premolares	1 Ud
	Pinza Perno para matrices y cuñas	2 Uds
	Pinza para aplicación anillos	1 Ud
EMP1	Pinza con perno para matrices y cuñas	1 Ud
EMP2	Pinza para aplicación anillos	1 Ud
EMAV4M	Anillos de bloqueo en NiTi V4 Ring para molares	1 Ud
EMAV4P	Anillos de bloqueo en NiTi V4 Ring para premolares	1 Ud
EM35C*	Matrices seccionales V4 Clear Metal 3,5mm	50 Uds
EM45C	Matrices seccionales V4 Clear Metal 4,5mm	50 Uds
EM55C	Matrices seccionales V4 Clear Metal 5,5mm	50 Uds
EM65C	Matrices seccionales V4 Clear Metal 6,5mm	50 Uds
EM75C*	Matrices seccionales V4 Clear Metal 7,5mm	50 Uds
EMW4S	Cuñas en "W" V4 Clear Small (white)	100 Uds
EMW4M	Cuñas en "W" V4 Clear Medium (pink)	100 Uds
EMW4L	Cuñas en "W" V4 Clear Large (violet)	100 Uds
EMW4XL	Cuñas en "W" V4 Clear Extra Large (black)	100 Uds

* Disponibles de 2014

WEDGE GUARD

Cuña de protección

- Previene posibles daños causados por la fresa al diente adyacente, durante la preparación
- Área de trabajo más limpia y segura
- Protege la papila gingival reduciendo el sangrado
- Se ahorra el coste de una segunda cuña: una vez terminada la preparación se puede remover la lámina de protección, dejando in situ la cuña en W para proceder al posicionamiento de la matriz y del anillo del sistema V3-Ring



Código	Descripción	C.dad
EMWGK	Kit Wedge Guard cuñas surtidas	75 Uds
EMWGS	Wedge Guard Blanco pequeño	50 Uds
EMWGM	Wedge Guard Rojo mediano	50 Uds
EMWGL	Wedge Guard Púrpura grande	50 Uds

V3-Ring Matrix

ANILLO V3 íntegramente en níquel titanio para una resistencia excepcional y memoria elástica que garantiza una larga duración y contactos siempre precisos. Alas en plástico autoclavables reforzadas con fibra de vidrio para una retención excepcional y una mejor adaptabilidad a la superficie del diente, para crear una cavidad con forma ideal que permite ahorrar tiempo en el acabado. Disponible en las medidas "standard" y "narrow" para asegurar una fuerza de separación óptima incluso para dientes más pequeños.

CUÑAS "W" se adaptan anatómicamente a la zona interproximal y permiten sellar completamente sea vestibular que lingualmente; la forma en "W" no estresa la papila y evita que la cuña se desplace.

MATRICES V3

Forma anatómica vertical con crestas marginales pronunciadas para reducir los tiempos de acabado. Aletas con agujero que permiten, con la pinza indicada, posicionar y remover sin problemas.

MATRICES SÚPER CURVAS ultra flexibles

Las únicas pre curvadas para abrazar al diente anatómicamente y permitir el posicionamiento del anillo sin interferencias. Anti adherentes evitan que el composite se adhiera a la matriz facilitando su remoción. Medidas codificadas por color.



Código	Descripción	C.dad
EMKV3	KIT V3-RING & MATRIX: Matrices seccionales V3-Matrix surtidas (3 medidas) Cuñas en "W" surtidas (3 medidas) Cuñas de protección "Wedge Guard" Anillos de bloqueo en NiTi (Standard) verdes Anillos de bloqueo en NiTi (Narrow) amarillos Pinza Perno para matrices y cuñas Pinza para aplicación anillos	30 Uds 75 Uds 10 Uds 1 Ud 1 Ud 1 Ud 1 Ud
EMAV3G	Anillo en NiTi standard verde para molares	1 Ud
EMAV3Y	Anillo en NiTi narrow amarillo para premolares	1 Ud
EMWS	Cuñas W Small (blancas)	100 Uds
EMWM	Cuñas W Medium (rosas)	100 Uds
EMWL	Cuñas W Large (púrpura)	100 Uds
EM35V3	V3 Matrix Matrices con crestas marginales 3,5mm	50 Uds
EM45V3	V3 Matrix Matrices con crestas marginales 4,5mm	50 Uds
EM55V3	V3 Matrix Matrices con crestas marginales 5,5mm	50 Uds
EM65V3	V3 Matrix Matrices con crestas marginales 6,5mm	50 Uds
EM75V3	V3 Matrix Matrices con crestas marginales 7,5mm	50 Uds
EM35S	Matrices seccionales súper curvas ultra flexibles 3,5mm	90 Uds
EM45S	Matrices seccionales súper curvas ultra flexibles 4,5mm	90 Uds
EM55S	Matrices seccionales súper curvas ultra flexibles 5,5mm	90 Uds
EM65S	Matrices seccionales súper curvas ultra flexibles 6,5mm	90 Uds
EM75S	Matrices seccionales súper curvas ultra flexibles 7,5mm	50 Uds

V-Ring Matrix

Código	Descripción	C.dad
EMM45	V Matrix Matrices 4,5mm	100 Uds
EMM55	V Matrix Matrices 5,5mm	100 Uds
EMM65	V Matrix Matrices 6,5mm	100 Uds
EMA	V-Ring Anillo en acero y NiTi	1 Ud

Código	Descripción	C.dad
EMVSH	Cuñas V pequeño duro (amarillo pálido)	100 Uds
EMVSS	Cuñas V pequeño suave (amarillo oscuro)	100 Uds
EMVMH	Cuñas V medio duro (verde pálido)	100 Uds
EMVMS	Cuñas V medio suave (verde oscuro)	100 Uds
EMVLH	Cuñas V grande duro (azul claro)	100 Uds
EMVLS	Cuñas V grande suave (azul oscuro)	100 Uds

MATRICES CERVICALES V360°

Mejores y más veloces restauraciones de clase V

- Las matrices giran sobre dos ejes haciéndolas manejables a 360°
- Alcanzar todos los dientes con facilidad
- Alta calidad estética y acabado
- Matrices transparentes para una fácil polimerización y posicionamiento preciso
- Matrices flexibles conformes al contorno del diente
- Excelente sellado sobre el margen gingival
- Evita burbujas de aire y el estrato de inhibición
- Disponibles en 3 medidas



Código	Descripción	C.dad
E360	Kit V360 matrices cervicales surtidas Pinza con perno en plástico	90 Uds 1 Ud
E360L	Matrices cervicales V360 grandes	100 Uds
E360M	Matrices cervicales V360 medianas	100 Uds
E360S	Matrices cervicales V360 pequeñas	100 Uds



Large
para coronas

Medium
para inlay, onlay,
carillas y coronas

Small
para inlay
y carillas

¡Como el mango de una taza!

Griptab se adhiere a la restauración con un adhesivo fotopolimerizable, flexible, a prueba de humedad, que:

- No se despegar durante su manipulación
 - Se elimina fácilmente y sin residuos al finalizar el procedimiento.
 - Griptab es disponible en tres medidas para manipular cualquier tipo de restauración
- La pinza, que lleva un perno, permite una fácil manipulación y una fácil colocación.

GRITAB

Una manera eficaz para "manipular" las restauraciones indirectas



Código	Descripción	C.dad
EMZ7001	KIT GRITAB 24 large, 24 medium & 12 small Griptabs 1 cola fotopolimerizable	60 Uds 1 Ud
EMP1P	Pinza en plástico	1 Ud

CUBETA PARA TOMA DE IMPRESIÓN



Ref	Descrizione	Q.tà
EMZ5052	Kit Triotray Pro Starter Pack Cubetas para toma de impresión en acero inoxidable (1 large, 1 small) Piezas mono uso (5 large verdes, 5 small azules)	2 Uds 10 Uds
EMZ5053	Cubeta en acero inoxidable large verdes Piezas mono uso Large verdes	5 Uds 20 Uds
EMZ5054	Cubetas en acero inoxidable small azules Piezas mono uso Small azules	5 Uds 20 Uds
EMZ5025	Piezas mono uso Triotray Pro large verdes	100 Uds
EMZ5026	Piezas mono uso Triotray Pro small azules	100 Uds

Ena White



Ena White

Sistema de tratamiento de las discromías patógenas e iatrogénicas

Diente vital tratado con peróxido de Hidrógeno al 35%

ENA WHITE POWER

- Peróxido de hidrógeno al 35%, resultados rápidos y seguros
- Consistencia ideal, de fácil mezcla y aplicación
- Jeringa bicomponente automezclante para una fácil aplicación
- PH neutro (7,3) menos agresión al esmalte
- Utilizable con dique de goma o con un dique en pasta fotopolimerizable Ena Dam.



ENA WHITE REGULAR

- Peróxido de hidrógeno al 12% para uso profesional
- Tratamiento de dientes desvitalizados con técnica de "walking bleaching"
- Tratamiento seguro y efectivo para dientes vitales sensibles



ENA WHITE LIGHT

- Peróxido de hidrógeno al 6%
- Tratamiento domiciliario y mantenimiento simple y seguro
- Confección con etiqueta personalizada
- Sabor fresco a menta





Código	Descripción	Cdad
COSM035K	ENAWHITE COMPLETE KIT Ena White Power 35% Ena White Regular 12% Ena White Home Light 6% Ena Dam gingival protección gingival Ena White BLOCK-OUT Ena White desensibilizante Hojas termoplásticas para férulas Cajita porta férulas Abreboca con sujetador de lengua	5 g 2ml 3ml 1,5 g 3 ml 1,2 ml 2 Uds 2 Uds 1 Ud
COSM035E	ENA WHITE POWER KIT Gel peróxido hidrógeno 35% Ena Dam paste	5g 1,5g
COSM035	ENA WHITE POWER REPOSICIÓN Gel peróxido hidrógeno 35%	2 x 5 g
COSM035T	Puntas automezclantes Ena White	50 Uds
COSM012	ENA WHITE REGULAR ENDO REPOSICIÓN Gel peróxido hidrógeno 12%	2 x 2 ml
COSM015	ENA WHITE LIGHT HOME Gel peróxido hidrógeno 6%	4 x 3 ml
COSM015B	ENA WHITE LIGHT HOME Gel peróxido hidrógeno 6% Cajita porta férulas	2 x 3 ml 1 Ud
COSM03B	ENA DAM protección gingival	4 g
COSM05S	ENA WHITE desensibilizante	2x1,2 ml
COSM05B	ENA WHITE block-out	3 ml
COSMT10	Hojas termoplásticas para férula	10 Uds



ENAMEL PLUS TEMP

Temp

Para
confecciones
Consultar
Sección
Laboratorio
pág. 48-49



Colores fluorescentes

TÉCNICA
DIRECTA
TÉCNICA DE
LABORATORIO




Toma de impresión antes de la preparación



Colado de las dentinas en la toma de impresión



Provisional cementado y pulido

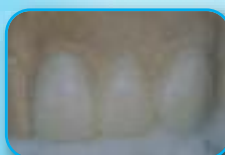

Matriz y colado de las dentinas



Aplicación de las caracterizaciones y masa transparente



Colado de esmalte y pulido final.

Resina para puentes, coronas y provisionales estéticos

La opacidad y la fluorescencia del cuerpo dentinario y la translucidez de las masas de los esmaltes permiten evidenciar el típico contraste en el diente entre estos dos elementos y alcanzar un pulido natural en las coronas provisionales, muy semejante a los elementos definitivos en cerámica. Se puede utilizar en laboratorio con la ayuda de matrices en silicona o termoplásticas o en clínica utilizando una toma de impresión en silicona o una corona preformada.

TEMP COLOUR SYSTEM

Tintes en polvo y líquido fotopolimerizable para caracterizaciones rápidas de provisionales en clínica y laboratorio.

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dentinas de colores intensivos A Light (UD2-UD3) - AS Dark (UD3,5-UD4)-B (UD5) para caracterizaciones cervicales en la dentina de los provisionales
- Colores intensivos "alba" y "ocaso" para las caracterizaciones de los provisionales, "cielo" para el esmalte, "nube" para los mamelones
- Líquido fotopolimerizable para la mezcla de los colores
- Barniz fotopolimerizable para pulido y sellado, con primer y líquidos para limpieza



Ideal for characterization of temporary made with CAD/CAM



Código	Descripción	C.dad
TEMPS1N	KIT ENAMEL PLUS HFO SUPERCOLORS Colores A Light (UD2-UD3), AS Dark (UD3,5-UD4), B (UD5), alba, cielo, nube, ocaso líquido fotopolimerizable, Laca, Primer	3g cad 10mlcad
TEMPS21	Laca para brillo UVA	10 ml
TEMPS22	Primer laca	10 ml
TEMPS11	Color intensivo A Light (UD2-UD3)	3 g
TEMPS12	Color intensivo AS Dark (UD3,5-UD4)	3 g
TEMPS13	Color intensivo B (UD5)	3 g
TEMPS15	Color intensivo cielo	3 g
TEMPS16	Color intensivo alba	3 g
TEMPS17	Color intensivo nube	3 g
TEMPS18	Color intensivo ocaso	3 g
TEMPLC	Enamel Plus Temp líquido fotopolimerizable	10 ml

Temp Colour System Sistema de caracterizaciones desarrollado por el Sr. Olivero Turillazzi



ENA SOFT es un material elástico para restauraciones provisionales. Tiene la ventaja de poder retirarse fácilmente en una pieza, sin romperse y sin dañar la preparación.

ENA SOFT está indicado también para provisionales de largo plazo porque mantiene perfectamente la forma del diente.

VENTAJAS TECNOLÓGICAS Y OPERATIVAS


- De simple aplicación: no es pegajoso
- De simple remoción, de una sola pieza
- Perfecto para inlays y onlays
- Obturaciones fuertes y resistentes a lo largo del tiempo
- Se puede eliminar fácilmente de los tornillos de cierre de los implantes

Código	Descripción	C.dad
EHTS2	Ena Soft Color dentina	5 g

ENA SOFT



Aplicación

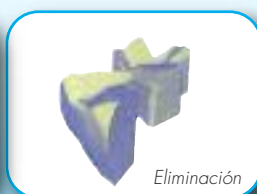

Eliminación



Cierre de tornillos de implantes



Obturaciones provisionales de inlays y onlays

KIT MOCK UP

Para carillas provisionales



PROVISIONALES EN 5 MINUTOS:

- Toma de impresión con silicona y cubetas transparentes 45 s.
- Endurecimiento de la toma de impresión 1 min. y 30 s.
- Preparación de las carillas
- Aplicación del Flow HRi en la cubeta 30 s.
- Fotopolimerización 60 s.
- Fotopolimerización final con Ena Seal 60 s.

Código	Descripción	C.dad
TEMPSMU	KIT MOCK UP PARA CARILLAS PROVISIONALES	
	Temp Silic -Silicona Transparente para el dentista	2x50 ml
	Puntas automezclantes	8 Uds
	Cubetas transparentes para anteriores	2 Uds
	Cubetas transparentes para inferiores	2 Uds
	Cubetas transparentes para superiores	2 Uds
	Flow HRi	3x2 g
	Ena Seal	2 ml

Código	Descripción	C.dad
TS1	Silicona transparente para el dentista	50 ml
TS1-5	Silicona transparente para el dentista	5x50 ml
TSPA	Cubetas transparentes para anteriores	25 Uds
TSPL	Cubetas transparentes para inferiores	25 Uds
TSPS	Cubetas transparentes para superiores	25 Uds

TENDER FIBER

Fibra de vidrio silanizada e impregnada de resina fotopolimerizable

impregnada en resina fotopolimerizable, la misma utilizada para Enamel Plus HRi y EnaPost.

VENTAJAS TECNOLÓGICAS

Fibras silanizadas e impregnadas relleno 0.0012 µm:


- Fibras de vidrio unitarias unidireccionales de 14 µm
- Alta resistencia a los ácidos y a las sustancias alcalinas
- Mayor resistencia del producto acabado
- Mayor conexión química entre las fibras
- Aumento de las características físicas

VENTAJAS FUNCIONALES

- Aplicaciones orales sin metal
- Estructura ultra conservativa de fácil reparación
- Utilizable con todos los materiales de composites y acrílicos
- No se requiere ninguna inversión adicional
- Listas para su utilización. De rápida aplicación, reduce los costes de tratamiento sin riesgos de deshilachado ni durante su manipulación ni una vez aplicada
- Mejor reacción química con los materiales adhesivos y de reconstrucción y mayor estética.

Confección especial:

- Porta fibra de silicona transparente que facilita su utilización: medir, cortar, aplicar, polimerizar y controlar.

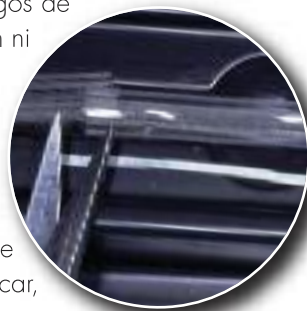

QUATTRO



Tender Fiber QUATTRO Fibras de refuerzo para puentes en composite tipo Maryland o sobre incrustaciones. (Documentación iconográfica del Sr. Daniele Rondoni)



Tender Fiber QUATTRO Fibras de refuerzo para composites y resinas sobre implantes. (Documentación iconográfica del Dr. Tiziano Testori)

DUE



Retención de dientes paradontósicos Tender Fiber DUE (Documentación iconográfica del Dr. Luca Pinoli)



ZERO



Fibra en polietileno Tender Fiber ZERO para aparatos ortodónticos y prótesis removibles (Documentación iconográfica del Sr. Daniele Rondoni).



Código	Descripción	C.dad
TF21	TENDER FIBER DUE Fibra de vidrio para felurizaciones Largo 12 cm - ø 1,3 mm (3.200 fibras)	1 Ud
TF41	TENDER FIBER QUATTRO Fibra de vidrio para reforzar prótesis en resina y composite Largo 12 cm - ø 1,7 mm (6.400 fibras)	1 Ud
TFZ	Tijeras especiales para fibras Tender Fiber	1 Ud

Código	Descripción	C.dad
TF01	TENDER FIBER ZERO Fibras económicas en polietileno no impregnadas: refuerzo de aparatos ortodónticos y prótesis totales y parciales o provisionales en resina	17 mt

ORTHO

TENDER FIBER

Estable, duradera y confortable para aplicaciones ortodónticas

Indicado para retenciones que duran a lo largo del tiempo y para pacientes con problemas de alergia al metal.



Código	Descripción	C.dad
ATF11	TENDER FIBER ORTHO Fibra de vidrio para aplicaciones ortodónticas Largo 12 cm - ø 0,8 mm (1.600 fibras)	1 Ud



Tender Fiber ORTHO Fibras de refuerzo para ferulizaciones parodontales en el caso de dientes parodontósicos, se pueden realizar rápidas y estéticas ferulizaciones con el auxilio de las fibras. (Documentación iconográfica del Dr. Luca Pinoli)



Tender Fiber ORTHO Fibras de refuerzo como contención ortodóntica o como conservador de espacio, en aplicaciones tradicionales y sustitutivas. (Documentación iconográfica del Dr. Eugenio Bolla)



CLEAT • PERNOS PARAPULPARES

Pernos parapulpares para elementos incluidos

Los pernos parapulpares con anillos en la cabeza (CLEAT) Micerium permiten la extrusión de los elementos incluidos, sin problemas de adhesión que acostumbran a encontrarse en los anclajes ortodónticos, especialmente si se debe intervenir quirúrgicamente.

VENTAJAS OPERATIVAS


- Indispensable para extrusión de caninos incluidos donde no se puede cementar los botones
- Se puede cortar la parte roscada para obtener la longitud deseada
- Rápido posicionamiento



Después de haber perforado el esmalte con la fresa de bola, perforar la dentina con la fresa calibrada hasta un mínimo de 2 mm.



Insertar el hilo de atadura el ojal del cleat.

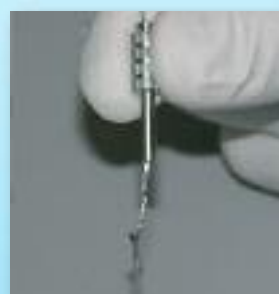

Insertar el hilo en la parte cóncava de la llave a mano y bloquear el ojal sobre la punta de corte



Enroscar el perno y deslizar la llave del hilo.

Código	Descripción	C.dad
AT0010T	PERNOS PARA DIENTES INCLUSOS CLEAT CORTOS Pernos autoroscentes con ojal largo 4,5 mm - ø 0,7mm Llave de mano	10 Uds 1 Ud
ATDRILL	Fresas 0,7 mm x 5mm RA Verde	6 Uds
B59-9	Llave de mano para Cleat	1 Ud

DENTOPREP ARENADORA ORAL

Íntegramente en acero

Las micro porosidades aumentan la retención mecánica hasta el 40%

APLICACIONES EXTRA ORALES

- Coronas metal-cerámica
- Pernos
- Incrustaciones y onlays
- Puentes Maryland
- Eliminación de cemento antes de volver a cementar

APLICACIONES INTRA ORALES

- Reparaciones de cerámica y composite
- Limpieza de la superficie
- Esterilizable hasta 135°C, contenedor, incluido el conector para la turbina



RØNVIG

Código	Descripción	Cdad
RON1900	Dento-Prep Arenadora oral para clínica	1 Ud
RON1906	Óxido de Aluminio 50 micron	1 kg
RON1926	Conector Dento-Prep 6 mm	1 Ud
RON1930	Conector Dentoprep Midwest	1 Ud
RON1935	Conector Dentoprep Sirona	1 Ud
RON1936	Conector Dentoprep W y H	1 Ud
RON1937	Conector Dentoprep Kavo	1 Ud
RON1938	Conector Dentoprep Bien Air	1 Ud
RON1939	Conector Dentoprep N NSK	1 Ud
RON1903	DENTOPREP DUST-CABINET 230 VOLT, 30 WATT Sistema aspirante para arenadora con interior iluminado	1 Ud

DENTOPREP DUST CABINET

Aspirador para arenadora

Ideal para utilizar la arenadora en clínica fuera de la cavidad oral. Dotado de iluminación y de filtro para la arena, se limpia con mucha facilidad.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Dimensiones externas	(altura, ancho, profundidad) 180 x 315 x 225 cm
Peso	4,130 Kg

LÁMPARA PARA POLIMERIZAR

Lámpara LED

- Fotopolimerizaciones de alta potencia
- Práctica y recargable

Código	Descripción	C.dad
CLEDPLUS	Lámpara al LED Micerium 1400 mW - 240 V 3 programas progresivos: F: Fast = 5 watt (potencia máxima) R: Ramp = la energía aumenta gradualmente P: Pulse = pulsaciones breves Potencia máxima relampagueante	1 Ud



LÁMPARA PARA LA TOMA DE COLOR

Optilume Trueshade LED

- Luz a led a 5.500 Kelvin
- Ideal para la toma de color



Código	Descripción	C.dad
OPTILUME2	Optilume Trueshade lámpara a 5.500 Kelvin - led a 45° antirreflejo - led a luz constante - sin hilo con carga baterías	1 Ud



Gafas

- En plástico transparente y naranja

Código	Descripción	C.dad
OCCH10	Gafas en plástico transparente	1 Ud
OCCH10A	Gafas en plástico naranja	1 Ud



GAFAS

ENA ORAL CARE

SMART PROPHY PASTAS, CEPILLOS Y GOMAS PARA PROFILAXIS

Pasta para profilaxis dental con abrasividad variable



Código	Descripción	C.dad
SDI3B	PROPHY PASTE en tubo azul para tártaro (250 RDA)	60 ml
SDI3V	PROPHY PASTE en tubo verde para placa gruesa (170 RDA)	60 ml
SDI3R	PROPHY PASTE en tubo rosa para placa fina (120 RDA)	60 ml
ECP30B	SMART PROPHY paste ó jeringas con 25 aplicadores azul para tártaro (250 RDA)	6x3ml
ECP30V	SMART PROPHY paste ó jeringas con 25 aplicadores verde para placa gruesa (170 RDA)	6x3ml
ECP30R	SMART PROPHY paste ó jeringas con 25 aplicadores rosa para placa fina (120 RDA)	6x3ml



Cepillos a copa con cerdas flexibles en nylon y gomas para profilaxis, a usar solos o con pasta de profilaxis


Código	Descripción	C.dad
ECP01 ECP01B	SMART PROPHY Cepillos Nylon suaves Rosas Cepillos RA Cepillos RA	12 Uds 100 Uds
ECP02 ECP02B	SMART PROPHY Cepillos Nylon naturales Blancos Cepillos RA Cepillos RA	12 Uds 100 Uds
ECP03 ECP03B	SMART PROPHY Cepillos Nylon duros Azul Cepillos RA Cepillos RA	12 Uds 100 Uds
ECP04 ECP04B	SMART PROPHY Cepillos Small naturales Blancos Cepillos RA Cepillos RA	12 Uds 100 Uds

Código	Descripción	C.dad
ECP31 ECP31B	SMART PROPHY Gomas medias Púrpura Gomas RA Gomas RA	12 Uds 100 Uds
ECP21 ECP21B	SMART PROPHY Gomas negras con tornillo Gomas Gomas	12 Uds 100 Uds
ECP20	SMART PROPHY Mandril con rosca	12 Uds

EASY CURETTE

Curette universal con tratamiento especial que no necesita afilado. Marcas milimetradas y dos flechas por cada punta para indicar la doble zona de corte

Código	Descripción	C.dad
ECC01	Curette universal	1 Ud

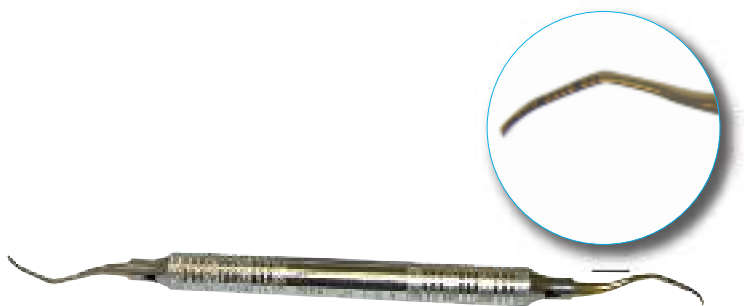

Kiss Me Kit

El kit que ilumina tu sonrisa...también fuera de casa. En el ambiente de trabajo, en el tiempo libre, para sentirte seguro de ti mismo, lleva siempre contigo el kit KISS ME!



Código	Descripción	C.dad
ECKMK	KIT KISS ME: Spray Kiss Me Digital Brush 3E Interdental Brush Small Hilo interdental PTFE ECIF1	1 Ud 5 Uds 1 Ud 1 Ud
ECKMT	KIT KISS ME: Dentífrico Digital Brush 3E Interdental Brush Small Hilo interdental PTFE ECIF1	1 Ud 5 Uds 1 Ud 1 Ud

DIGITAL BRUSH TOALLITA DESECHABLE

Extraordinaria simplicidad para la higiene oral también fuera de casa

- Con Clorhexidina: ideal para la higiene oral post quirúrgica y cuando no se puede emplear el cepillo dental
- Con Solución fisiológica: para la hygiene de dientes y encías desde el nacimiento

Código	Descripción	C.dad
ECDB1	DB Digital Brush con clorhexidina 0,12%	10 Uds
ECDB1B	DB Digital Brush con clorhexidina 0,12%	50 Uds
ECDB1D	DB Digital Brush con clorhexidina 0,12% con expendedor	100 Uds
ECDB2	DB Digital Brush Baby con solución fisiológica	10 Uds
ECDB2B	DB Digital Brush Baby con solución fisiológica	50 Uds
ECDB2D	DB Digital Brush Baby con solución fisiológica con expendedor	100 Uds

3E INTERDENTAL BRUSH

- Cerdas con diseño innovador (patentado) con doble onda que se adapta a la anatomía de los dientes en las zonas interproximales y permite una óptima remoción de la placa y de los residuos de alimentos
- Cerdas en Nylon con memoria retentiva
- Mango ergonómico
- Capuchón de protección
- Alma en acero Inoxidable recubierta en teflón (anti rayado) ideal también para cepillar las zonas implantarias

Código	Descripción	C.dad
ECE30S*	Cepillo interdental verde Small ø de 1,2 a 4 mm longitud 10 mm	30 Uds
ECE30M*	Cepillo interdental rojo Medium ø de 1,6 a 5 mm longitud 14 mm	30 Uds
ECE30L*	Cepillo interdental amarillo Large ø de 2,0 a 6 mm longitud 16 mm	30 Uds
ECE120	Cepillos interdentales surtidos verde/rojo/amarillo	120 Uds

*disponibles también en confección de 3/6/120 uds.

IF INTERDENTAL FLOSS

Hilo interdental en forma de banda en PTFE ultra resistente

Elegante confección en forma de "tarjeta de crédito" con espejo para una perfecta higiene, también fuera de casa.

Código	Descripción	C.dad
ECIF1	IF HILO INTERDENTAL Encerado blanco Tarjeta de crédito con espejo	10 mt
ECIFW	IF HILO INTERDENTAL Encerado blanco. Confección blíster	50 mt
ECIFB	IF HILO INTERDENTAL No encerado gris. Confección blíster	50 mt

KISS ME SPRAY

- Práctico enjuague bucal eficaz contra la halitosis porque neutraliza las bacterias que causan el mal aliento
- Sabor de menta fresca, sin gas, alcohol y sacarina

Código	Descripción	C.dad
ECKM1	KISS ME Spray Oral	20 ml.

ENAMEL PLUS DENTÍFRICO MULTIFUNCIONAL


De baja abrasividad (25 RDA)
Protege los dientes y las reconstrucciones dentales

- Sabor delicado
- No irrita las encías
- Refuerza el esmalte
- Desensibilizante
- Ligeramente blanqueante



Código	Descripción	C.dad
ECEP	Dentífrico en tubo sin caja En expositor de 24 uds.	75 ml
ECEPB	Dentífrico en tubo con caja	75 ml

Laboratorio

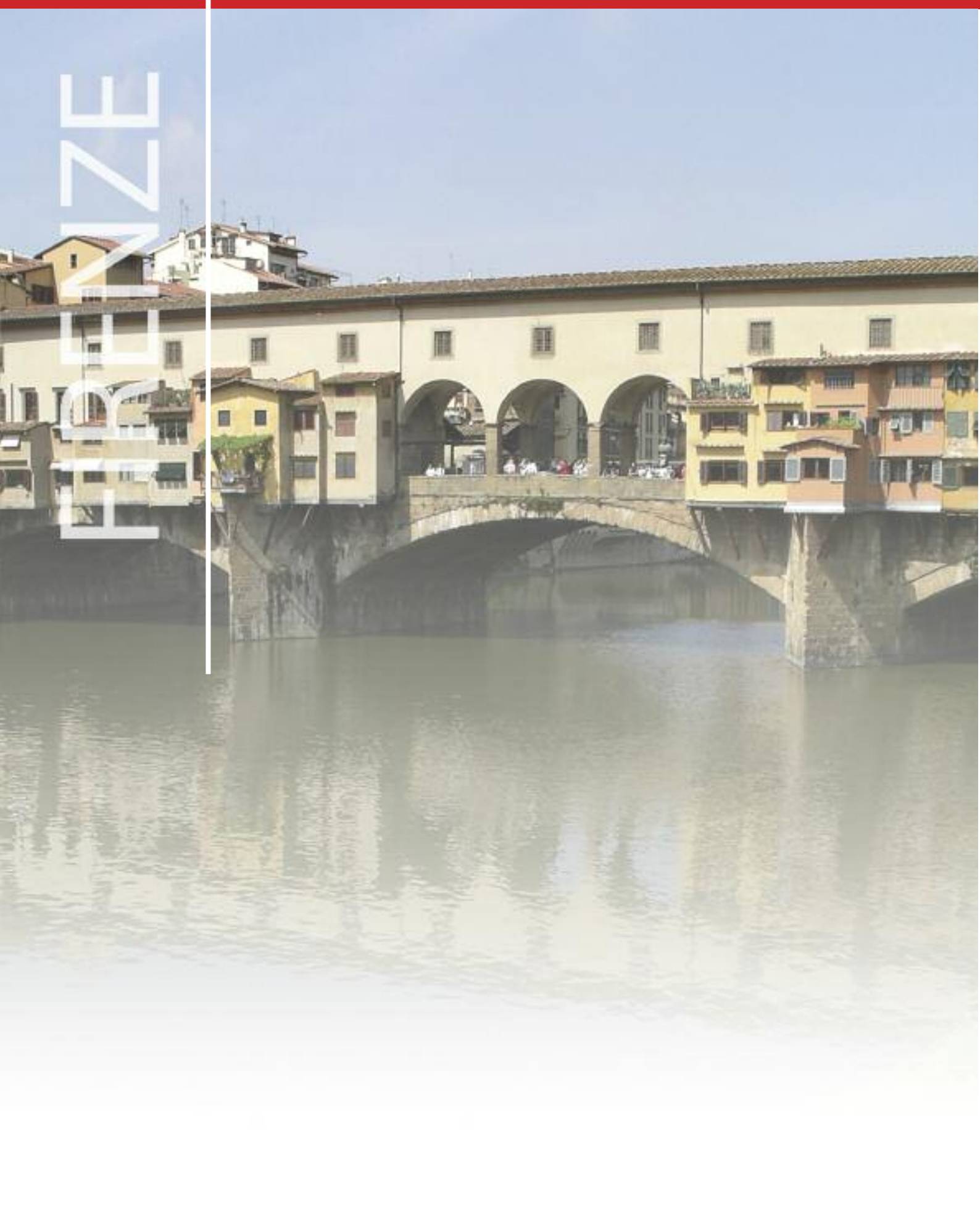



Laboratorio

48	Resina
50	Tender Composite
54	Light Curing Unit y Vacumix
55	Aleaciones y revestimientos
56	Ceras
58	Resinas calcinables
59	Tender Tray muñones desmontable
60	Cortadora y Router
61	Instrumentos
62	Zircoshiny

ENAMEL PLUS TEMP

Material muy útil por la opacidad y la fluorescencia del cuerpo dentinario y por la translucidez de las masas de los esmaltes que permiten evidenciar el típico contraste en el diente entre estos dos elementos. Además, las masas de esmalte permiten alcanzar un pulido natural en las coronas provisionales, muy semejantes a los elementos definitivos en cerámica.



Resina para puentes, coronas y provisionales estéticos de II generación

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Polimerización en laboratorio con 4 líquidos (fotopolimerización con calor o frío, fotopolimerización caliente en mufla, lámpara de fotopolimerización) en la boca, con dos líquidos (fotopolimerización fría regular o rápida ideal para rebases)
- Monómero residual inferior a 0,8%
- No excede los 57°C
- Ajuste de alta precisión
- Fácil de reparar
- No contiene aminas terciarias ni cadmio.
- Mezcla cremosa
- Dureza VICKERS 140 MPa
- Módulo de elasticidad: 2300 N/mm²



Nuevas masas fluorescentes para provisionales estéticos con mayor lucidez y excelente integración

TECNICA PARA CLINICA



Toma de impresión antes de la preparación



Colado de las dentinas en la toma de impresión



Provisional cementado y pulido

TECNICA PARA LABORATORIO



Matriz y colado de las dentinas



Aplicación de las caracterizaciones y masa transparente



Colado de esmalte y pulido final.

Código	Descripción	Cdad
TEMP3	KIT COMPLETO DE RESINA PARA PROVISIONALES	
	Dentinas Enamel plus Temp:	6x50 g
	UD1 (A1), UD2 (A2), UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4), UD5	
	Esmaltes Enamel plus Temp:	4x50 g
	WHITE, CLEAR, GREY, BLUE	
	Esmaltes universales: UE1, UE2, UE3	3x50 g
	Enamel plus Temp PINK rosa encía	1x50 g
	Líquido autopolimerizable Enamel plus Temp	100 ml
	Líquido autopolimerizable - caliente	25 ml
	Enamel plus Temp para llaves	
	Líquido autopolimerizable - caliente	25 ml
	Enamel plus Temp para mufla	
	Líquido fotopolimerizable Enamel plus Temp	10 ml
TEMP1N	KIT DE INTRODUCCIÓN DE RESINAS PARA PROVISIONALES	
	Dentinas Enamel plus Temp:	4x50 g
	UD2 (A2), UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4)	
	Esmaltes Enamel plus Temp: UE2, Blue	2x50 g
	Líquido autopolimerizable	100 ml
TEMP10N	TRIAL KIT DE RESINAS PARA PROVISIONALES	
	Dentinas Enamel plus Temp:	4x10 g
	UD2 (A2), UD3 (A3), UD3,5 (A3,5), UD4 (A4)	
	Esmalte Enamel plus Temp UE2	10 g
	Líquido autopolimerizable Enamel plus Temp	25 ml



Código	Descripción	C.dad
TEMPUDO	Enamel plus Temp dentina UD0	100 g
TEMPUD1	Enamel plus Temp dentina UD1 (A1)	100 g
TEMPUD2	Enamel plus Temp dentina UD2 (A2)	100 g
TEMPUD3	Enamel plus Temp dentina UD3 (A3)	100 g
TEMPUD3,5	Enamel plus Temp dentina UD3,5 (A3,5)	100 g
TEMPUD4	Enamel plus Temp dentina UD4 (A4)	100 g
TEMPUD5	Enamel plus Temp dentina UD5	100 g
TEMPB1	Enamel plus Temp dentina B1	100 g
TEMPB2	Enamel plus Temp dentina B2 (62)	100 g
TEMPB3	Enamel plus Temp dentina B3 (65)	100 g
TEMPB4	Enamel plus Temp dentina B4	100 g
TEMPC2	Enamel plus Temp dentina C2	100 g
TEMPD3	Enamel plus Temp dentina D3	100 g
TEMPUE1	Enamel plus Temp esmalte universal UE1	100 g
TEMPUE2	Enamel plus Temp esmalte universal UE2	100 g
TEMPUE3	Enamel plus Temp esmalte universal UE3	100 g
TEMPS3	Enamel plus Temp esmalte White	100 g
TEMPOB	Enamel plus Temp esmalte Blue	100 g
TEMPT	Enamel plus Temp esmalte Clear	100 g
TEMPGR	Enamel plus Temp esmalte Grey	100 g
TEMPDOL	Enamel Temp Dentopaq Light	100 g
TEMPDOD	Enamel Temp Dentopaq Dark	100 g
TEMPMO	Enamel Temp Naranja Modifier	100 g
TEMPMY	Enamel Temp Amarillo Modifier	100 g
TEMPPP	Enamel plus Temp PINK rosa encía	100 g
TEMPL	Enamel plus Temp líquido autopolimerizable	100 ml
TEMP1-L	Enamel plus Temp líquido autopolimerizable	1000 ml

Código	Descripción	C.dad
TEMPLH	Enamel plus Temp líquido en caliente	100 ml
TEMPLPRESS	Enamel plus Temp líquido en caliente para mufla	100 ml
TEMPLC	Enamel plus Temp líquido fotopolimerizable	10 ml
TOA2	Opaquer Temp universal en polvo fotopolimeriz.	3 g
TEMPISO	Aislante yeso resina Micerium	50 ml
COSSHINYSH	Cepillo de pelo de cabra HP Micerium	12 Uds
TEMPPOL	Líquido para pulir resina	1 oz
TEMP99	Pasta para pulir Temp Stick Micerium	100 g

Discos "Temp" para CAD/CAM, disponibles en dos espesores en los colores Universal y Light

para coloraciones y provisionales ver Temp Colour System Supercolors Consultar sección Estética pág.38



Posibilidad de producir otros tipos de bloques CAD / CAM a pedido

Código	Descripción	C.dad
TC15UD1	Temp CAD CAM Disco diam.98,5mm x 15mm UD1 (A1) Light	1 Ud
TC15UD3	Temp CAD CAM Disco diam.98,5mm x 15mm UD3 (A3) Universal	1 Ud
TC20UD1	Temp CAD CAM Disco diam.98,5mm x 20mm UD1 (A1) Light	1 Ud
TC20UD3	Temp CAD CAM Disco diam.98,5mm x 20mm UD3 (A3) Universal	1 Ud

ENAMEL PLUS TENDER

La naturaleza del diente, la técnica y la estética de la cerámica

Composite microhíbrido utilizable tanto en clínica como en laboratorio, con una masa intermedia como cuerpo dentinario de alta elasticidad, una pasta opaca y un adhesivo que garantiza una adhesión única

TENDER: cuerpo dentinario de alta elasticidad
HRi: masa de esmalte de alta resistencia
LA COMBINACIÓN GANADORA

Como la cerámica

Mejor que la cerámica...

Es posible rectificar en clínica con el mismo material utilizado en el Laboratorio. Enamel Plus HRi puede ser utilizado para la cementación realizando al mismo tiempo un rebase del trabajo y también como capa subyacente antes de la toma de impresión (disponible también en "flow"). Permite mayores posibilidades en las soluciones de implantes y es ideal para las prótesis combinadas.



Fracturas complejas Dr. Lorenzo Vanini



Cementación y eventual reintervención realizada siempre con el mismo material



Preparación: se puede utilizar "HFO Flow" como base



Los inlays en composite cementados con "HFO OW" (Dr. Lorenzo Vanini)



Reconstrucción en composite sobre implante: Tender Opaque



Técnica de estampado con mufla: dentina



Técnica de estampado con mufla: esmalte



Trabajo finalizado del Sr. D. Rondoni



Código	Descripción	C.dad
TENDER1H	KIT INTRODUCCIÓN ENAMEL PLUS TENDER	
	7 Tender: T2, T3, T4, T5, MVV, MO, MY	7x2,5g
	4 dentinas HRi: UD2 (A2), UD3 (A3), UD4 (A4), UD5	4x2,5g
	3 esmaltes universales HRi: UE1, UE2, UE3	3x2,5g
	1 esmalte intensivo: Intensive White Spot (IWS)	2,5g
	1 esmalte opalescente OBN	2,5g
	2 pastas opaques: light, clear	2x3g
	1 Tender bonding metal primer	2,5ml
	2 Temp Chips retentions: standard, micro	2x10g
	1 Temp Chips adhesivo	20 ml
TENDER7H	ENAMEL PLUS KIT TENDER	
	2 Tender: T4-TMO	2x2,5g
	3 dentinas HRi: UD2 (A2), UD3 (A3), UD4 (A4)	3x2,5g
	1 esmalte universal HRi: UE2	2,5g
	1 Stain Brown2	3g

TÉCNICA DE PRENSADO CON MUFLA

Mufla de Plexiglass para prensar

puentes largos, combinada, parciales, perio-overdentures.

- Fácil: modelación en cera en vez de composite
- Rápido: Tiempo de trabajo un 70% inferior
- Meticuloso: Muy buen acabado de la superficie
- Medidas: 10,5 X 8,6 cm x máximo 5,5 cm
- 2 insertos para reducir el consumo de silicona
- 1 base universal
- 2 tapas con diferentes alturas



Código	Descripción	C.dad
TENDERFLASK	TENDER FLASK MUFLA EN PLEXIGLAS, se compone de: base en Plexiglas tapas en Plexiglas insertos en Plexiglas	1 Ud 2 Uds 2 Uds



2cm. Para inferiores superiores sin paladar



2,5 cm. Para superiores con paladar en metal.

Tender flask in press mufla multifuncional para inyección o moldeo

Toronto bridge, Prótesis total, Dimas quirúrgicas, Provisionales, Bite, Duplicación de modelos, Coronas puentes de composite
Base: 10,4 x 10,6 x h 7,5 cm

Mufla con tapas de diferentes materiales:

- Transparente para composite, disponible con dos alturas
- De fibra de vidrio para acrílico con contra-molde de silicona
- De aluminio para acrílico con contra-molde de yeso



Verticuladores para resina y composite



Código	Descripción	C.dad
TXF1	TENDER FLASK IN-PRESS COMPLETA Base de aluminio Varillas de acero inoxidable standard Tapa de aluminio pulido Tapa negra de fibra de vidrio Tapa de policarbonato transparente estándar Varillas de acero inoxidable small Tapa de policarbonato transparente small Base para Tender Tray 4 con imán incorporado Contra imanes para Tender Tray 4 Cerradura a presión de acero inoxidable Platillo de compresión Extractor para yeso Tapones para cerrar orificios de la parte superior Esferas de relleno	1 Ud 3 Uds 1 Ud 1 Ud 1 Ud 3 Uds 1 Ud 2 Uds 4 Uds 1 Ud 1 Ud 2 Uds 6 Uds 100 Uds
TXF2	TENDER FLASK SMALL para composite Base de aluminio Varillas de acero inoxidable small Tapa de policarbonato transparente small Base para Tender Tray 4 con imán incorporado Contra imanes para Tender Tray 4 Cerradura a presión de acero inoxidable Platillo de compresión Extractor para yeso Tapones para cerrar orificios de la parte superior Esferas de relleno	1 Ud 3 Uds 1 Ud 2 Uds 4 Uds 1 Ud 1 Ud 2 Uds 6 Uds 100 Uds
TXF5C	VERTICULADOR para composite Tapa + base con espaciadores y sujeciones	1 Ud
TXF5B	VERTICULADOR para resina/cerámica Tapa + base con espaciadores y sujeciones	1 Ud
TXF5CC	Tapa Verticulador para composite	1 Ud
TXF5BC	Tapa Verticulador para resina/cerámica	1 Ud
TXF5FG	Espaciadores y sujeciones para verticuladores	12+3 Uds
TXF12	TENDER TRAY 4 MAGNETIC Base lisa para mufla y split cast	5 Uds
TXF22	Imanes para Tender Tray 4	5 Uds
TXF41	Esferas de relleno	100 Uds
TXF1B	Base mufla de aluminio (molde para split cast)	1 Ud

ENAMEL PLUS TENDER



REPOSICIONES TENDER

Código	Descripción	C.dad	Código	Descripción	C.dad
TENDERT2	Tender T2 (A1, A2)	5 g	ETBOND	Ena Tender Bond metal primer	5 ml
TENDERT3	Tender T3 (A3)	5 g	ETOCLEAR	Opaquer en pasta neutra para primera capa	3 g
TENDERT3,5	Tender T3,5 (A3,5)	5 g	ETOL	Opaquer en pasta light (UD1, UD2, UD3)	3 g
TENDERT4	Tender T4 (A4)	5 g	ETOD	Opaquer en pasta dark (UD3,5, UD4)	3 g
TENDERT5	Tender T5	5 g	TEMPF	Temp bonding fluido para correction y reparación de resina-composite, composite-composite	10 ml
TENDERMW	Tender MW modificador blanco	5 g	TORS10	Retenciones Temp Chips Standard Micerium	10 g
TENDERMY	Tender MY modificador amarillo	5 g	TORM10	Retenciones Temp Chips Micro Micerium	10 g
TENDERM0	Tender M0 modificador naranja	5 g	TORA	Temp Chips Adhesivo para retenciones Micerium	20 ml
COSSTAIN	Masa fluida transparente	2 g	TEMPSEAL	Rotulador sellador Temp Seal Micerium	1 Ud
PLEXI26	Soporte en plexiglass transparente 26 agujeros	1 Ud	TEMPSEP	Rotulador aislante Temp Sep Micerium	1 Ud
PLEXI26D	Soporte en plexiglass Dark 26 agujeros	1 Ud	TEMPSILV	Polvos de plata para control de texturas	30 g
PLEXI9	Soporte en plexiglass transparente 9 agujeros	1 Ud	COSSCALATS	Guía de colores Tender, Pink, Stain 21 colores	1 Ud

Nota: Las masas Tender pueden ser usadas también para los colores B, C y D de la escala Vita®



SUPERCOLORS ENA TENDER

Supercolors fotopolimerizables de base acrílica ideales para caracterizaciones

- Prótesis fija y combinada en composite
- Provisionales en resinas y composites
- Prótesis removibles



Código	Descripción	C.dad	Código	Descripción	C.dad
ETSK	Kit completo supercolores fotopolimerizables Blanco, rojo, azul, marrón, marrón oscuro, negro, caqui, naranja, amarillo, primer, cleaner, 2 pinceles	9x3 g	ETS1	Supercolors fotopolimerizables blanco	3 g
ETSK7	Kit introductivo supercolores fotopolimerizables Blanco, rojo, azul, marrón, marrón oscuro, caqui, naranja, primer, 2 pinceles	7x3 g	ETS3	Supercolors fotopolimerizables azul	3 g
			ETS4	Supercolors fotopolimerizables marrón	3 g
			ETS5	Supercolors fotopolimerizables marrón oscuro	3 g
			ETS6	Supercolors fotopolimerizables negro	3 g
			ETS7	Supercolors fotopolimerizables amarillo	3 g
			ETS8	Supercolors fotopolimerizables naranja	3 g
			ETS9	Primer	3 g
			ETSR	Supercolors fotopolimerizables rojo	3 g
			ETSCA	Supercolors fotopolimerizables caqui	3 g
			ETSCL	Cleaner	50 ml

COMPOSITE, SUPERCOLORES Y RESINAS PARA ENCÍAS PARA PRÓTESIS COMBINADAS Y REMOVIBLES



Parcial



Aplicación de rosa opaco



Composite opaco



Protesis combinada de composite Tender y resina

COMPOSITE TENDER PINK

Composite fotopolimerizable rosa para encías
Opaquer rosa para esqueléticos



Código	Descripción	C.dad
TENDERPKIT	Tender Pink Kit Composite fotopolim.rosa Pink Orange, Pink Light, Pink Dark, Pink Transparent Pink pasta opaquer Ena Tender Stain: rojo, azul, blanco	4x2,5 g 1 g 3x3 g
TENDERP	Tender Pink Orange	5 g
TENDERPL	Tender Pink Light	5 g
TENDERPD	Tender Pink Dark	5 g
TENDERPT	Tender Pink Transparent	5 g
ETOP	Opaquer en pasta rosa fotopolimerizable para cubrir esqueléticos	3 g
TENDERFP	Tender Pink Orange Flow	2 g

RESINA TENDER ACRYL

Resina autopolimerizable para prótesis removibles y combinadas, con bajo residuo de monómeros y de características cromáticas naturales

- Estable en el color
- Altos valores mecánicos
- Muy compacta, reduce los tiempos de pulido
- Muy precisa, excelente adaptabilidad
- Bajísimo residuos de monómeros



Código	Descripción	C.dad
TAL1	Tender Acryl líquido	1000 ml
TAL5	Tender Acryl líquido	500 ml
TAP01	Tender Acryl Pink opaquer polvo	1 Kg
TAP05	Tender Acryl Pink opaquer polvo	500 g
TAPT1	Tender Acryl Pink transparente polvo	1 Kg
TAPT5	Tender Acryl Pink transparente polvo	500 g
TAPF	Tender Acryl Pink Fibrillae	5 g

SILICONAS TEMP SILIC

Siliconas especiales para cubetas, ideales también para muflas transparentes



Código	Descripción	C.dad
TEMPSMK	KIT DE SILICONAS PARA MUFLA TENDER FLASK Silicona pasta 90 shore A+B+Retardante Siliconas transparente en cartuchos 55 Shore Aislante en spray para mufla	300 g 50 ml 200 ml
TEMPSMR3	Silicona para cubetas y mufla 90 Shore Pasta A Blanco, Pasta B Azul + Retardante	1,5Kg + 1,5 Kg
TEMPSMR10	Silicona para cubetas y mufla 90 Shore Pasta A Blanco, Pasta B Azul + Retardante	5 Kg + 5 Kg
TEMPSM10	Retardante para silicona, para utilización en mufla	10 ml
TEMPSMS3	Silicona para cubetas y mufla 60 shore A+B	1,5+1,5Kg
TEMPSMT	Silicona para cubeta transparente en cartuchos 55 shore, tiempo de trabajo 1'30/ 2'30 min. Endurecimiento 15-20 min.	50 ml
TEMPSMT5	Silicona transparente en cartuchos 55 shore	5x50 ml
TEMPSI	Aislante siliconado en spray para mufla	200 ml
TDPUN25	Puntas auto-mezclantes	25 Uds

LIGHT CURING UNIT

Lámpara de polimerización para resina y composite

Código	Descripción	C.dad
LABORLUX3	Lámpara de fotopolimerización 300 W con timer para polimerización de todos los materiales, 310-500 nm	1 Ud
LABORLUXL-L	Bombilla de recambio 300 W para LABORLUXL/3	1 Ud
LAMPADAPLUST	Lámpara de fotopolimerización CON TIMER para inlay y carillas en composite, 320-500 nm 4 bombillas halógenas x 9W y 1 bombilla halógena x50 W	1 Ud
LAMPADA	Lámpara de fotopolimerización de rayos UVA para cubetas fotopolimerizable, supercolores 4 bombillas UVA x 9 W, 320-400 nm	1 Ud
LAMPADINE	Bombilla UVA de recambio 9 W	1 Ud
LAMPAPLUS	Bombilla halógena de recambio 9 W	1 Ud
LAMPA-8	Bombilla halógena de recambio 50 W	1 Ud



VACUUM MIXER WD700

Pequeño y Potente

Los mezcladores de la serie WD700 unen la simplicidad de utilización con las óptimas prestaciones. Son indicados para mezclar EN AUSENCIA DE AIRE todo tipo de yeso, revestimientos y siliconas. Tienen un motor reductor muy silencioso y potente, la bomba de vacío que funciona en seco y el timer electrónico muy preciso. Los mezcladores pueden ser posicionados indiferentemente sobre una mesa o fijados a la pared con los correspondientes soportes. La máquina viene provista de una taza de 500 cc. Son disponibles opcionalmente, tazas de 200, 1000 y 2000 cc. Y una para afinado de 200 cc. A petición, disponible el modelo con velocidad regulable WD700A.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje	230 V - 140 W
Motor	12 N/M
Velocidad	400 RPM
Bomba de vacío	-0,8 bar, 10 lt por min.
Base	220x160 mm (300x280 mm soporte de mesa)
Altura	300 mm (615 mm soporte de mesa)
Peso	8,5 Kg (10 Kg soporte de mesa)

Código	Descripción	C.dad
WD700	MEZCLADORA AL VACÍO 400RPM 0,8 BAR también para esqueléticos, con una taza de 500 cc más soporte de mesa y de pared	1 Ud
WD711	Taza de mezcla de 200 cc con filtro	1 Ud
WD712	Taza de mezcla de 500 cc con filtro	1 Ud
WD713	Taza de mezcla de 1000 cc con filtro	1 Ud
WD714	Taza de mezcla de 2000 cc con filtro	1 Ud
WD711A	Taza de mezcla de 200 cc para alginado	1 Ud

ALEACIONES Y REVESTIMIENTOS PARA PUENTES Y CORONAS

	NS Metal50	M NMICERIUM
COMPOSICIÓN		
Níquel	-	76,5%
Chromium	27%	14%
Molybdenum	6%	4,5%
Cobalt	61,6%	-
Tungsten	5%	-
PHYSICAL PROPERTIES		
Dureza Vickers	350	440
Elongación %	10,3	9
Limite sollecit. (Mpa)	475	784
Temp. de fusión	1421°C	1385°C
Coef. de expansión	14,1x10 ⁻⁶	14,3x10 ⁻⁶

NS aleación sin níquel para porcelana antialérgico
M apropiada para cerámica europea



Código	Descripción	C.dad
METAL50	Cromo cobalto NS para cerámica también disponible en confecciones de 100 gramos	1 Kg
NMICERIUM	Cromo níquel M para puentes y coronas en porcelana. Disponibles en confecciones de 100 y 500 gramos	1 Kg
METAL2	Soldadura presolder para cromo níquel	8 g

Código	Descripción	C.dad
METAL9BIS	Flux para soldadura para cromo níquel	1 Ud
NNIRAVESTFIRE	Revestimiento microfire rápido de grano fino para aleaciones preciosas y no preciosas 100 bolsas de 90 gramos con líquido	9 Kg 1 Lt
NNIRAVESTL	Líquido para revestimiento Microfire	1 Lt

ALEACIONES SIN NÍQUEL PARA ESQUELÉTICOS NIRANIUM

	PL NPL	VA NVA	NH NNH
COMPOSICIÓN			
Cobalt	66%	-	62%
Cobalto y Vanadio	-	64%	-
Chromium	27%	29%	30%
Molybdenum	5%	5,5%	6%
CARACTERÍSTICAS			
Dureza Vickers	435	480	444
Elongación %	3,5	2,5	3
Limite sollecit. (Mpa)	600	-	611
Temperatura de fusión	1482°C	1450°C	1454°C



Código	Descripción	C.dad
NPL (METAL20)	PLADINIUM PL aleación de cromo cobalto sin níquel con platino y Palladio para trabajos de alta calidad. Mayor ductibilidad y brillantez.	1 Kg
NVA	Aleación rígida VA al cromo cobalto con vanadiun, sin níquel para fresados y anclajes	1 Kg
NNH (METAL1)	NH aleación al cromo cobalto sin níquel, con mayor contenido de carbono para trabajos más rígidos	1 Kg
METAL14	Soldadura para cromo cobalto	25 g
METAL9	Flux para soldadura en cromo cobalto	1 Ud

PL Platino & Paladio proporcionan dureza, brillo y prestigio

VA Vanadio proporciona rigidez para fresados y anclajes

NH Dureza y elasticidad equilibradas

CERAS ESPECIALES PARA PRÓTESIS FIJAS Y REMOVIBLES

CERAS DE ALTA CALIDAD PARA FUSIONES Y MODELADO



Código	Descripción	C.dad
F54G ●	FLEX-E-Z cera verde No necesita separador, con memoria ideal para inlay, fresados y fusiones precisas	4 oz
F55G ●	FLEX-E-Z cera verde	1 lb
F54B ●	FLEX-E-Z AZUL autoaislante, con memoria elastica ideal para inlay, fresados y fusiones precisas	4 oz
F55B ●	FLEX-E-Z cera azul No necesita separador, con memoria ideal para inlay, fresados y fusiones precisas	1 lb
F54W ○	FLEX-E-Z cera blanca No necesita separador, con memoria ideal para inlay, fresados y fusiones precisas	4 oz
F55W ○	FLEX-E-Z cera blanca	1 lb
F54V ●	FLEX-E-Z IVORY per modellazione estetica	4 oz
F54P ●	FLEX PURPLE morada, extra hard sin retracción para márgenes	4 oz
F55P ●	FLEX-E-Z PURPLE morada	1 lb
F55ZB ●	FLEX PARA PUENTES Y CORONAS Cera para puentes y coronas regular azul	1 lb

CERAS PARA APLICACIONES DE REMOVIBLES SIN RETRACCIÓN



Código	Descripción	C.dad
F95H	Cera en hojas ROSA rígida y flexible resistente hasta 55°C sin alteración 10 hojas	5 lb
F85H	Cera en hojas ROSA 10 hojas	200 g
F95A	ALL SEASON Cera en hojas ROSA	5 lb


CERAS PERNOS Y BOBINA



Código	Descripción	C.dad
de F06SB a F12SB y de F14S a F24S	CERA AZUL PERNOS COLADOS 12 cm 0,5mm (F24S), 1mm (F18S), 1,5mm (F14S), 2mm (F12SB) 2,5mm (F10SB), 3,3mm (F08SB), 4mm (F06SB)	60 g
de F04R a F14R	CERA EN BOBINA AZUL 1,5mm (F14R), 2mm (F12R), 2,5mm (F10R), 3,3mm (F08R), 4mm (F06R), 5mm (F04R)	250 g
de F06S a F12S	CERA ROJA WIRE 15 cm 2mm (F12S), 2,5mm (F10S), 3,3mm (F08S), 4mm (F06S)	125 g


CERAS CALIBRADAS Y DE UTILIDAD

CERAS CALIBRADAS PARA FUSIÓN DE PARCIALES - ESQUELÉTICOS Y PERNOS

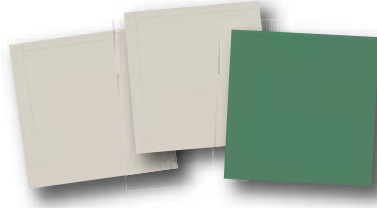

Código	Descripción	Cdad
de F02A a F08A	CERA ADHESIVA TRANSPARENTE CALIBRADA: 0,25 (F02A), 0,3 (F03A), 0,4 (F04A), 0,5 (F05A), 0,6 (F06A), 0,8 (F08A)	32 hojas
de NCASTINGW03 a NCASTINGW08	CERA VERDE CALIBRADA: 0,3 (NCASTINGW03), 0,4 (NCASTINGW04), 0,5 (NCASTINGW05), 0,6 (NCASTINGW06), 0,8 (NCASTINGW08)	32 hojas

CERAS DE UTILIDAD

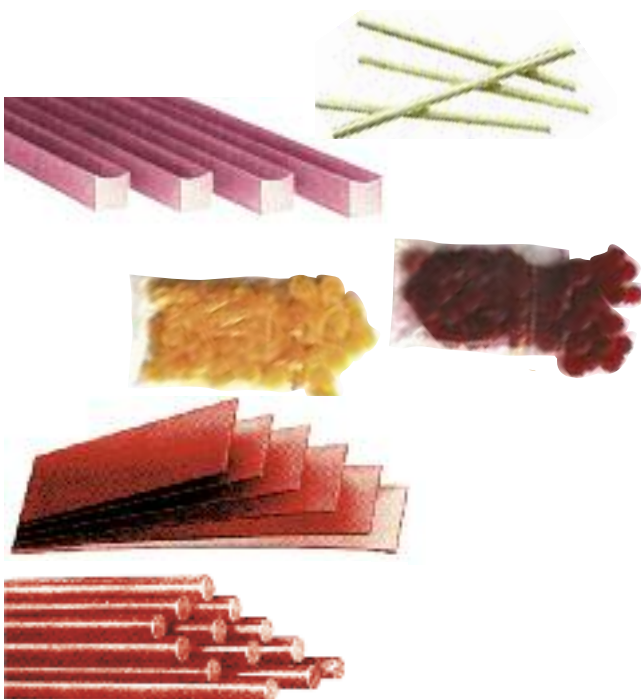

Código	Descripción	Cdad
F67Y	CERA ADHESIVA AMARILLA. Confeccionada en sticks de 12 cm. Fórmula especial de rápido endurecimiento, rígida para una separación limpia y sin residuos.	100 g
F66P	CERA ADHESIVA MORDIDA ROSA. Cóncava, para una adaptación más rápida a la cresta; fórmula especial para garantizar la máxima precisión en la reproducción de la mordida	1 lb
F65R	CERA DE INMERSIÓN ROJA. Fundible, para realizar capas gracias a la memoria elástica, es resistente a las distorsiones	1 lb
F66R	CERA PARA ENCOFRAR ROJA TIRAS. Muy fino (1 mm) y eficaz para encofrar las impresiones a colar en yeso o poliuretano; Las hojas se adhieren perfectamente a la superficie sin necesidad de calentarlas	1 lb
F67R	CERA PARA ENCOFRAR ROJA BARRA. Ideal para reconstrucciones y reparaciones de pequeñas imperfecciones de modelos; utilizable también con la cera en barra para encofrar, debajo del borde periférico de la toma de impresión	1 lb

BUNSEN Y CALENTADOR DE CERA



Bunsen a inducción y calentador de cera híbrido con Bunsen a inducción y espátula eléctrica

Código	Descripción	Cdad
F200	Calentador de cera con bunsen a inducción y espátula eléctrica	1 Ud
F300	Bunsen a inducción	1 Ud

TENDER ROCK

Lacas Espaciadoras Tender Rock

- Espaciador color dentina ideal para trabajos metal free en composite y cerámica, permite la verificación del color
- Endurecedor y protector para muñones
- Localizador de contactos
- Protector para muñones



Código	Descripción	C.dad
TRUK	KIT LACA ESPACIADORA TENDER ROCK	
	Tender Rock espaciador color dentina UD1	20 ml
	Tender Rock espaciador color dentina UD2	20 ml
	Tender Rock espaciador color dentina UD3	20 ml
	Tender Rock espaciador color dentina UD4	20 ml
	Tender Rock espaciador color dentina blanca	20 ml
TRK	TENDER ROCK COMPLETE KIT	
	Tender Rock espaciador color dentina UD1	20 ml
	Tender Rock espaciador color dentina UD2	20 ml
	Tender Rock espaciador color dentina UD3	20 ml
	Tender Rock espaciador color dentina UD4	20 ml
	Tender Rock espaciador color Blanco	20 ml
	Tender Rock diluyente	20 ml
	Tender Rock Contact	30 ml
	Tender Rock DUR diluyente	30 ml

Código	Descripción	C.dad
TRUD1	Tender Rock espaciador color dentina UD1	20 ml
TRUD2	Tender Rock espaciador color dentina UD2	20 ml
TRUD3	Tender Rock espaciador color dentina UD3	20 ml
TRUD4	Tender Rock espaciador color dentina UD4	20 ml
TRUW	Tender Rock espaciador color dentina blanca	20 ml
TRUT	Tender Rock diluyente	20 ml
TRC	Tender Rock Contact	30 ml
TRCT	Tender Rock Contact diluyente	20 ml
TRDT	Tender Rock DUR diluyente	30 ml

RESINAS CALCINABLES

Resina calcinable autopolimerizable sin contracción para soldaduras perfectas

Resina calcinable autopolimerizable para fabricación de coronas secundarias, fijaciones de soldaduras, puentes, anclajes, ganchos, pernos y muñones. Se puede utilizar en la clínica y en el laboratorio, mezclando polvo y líquido o con la técnica de pincel.



Perno muñón




Perno muñón



Fresados (y puentes Maryland)

VENTAJAS OPERATIVAS

- Calcinable: se quema sin dejar residuos
- Bajísima retracción: <1%

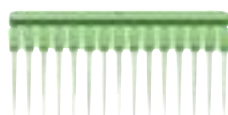

Código	Descripción	C.dad
TR100	RESINA TEMP ROJA CALCINABLE polvo + líquido	2 Uds
TR100P	Temp Red polvo	100 g
TR100L	Temp Red líquido	100 ml
DURL94	Pernos calcinables	60 Uds

TENDER TRAY "Magnetic"

Rápido, económico y ...

"magnéticamente" meticoloso

Es un sistema de precisión para muñones desmontables de material especial con larga duración y resistente hasta 200°C. Base anti reflejos ideal para escansiones, disponible en tres versiones más una cuarta para el antagonista, integrable con la mufa Tender Flask.

Tender Tray 1 con retenciones con perno y refuerzo metálico para muñones "magnéticos" de elevada precisión también en los incisivos inferiores.

Tender Tray 2 con retenciones a perno totalmente de plástico.

Tender Tray 3 con retenciones rugosas y refuerzo metálico para muñones "magnéticos" sobre implantes.

Tender Tray 4 base metálica lisa para Split Cast a utilizar para el antagonista.

Tender Tray 1 y 3 permiten utilizar un imán para encolarlo debajo del muñon para mejorar la estabilidad. Además el refuerzo metálico permite el acoplamiento con otro imán para la puesta en el articulador.

Tender Tray 2 es más económico y tiene un imán que facilita la puesta en el articulador. Puede ser utilizado en alternativa a los recipientes de colores destinados la remisión de los trabajos al dentista cuando efectuados en articulador.



Código	Descripción	Cdad
TX1	INTRO KIT TENDER TRAY "Magnetic"	
	Bases Tender Tray 1	2 Uds
	Bases Tender Tray 2	1 Ud
	Lengüeta de goma para el colado del modelo	1 Ud
	Caja de goma para el colado del modelo	1 Ud
	Instrumentos para extraer modelos/alineador	1 Ud
	Imanes para puesta en articulador	2 Uds
	Imanes pequeños para muñones	10 Uds
	Base para trabajos	2 Uds
TX10	REPOSICIONES TENDER TRAY 1 "Magnetic"	
	Bases con retenciones con perno y refuerzo de metal	10 Uds
TX20	REPOSICIONES TENDER TRAY 2	
	Bases con retenciones con perno "económicas"	10 Uds
TX30	REPOSICIONES TENDER TRAY 3 "Magnetic" para implantes	
	Bases con retenciones rugosas y refuerzo metálico	10 Uds
TXF21	REPOSICIONES TENDER TRAY 4 "Magnetic" para Split Cast	
	Bases lisas con refuerzo metálico	5 Uds
TX41	Lengüeta de goma para el colado del modelo	10 Uds
TX42	Caja de goma para el colado del modelo	2 Uds
TX43	Instrumentos para extraer modelos / alineador	2 Uds
TX44	Imanes para puesta en articulador Tender Tray 1 y 3	10 Uds
TX45	Imanes pequeños para muñones	100 pz
TXF22	Contra imanes para articulador para Tender Tray 2 y 4	5 Uds
TX15	Base para trabajos para Tender Tray 1 y 2	24 Uds
TX35	Base para trabajos para Tender Tray 3	24 Uds



Tender Pin

TX090S	Dowel Pins	100 Uds
TX090M	Pernos de latón con alfiler	500 Uds
TX092S	Dowel Pins	100 Uds
TX092M	Pernos de latón sin alfiler	500 Uds
TX012S	Pernos medios con funda blanca	100 Uds
TX012M	Pernos medios con funda blanca	500 Uds
TX012D	Pernos medios con funda blanca	2000 Uds
TX014S	Pernos largos con funda blanca	100 Uds
TX014M	Pernos largos con funda blanca	500 Uds
TX014D	Pernos largos con funda blanca	2000 Uds


TX015S	Pernos cortos con funda blanca	100 Uds
TX015M	Pernos cortos con funda blanca	500 Uds
TX015D	Pernos cortos con funda blanca	2000 Uds
TX053S	Pernos dobles con funda blanca	100 Uds
TX053M	Pernos dobles con funda blanca	500 Uds
TX053D	Pernos dobles con funda blanca	2000 Uds
TX063S	Pernos individuales con funda	100 Uds
TX063M	Pernos individuales con funda	500 Uds
TX063D	Pernos individuales con funda	2000 Uds

CORTADORA DE ALTA PRECISIÓN: PX901A

Seccionamiento de precisión más fácil,
veloz y seguro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje	220-230 V, 50 Hz,
Absorción	100 W
Base	200x420 mm
Altura	340 mm
Peso	10 Kg.
Hoja	80 mm (agujero 16 mm)
Espesor de la hoja	0,2 mm

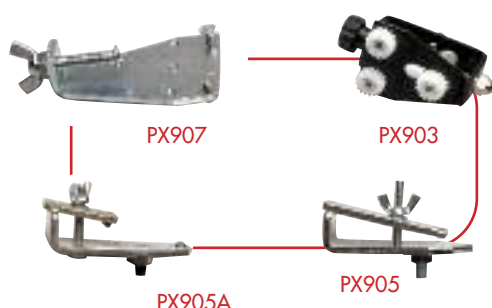

Código	Descripción	C.dad
PX901A	SEPARADORA PARA MUÑONES con soporte y ajustable base	1 Ud
ASX1000	Aspirador externo para sierra y separadora	1 Ud
PX903	Soporte para Accutrak	1 Ud
PX904	Disco	1 Ud
PX905	Soporte para Tricodent	1 Ud
PX905A	Soporte para Model Tray	1 Ud
PX906	Base ajustable para los soportes	1 Ud
PX907	Soporte para Dowel Pins, Pindex, etc.	1 Ud
PX909	Soporte para Tender Tray	1 Ud

ROUTER PARA MODELOS RUTEX PX801-CE

Para obtener modelos de excelentes
acabados

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Voltaje	220-230 V, 50 Hz, 370 W
Base	300x210 mm
Altura	300 mm
Peso	10 Kg
Potencia de motor	1/2 CV
Clavija de Conexión	ø 6 mm

Código	Descripción	C.dad
PX801-CE	RECORTADORA RUTEX CON FRESA CILÍNDRICA con plano para crear retenciones	1 Ud
PX805CE	Rutex fresa cilíndrica 10x20 mm	1 Ud
PX807CE	Rutex fresa cónica	1 Ud
PX808CE	Rutex fresa esférica	1 Ud
PX809CE	Rutex fresa cono invertido	1 Ud
PX812	Bolsas Rutex	4 Uds



INSTRUMENTOS

Pinceles Micerium

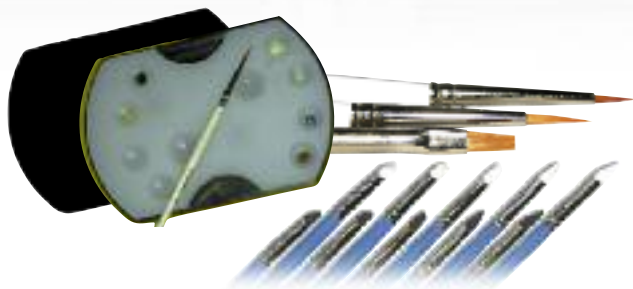

Código	Descripción	C.dad
COSSTAIN01	Paleta de colores con tapa	1 Ud
COSPEN11	Pincel C para supercolores	1 Ud
COSPEN12	Pincel F para fossa	1 Ud
COSPEN13	Pincel M para modelación	1 Ud
TPENS	Pinceles de goma blancos blandos pequeños	5 Uds
TPENN	Pinceles de goma negros duros pequeños	5 Uds

Instrumentos Micerium para modelación



Código	Descripción	C.dad
TDRK1	KIT INSTRUMENTOS DE MODELACIÓN Instrumentos con punta en acero inox Puntas ultra flexibles surtidas	3 Uds 3 Uds
TRAG	Punta ultra flexible forma A	2 Uds
TRBG	Punta ultra flexible forma B	2 Uds
TRCG	Punta ultra flexible forma C	2 Uds
TDRK2	Kit instrumentos de modelación PKT + Lecron	6 Uds

Pinzas mosquito y espesímetros en acero inoxidable



Código	Descripción	C.dad
WD1	Pinza hemostática Mosquito inox recta	1 Ud
WD2	Pinza hemostática Mosquito inox curva	1 Ud
WD3	Espesímetro satinado en acero inox para metal	1 Ud
SDI4	Espesímetro satinado en acero inox para cera	1 Ud

Sierra de mano anatómica con arco inclinado

Permite una mejor visión de la zona a cortar.
Perfectamente balanceado para obtener cortes rápidos y precisos.
Inclinación ajustable también para zurdos.

Código	Descripción	C.dad
TX001	TENDER X SIERRA DE MANO Hoja 0,18 mm azul Hoja 0,25 mm oro	1 Ud 1 Ud 1 Ud
TX018	Hojas 0,18 mm azul	12 Uds
TX025	Hojas 0,25 mm oro	12 Uds
TX018B	Hojas 0,18 mm azul	100 Uds
TX025B	Hojas 0,25 mm oro	100 Uds

FRESAS DIAMANTADAS Y DISCO

FRESAS DIAMANTADAS MICERIUM HP ESTÁNDAR

Código	Descripción	Fresas
D713	23/4030	
D714	42/4030	
D716	48/4030	
D717	71/4030	
D718	212/4020	
D719	212/4030	

Código	Descripción	Fresas
D725	501/016	
D726	537/016	
D727	558/016	
D728	559/023	
D729	563/014	
D730	563/018	

DISCO SUPERFLEXIBLE WRAP-AROUND

Código	Descripción	C.dad
D751	2 lados 22 x 0.15 mm	1 Ud
D752	1 lado 22 x 0.10 mm	1 Ud



ZIRCOSHINY

Abrasivos y gomas diamantadas para zirconio y cerámica

PASTA DIAMANTADAS PARA CERÁMICA Y COMPOSITE

Código	Descripción	C.dad
ESA20	Pasta para composite Ena Shiny A 3µm	20 g
ESB20	Pasta para composite Ena Shiny B 1µm	20 g
ZRZ20	Pasta para Zirconio y Cerámica Shiny Z	20 g
ZRSHP	Cepillo negro para pasta Shiny Z	12 Uds



GOMAS DIAMANTADAS PARA ZIRCONIO Y CERÁMICA

Código	Discos Zircó	Código	Discos Zircó
ZR014 1 Ud	 (ø 22 x h. 3,1 mm)	ZR013 1 Ud	 (ø 22 mm)
ZR025 1 Ud	 (ø 22 x h. 3,1 mm)	ZR024 1 Ud	 (ø 22 mm)

● Rosa: Medium para pulir ● Gris: Extra fina para abrillantar

PUNTAS ABRASIVAS DIAMANTADAS PARA ZIRCONIO

Código	Grinder Rueda HP 1 Ud	Código	Grinder Punta HP 1 Ud
ZRG01	 2,5 mm ø 12,0	ZRG02	 11 mm ø 4,0

● Verde: Acabado Zirconio

DISCO DIAMANTADO PARA ZIRCONIO

Código	ISO 807 104	Disco	1 Ud
ZR915CF	355 524 190 ø 19 mm x 0,16 mm		

Código	Descripción	C.dad
ZR1000	Kit acabado y pulido zirconio: Punta abrasiva diamantada verde ZRG02 Rueda abrasiva diamantada verde ZRG01 Rueda silicónica blanca D7504 Lenticular silicónica blanca D7510 Ruedecita diamantada rosa ZR014 Lenticular diamantada rosa ZR013 Ruedecita diamantada gris ZR025 Lenticular diamantada gris ZR024	1 Ud 1 Ud 1 Ud 1 Ud 1 Ud 1 Ud 1 Ud 1 Ud



FRESAS DIAMANTADAS FG PARA ZIRCONIO*



Código	Descripción	C.dad
ZR2001	Kit ZircoShiny Diamond: Fresas diamantadas FG	10 Uds

Código	Medidas	ISO 807 314...	Fresas
ZRD379CEF	ø 1,4 - L 3,5 mm	277 504 014	
ZRD379CF	ø 1,4 - L 3,5 mm	277 514 014	
ZRD838C	ø 1,6 - L 4,0 mm	137 524 016	
ZRD850CF1,2	ø 1,2 - L 10 mm	199 514 012	
ZRD850C1,2	ø 1,2 - L 10 mm	199 524 012	
ZRD882CF	ø 1,4 - L 10 mm	142 514 014	
ZRD882C	ø 1,4 - L 10 mm	142 524 014	
ZRD850CEF	ø 2,3 - L 10 mm	199 504 023	
ZRD850CF2,3	ø 2,3 - L 10 mm	199 514 023	
ZRD850C2,3	ø 2,3 - L 10 mm	199 524 023	

* Disponible a petición

A

Abrasivos	62
Acabado composite	18
Acondicionadores	28
Adhesivos	26
Aleaciones	55
Arenadora	42
Aspirador para arenadora	42

B

Bonding	28
Bunsen a inducción	54

C

Calentador de composite	15
Calentador de cera	57
Cementos	26
Ceras	56
Cleat	41
Colores Temp	48
Composite	8,50
Cortadora	60
Curette	44

D

Dentoprep arenadora	42
Dust Cabinet	42
Disco diamantado	61
Digital Brush	45
Dentífricio	45

E

Ena Bond	28
Ena Cem	26
Enamel Plus HRi	8
Enamel Plus HFO	15
Ena Shiny	22

Enamel Plus Shiny	18-21
Enamel Plus Temp	38,58
Enamel Plus Tender	50
Ena Oral Care	44
Ena Post	24
Ena Seal	29
Ena Soft	39
Ena White	36
Espesímetro	61

F

Fibras	40
Flow	17
Flex Ceras	56
Fresas Shiny	22
Fresas diamantadas	62
Function	8,9

G

Gafas Protectoras	43
Glass connector	17
Guía de color	13,52
Griptab	35

H

Higiene oral	45
--------------	----

I

Instrumentos	61
Interdental Brush/Floss	45

J

Jeringa para tips	14
-------------------	----

L

Lacas espaciadoras	58
Lámpara de polimerización	43,54

M

Mapas cromáticas	13
Matrices	33-35
Mezcladora	54
Mock up	39
Mosquito, pinzas	61
Mufla	51
Muñones desmontables	59

N

Niranium	55
----------	----

O

Obturaciones temporales	39
Optilume Trueshade	43

P

Pernos Parapulpares	41
Pinceles	16
Postes de fibra	24
Productos Ortodónticos	41
Profilaxis	44

R

	60
Recortadora Router	48
Resina	38
Resina provisional	58
Resina Calcinables	55
Revestimientos	30
Rock Bond	

S

	53
Siliconas	18
Shiny	44
Smart Prophy	38,48
Supercolores Enamel plus Temp	50
Supercolores Ena Tender	

T

Temp	38,48
Temp Red	58
Tender Acryl	53
Tender Repair	32
Tender Rock	58
Tender Fiber	40
Tender Pink	53
Tender Tray Magnetic	59
Tips Enamel Plus HRi	13
Tips Enamel Plus HFO	15
Tintes	16
Tratamiento discromías	36

V

Vacumix mezcladora	54
--------------------	----

W

Wedge Guard	33
-------------	----

Z

Zirco Shiny	62
-------------	----