

NUESTRO OBJETIVO, PROTEGER TU SALUD.

Siempre con la tranquilidad de hacer las cosas bien hechas,
sin sorpresas ni contratiempos.

MASCARILLAS HIGIÉNICAS DE 3 CAPAS

Con tira nasal moldeable
y goma elástica.



TALLA ADULTO
17,5 X 9,5 cm

0 - 2.500 uds.	0,50€
2.500 - 50.000 uds.	0,475€
50.000 - 250.000 uds.	0,455€
250.000 - 500.000 uds.	0,442€
500.000 uds. o más, consultar.	

¡ENTREGA 24H! - Precios sin IVA



**CALIDAD
Y COMODIDAD**



**INFORMACIÓN
UNE-EN14 683:2001-AC**



CHINA EXPORT



**INFORMACIÓN
UNE 0064-1-2020**

MASCARILLAS HIGIÉNICAS 3 CAPAS



CARACTERÍSTICAS

Este producto no es un producto sanitario. Mascarilla higiénica de uso personal de 3 capas, compuesta de tejido no tejido, spunbond, polipropileno, con pliegues que provocan un mejor acople anatómico. Con una tira moldeable en la parte superior que favorece una mejor sujeción nasal y con elástico de ajuste para acoplar en ambos pabellones auriculares.

USOS

La utilización de la mascarilla no exime del mantenimiento de la distancia de seguridad recomendada (2 metros). Se recomienda un uso no superior a 4 h; en este plazo se puede usar varias veces si se retira de acuerdo a las instrucciones, se almacena temporalmente o se cuelga para ofrecer el menor contacto posible, y se vuelve a colocar de acuerdo a las instrucciones. Mascarilla de uso individual; no compartir la mascarilla. Mascarilla de un solo uso, no lavable, no reutilizable. Para uso en personas adultas. Retirarla si dificulta la respiración. Retirarla si está húmeda o con salpicaduras, durante su uso. Lavar las manos (40"-60") antes de colocarla, y después de retirarla. Almacenar siempre en el embalaje original, en un lugar seco y a temperatura ambiente. No tocar con las manos una vez colocada y ajustada. Se recomienda desecharla en contenedor no manual con doble bolsa de plástico. (Información al consumidor conforme Orden SND/345/2020 de 19 de abril).

INSTRUCCIONES DE USO


1

Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular.


2

Identificar la parte superior de la mascarilla. Colocar la mascarilla en la cara y ajustar la pinza nasal a la nariz.


3

Sostener la mascarilla desde el exterior y pasar el arnés de cabeza o anudarlo detrás de la misma, a ambos lados de las orejas, sin cruzarlos.


4

Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla. Verificar que la mascarilla cubre la barbilla.


5

Pellizcar la pinza nasal con ambas manos para ajustarla a la nariz. Verificar que la mascarilla está colocada correctamente. Para esto es necesario verificar el sellado y la ausencia de molestias respiratorias.


6

Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si el usuario necesita tocar la mascarilla, debe previamente lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas con una solución hidroalcohólica.



No desplazar sobre la barbilla una vez colocada.



No desplazar sobre la frente una vez colocada.



Desechar en contenedor con tapa no manual y doble bolsa.



Lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas con una solución hidroalcohólica después de tirar.