

Genutech® CCK




Sistema total de rodilla revisión Genutech® CCK

Introducción

El sistema total de rodilla revisión Genutech® CCK, diseñado y desarrollado por Surgival, incorpora los últimos avances tecnológicos y biomecánicos en antropometría aplicada a la cinemática y dinámica de la articulación de rodilla que, unido al sistema de control y mantenimiento de la interlínea que integra, proporciona al cirujano una de las soluciones más completas, innovadoras y diferenciadoras que actualmente existen en el mercado.

El sistema Genutech® CCK es considerado como un sistema adaptativo, no sólo por la posibilidad de utilizar “offsets” y “suplementos” en tibia y fémur, sino también por el innovador concepto de compatibilidad entre la bandeja y el inserto tibial, que simplifica la elección al cirujano.

Gracias a la gran versatilidad otorgada por el sistema, el cirujano siempre encontrará en él una respuesta adecuada a cada necesidad particular, dando soluciones donde la mayoría de los sistemas no alcanzan a darla (morfometrías óseas anormales, deficiencias óseas, etc.)

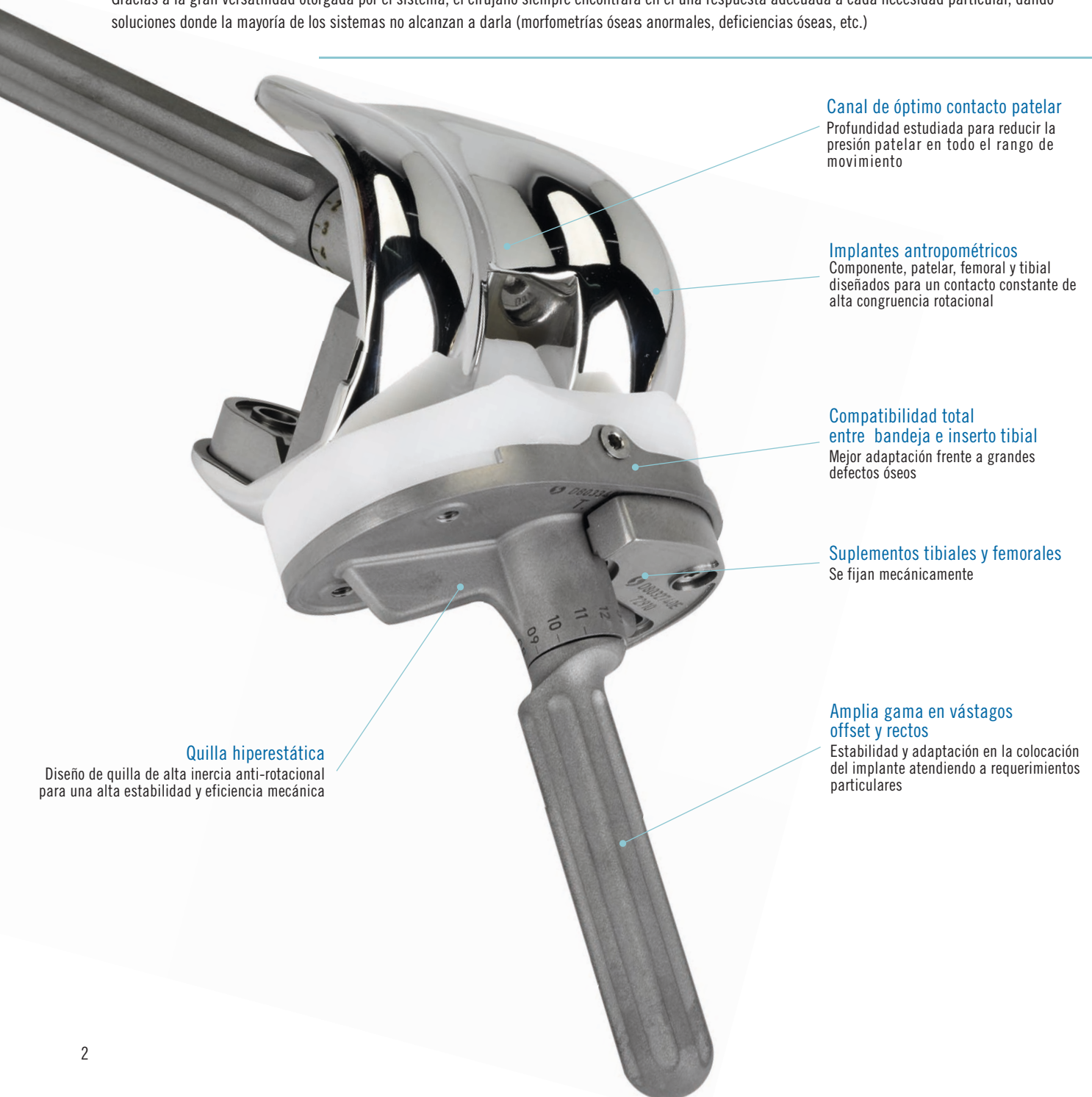

Canal de óptimo contacto patelar

Profundidad estudiada para reducir la presión patelar en todo el rango de movimiento

Implantes antropométricos

Componente, patelar, femoral y tibial diseñados para un contacto constante de alta congruencia rotacional

Compatibilidad total entre bandeja e inserto tibial

Mejor adaptación frente a grandes defectos óseos

Suplementos tibiales y femorales

Se fijan mecánicamente

Amplia gama en vástagos offset y rectos

Estabilidad y adaptación en la colocación del implante atendiendo a requerimientos particulares

Quilla hiperestática

Diseño de quilla de alta inercia anti-rotacional para una alta estabilidad y eficiencia mecánica

Genutech® CCK

El sistema está diseñado globalmente atendiendo a criterios antropométricos, reproduciendo así la dinámica y cinemática natural de la rodilla de forma fiable.

Perfil de transición elipsoidal
Ofrece una alta congruencia tibial

Óptima distribución de contacto superficial Implante/Hueso
Proporcionan estabilidad y robustez al implante, además de disipar las tensiones dinámicas y estáticas que el hueso debe soportar


Cajetín intercondilar
Previene luxaciones y minimiza el desgaste del poste tibial

Elevado rango de flexión
El diseño de los cóndilos posteriores permite alcanzar los 140° de flexión

La alta congruencia entre el componente tibial y femoral durante todo el rango de movimiento de flexoextensión no sólo revierte en una gran durabilidad y fiabilidad del sistema, sino que, en el paciente, aumenta su percepción de confortabilidad y recuperación de la normalidad funcional articular.

Componente femoral

- Componente cementado
- Fabricado en aleación de Cromo Cobalto (CrCo) especial
- 4 tallas antropométricas
- Superficie anterior externa inclinada para mejor adaptación a superficie ósea de apoyo

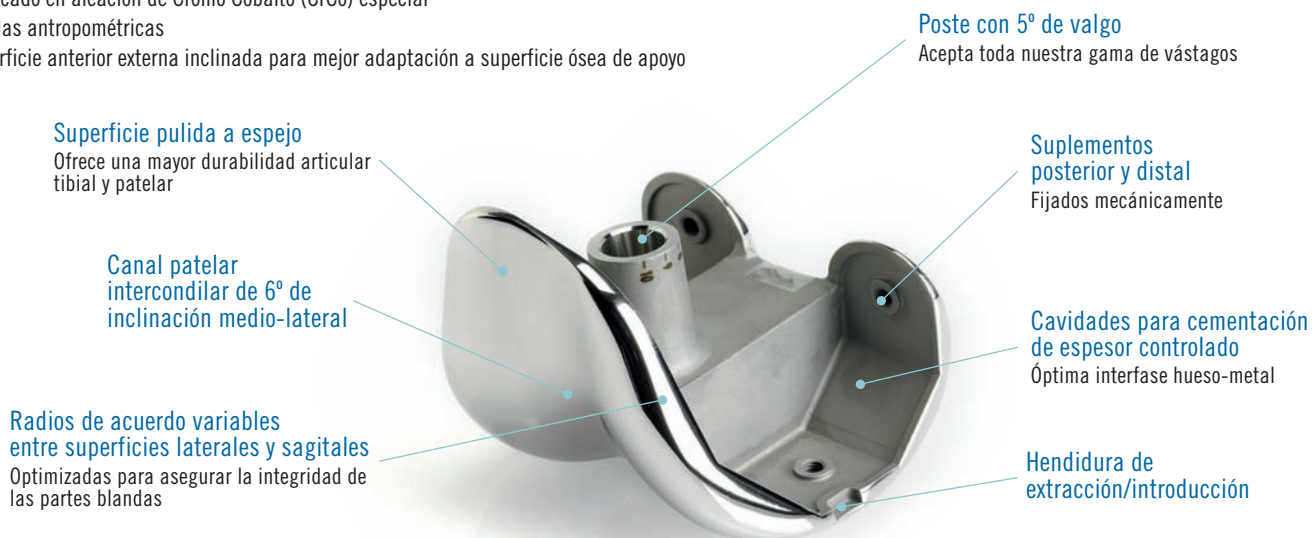


Vástagos

- Vástagos no cementados
- Fabricados en aleación de Titanio (Ti6Al4V)
- Aptos para los componentes tibiales y femorales
- Ranuras diafisarias para una mejor vascularización endomedular
- Sistema de doble fijación de vástagos de máxima seguridad basado en el ajuste entre "Conos Morse" del vástago y el componente femoral o tibial más la instalación del tornillo de compresión

Amplia gama de vástagos recto y offset

de 10 a 20 mm de $\varnothing$ y de 70, 120 y 200 mm de longitud

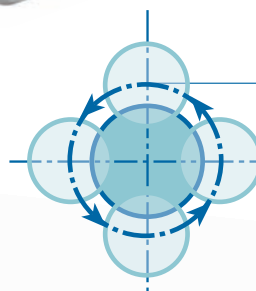

Vástagos offset

Decalado offset de 4,5 mm con posibilidad de giro de 360°

Suplementos

- Fabricados en aleación de Titanio (Ti6Al4V)
- Cavidades para cementación



Suplemento Distal
Espesores: 4, 8 y 12 mm



Suplemento Posterior
Espesores: 4 y 8 mm



Suplemento Tibial de Revisión
Espesores: 8 y 12 mm


Patela

- Fabricado en Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular (UHMWPE)
- Poste central ranurado con planos anti-rotacionales
- 5 tallas




Inserto tibial

- Fabricado en Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular (UHMWPE)
- Compatibilidad total entre cualquier talla de bandeja tibial
- Ajustes optimizados para minimizar el desgaste del poste tibial

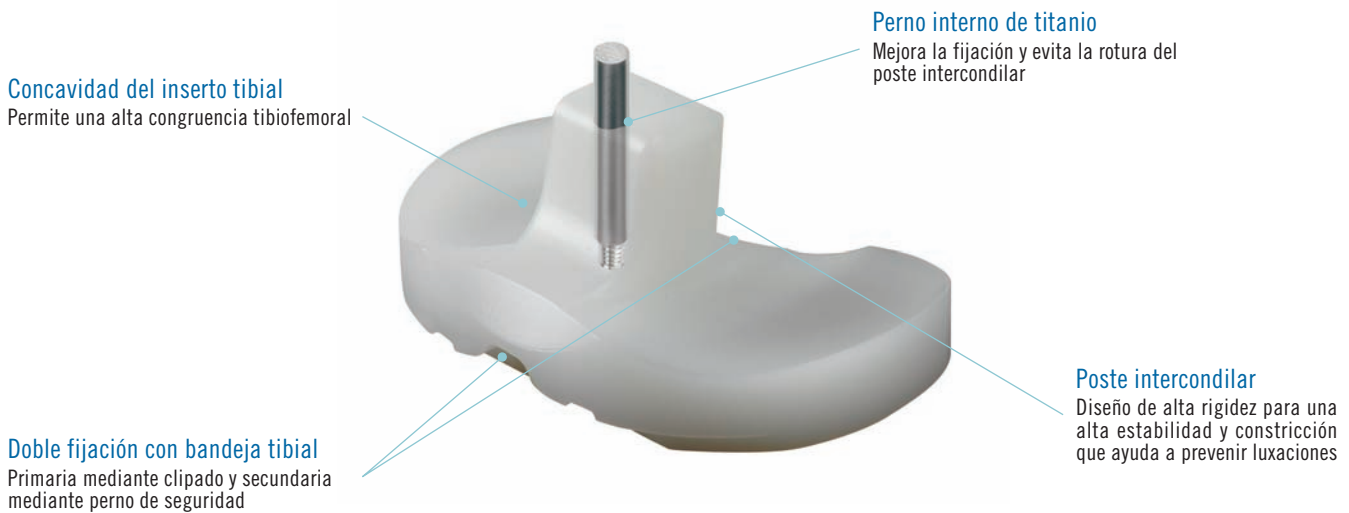

Bandeja tibial

- Fabricado en aleación de Titanio (Ti6Al4V)
- 5 tallas antropométricamente optimizadas
- Sistema de anclaje común que combina cualquier talla entre bandejas e insertos
- Posibilidad de adaptar suplementos atornillados
- Cavidades inferiores de cementación de espesor controlado

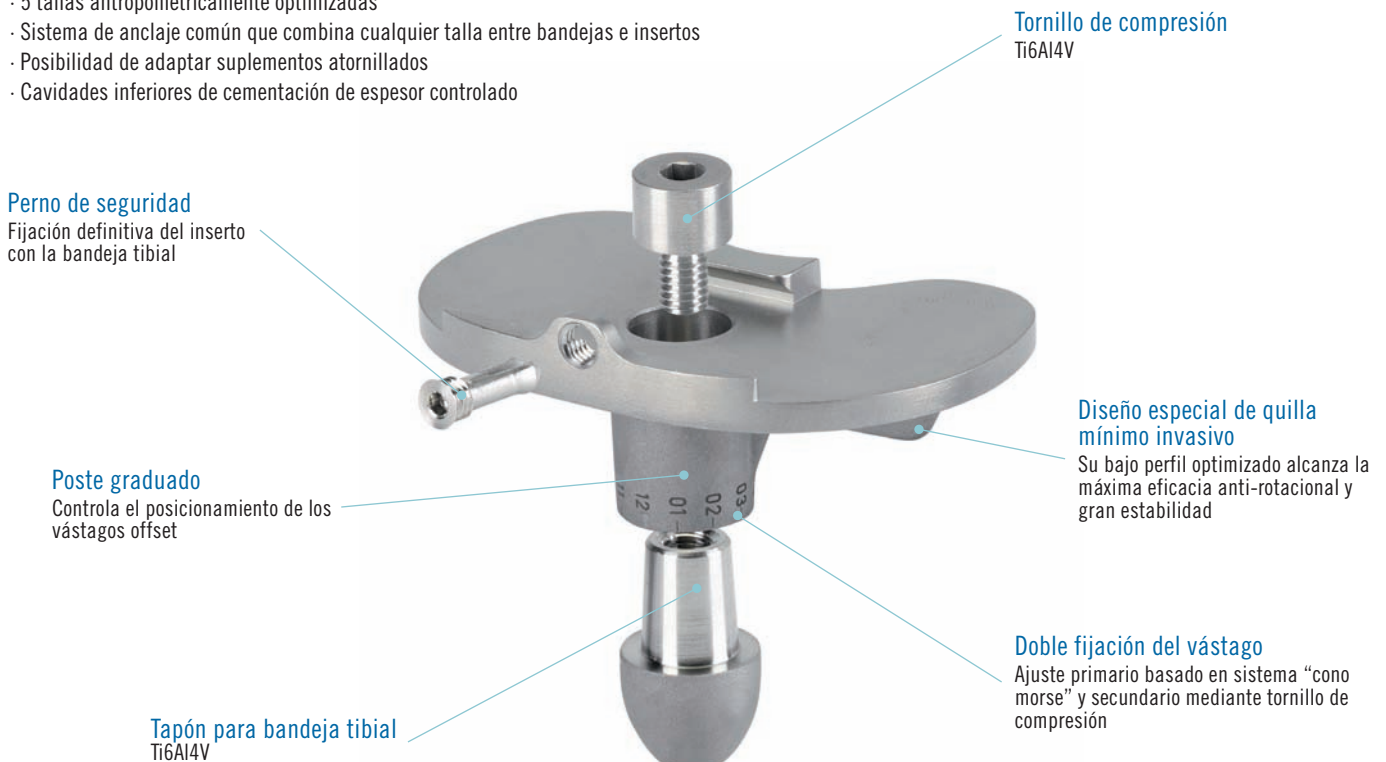



Componente femoral de revisión cementado

Izquierdo	Talla	Derecho
Ref. D8023120E	1	Ref. D8023110E
Ref. D8023220E	2	Ref. D8023210E
Ref. D8023320E	3	Ref. D8023310E
Ref. D8023420E	4	Ref. D8023410E



Vástago offset 4,5 mm de revisión

	Diámetro	Longitud		Diámetro	Longitud
Ref. D8024101E	Ø 10 mm	70 mm	Ref. D8024401E	Ø 16 mm	70 mm
Ref. D8024102E	Ø 10 mm	120 mm	Ref. D8024402E	Ø 16 mm	120 mm
Ref. D8024103E	Ø 10 mm	200 mm	Ref. D8024403E	Ø 16 mm	200 mm
Ref. D8024201E	Ø 12 mm	70 mm	Ref. D8024501E	Ø 18 mm	70 mm
Ref. D8024202E	Ø 12 mm	120 mm	Ref. D8024502E	Ø 18 mm	120 mm
Ref. D8024203E	Ø 12 mm	200 mm	Ref. D8024503E	Ø 18 mm	200 mm
Ref. D8024301E	Ø 14 mm	70 mm	Ref. D8024601E	Ø 20 mm	70 mm
Ref. D8024302E	Ø 14 mm	120 mm	Ref. D8024602E	Ø 20 mm	120 mm
Ref. D8024303E	Ø 14 mm	200 mm			



Vástago recto de revisión

	Diámetro	Longitud		Diámetro	Longitud
Ref. D8025101E	Ø 10 mm	70 mm	Ref. D8025401E	Ø 16 mm	70 mm
Ref. D8025102E	Ø 10 mm	120 mm	Ref. D8025402E	Ø 16 mm	120 mm
Ref. D8025103E	Ø 10 mm	200 mm	Ref. D8025403E	Ø 16 mm	200 mm
Ref. D8025201E	Ø 12 mm	70 mm	Ref. D8025501E	Ø 18 mm	70 mm
Ref. D8025202E	Ø 12 mm	120 mm	Ref. D8025502E	Ø 18 mm	120 mm
Ref. D8025203E	Ø 12 mm	200 mm	Ref. D8025503E	Ø 18 mm	200 mm
Ref. D8025301E	Ø 14 mm	70 mm	Ref. D8025601E	Ø 20 mm	70 mm
Ref. D8025302E	Ø 14 mm	120 mm	Ref. D8025602E	Ø 20 mm	120 mm
Ref. D8025303E	Ø 14 mm	200 mm			



Bandeja tibial de revisión

	Talla
Ref. D8033100E	1
Ref. D8033200E	2
Ref. D8033300E	3
Ref. D8033400E	4
Ref. D8033500E	5



Inserto tibial de revisión

	Talla	Longitud		Talla	Longitud
Ref. D8061100E	1	10 mm	Ref. D8063180E	3	18 mm
Ref. D8061120E	1	12 mm	Ref. D8063200E	3	20 mm
Ref. D8061140E	1	14 mm	Ref. D8063220E	3	22 mm
Ref. D8061160E	1	16 mm	Ref. D8063240E	3	24 mm
Ref. D8061180E	1	18 mm	Ref. D8064100E	4	10 mm
Ref. D8061200E	1	20 mm	Ref. D8064120E	4	12 mm
Ref. D8061220E	1	22 mm	Ref. D8064140E	4	14 mm
Ref. D8061240E	1	24 mm	Ref. D8064160E	4	16 mm
Ref. D8062100E	2	10 mm	Ref. D8064180E	4	18 mm
Ref. D8062120E	2	12 mm	Ref. D8064200E	4	20 mm
Ref. D8062140E	2	14 mm	Ref. D8064220E	4	22 mm
Ref. D8062160E	2	16 mm	Ref. D8064240E	4	24 mm
Ref. D8062180E	2	18 mm			
Ref. D8062200E	2	20 mm			
Ref. D8062220E	2	22 mm			
Ref. D8062240E	2	24 mm			
Ref. D8063100E	3	10 mm			
Ref. D8063120E	3	12 mm			
Ref. D8063140E	3	14 mm			
Ref. D8063160E	3	16 mm			

Suplemento femoral posterior

	Talla	Espesor
Ref. D8026010E	1	4 mm
Ref. D8026015E	1	8 mm
Ref. D8026020E	2	4 mm
Ref. D8026025E	2	8 mm
Ref. D8026030E	3	4 mm
Ref. D8026035E	3	8 mm
Ref. D8026040E	4	4 mm
Ref. D8026045E	4	8 mm



Suplemento femoral distal

	Talla	Espesor
Ref. D8026150E	1	4 mm
Ref. D8026190E	1	8 mm
Ref. D8026195E	1	12 mm
Ref. D8026250E	2	4 mm
Ref. D8026290E	2	8 mm
Ref. D8026295E	2	12 mm
Ref. D8026350E	3	4 mm
Ref. D8026390E	3	8 mm
Ref. D8026395E	3	12 mm
Ref. D8026450E	4	4 mm
Ref. D8026490E	4	8 mm
Ref. D8026495E	4	12 mm



Suplemento tibial

	Talla	Espesor
Ref. D8032710E	1	8 mm
Ref. D8032715E	1	12 mm
Ref. D8032720E	2	8 mm
Ref. D8032725E	2	12 mm
Ref. D8032730E	3	8 mm
Ref. D8032735E	3	12 mm
Ref. D8032740E	4	8 mm
Ref. D8032745E	4	12 mm
Ref. D8032750E	5	8 mm
Ref. D8032755E	5	12 mm



Componente patelar

	Diámetro
Ref. D8030140E	Ø 32 mm
Ref. D8030150E	Ø 34 mm
Ref. D8030160E	Ø 36 mm
Ref. D8030170E	Ø 38 mm
Ref. D8030180E	Ø 40 mm



Set completo instrumental Revisión Genutech® CCK *

Ref. D8501000

Set 0. Instrumental perforación endomedular Genutech® CCK

1 Rescatador fresas diafisarias revisión

Ref. D8271420

2 Punzón iniciador

Ref. D8210010S

3 Llave en "T" anclaje rápido AO-HEXAGONAL

Ref. D8271475


4 Adaptador a trilobular

Ref. D8271410

5 Broca iniciadora 9 mm

Ref. D8210020


Bandeja superior

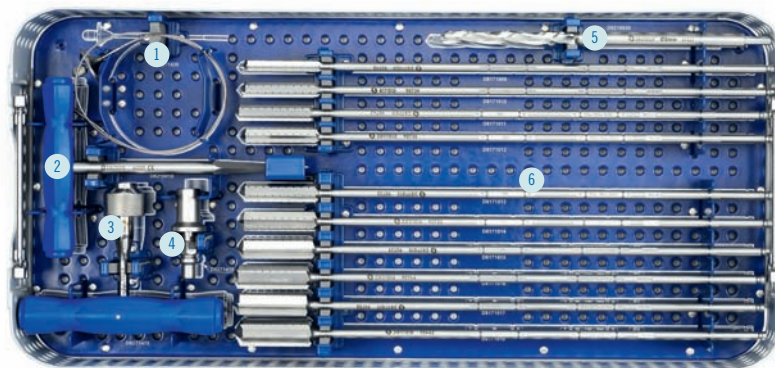

6 Fresa diafisaria de revisión

	Diámetro
Ref. D8171009	Ø 9 mm
Ref. D8171010	Ø 10 mm
Ref. D8171011	Ø 11 mm
Ref. D8171012	Ø 12 mm
Ref. D8171013	Ø 13 mm
Ref. D8171014	Ø 14 mm
Ref. D8171015	Ø 15 mm
Ref. D8171016	Ø 16 mm
Ref. D8171017	Ø 17 mm
Ref. D8171018	Ø 18 mm

Bandeja inferior

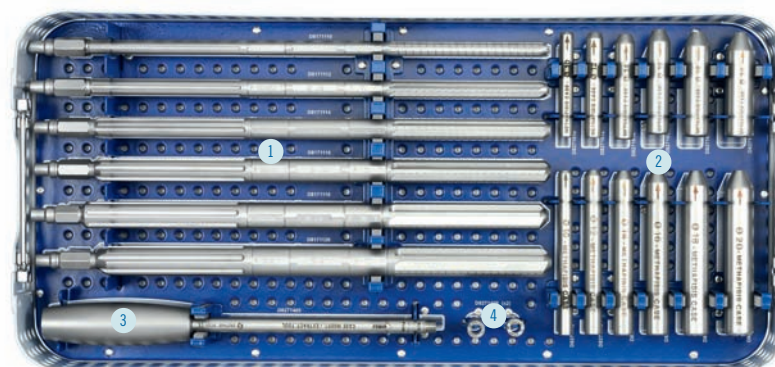

1 Fresa canulada de revisión

	Diámetro
Ref. D8171110	Ø 10 mm
Ref. D8171112	Ø 12 mm
Ref. D8171114	Ø 14 mm
Ref. D8171116	Ø 16 mm
Ref. D8171118	Ø 18 mm
Ref. D8171120	Ø 20 mm

3 Introdutor/extractor casquillos de revisión

Ref. D8271405

4 Tapón introductor/extractor de casquillos

Ref. D8271406

2 Casquillo metafisario de revisión

	Diámetro	Longitud		Diámetro	Longitud
Ref. D8271010	Ø 10 mm	70 mm	Ref. D8271110	Ø 10 mm	110 mm
Ref. D8271012	Ø 12 mm	70 mm	Ref. D8271112	Ø 12 mm	110 mm
Ref. D8271014	Ø 14 mm	70 mm	Ref. D8271114	Ø 14 mm	110 mm
Ref. D8271016	Ø 16 mm	70 mm	Ref. D8271116	Ø 16 mm	110 mm
Ref. D8271018	Ø 18 mm	70 mm	Ref. D8271118	Ø 18 mm	110 mm
Ref. D8271020	Ø 20 mm	70 mm	Ref. D8271120	Ø 20 mm	110 mm

* Este set completo puede ser suministrado en contenedores estancos, para mantenimiento de la esterilidad, a requerimiento del cliente. Consulte con su distribuidor o fabricante.

Bandeja superior

1 Sistema de guía telescópico de revisión

Ref. D8277120

2 Base soporte guía telescópica de revisión

Ref. D8277122


3 Patín guía telescópica de revisión

Ref. D8277124

4 Guía de corte tibial de revisión

Ref. D8270510 Derecho

Ref. D8270520 Izquierdo

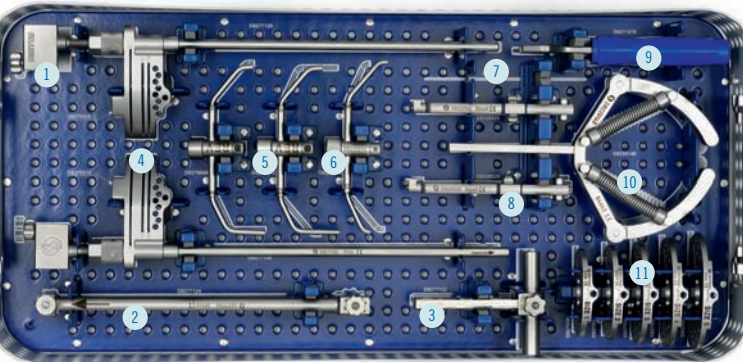

5 Eje palpador de revisión

Ref. D8270608 0-8 mm

Ref. D8270612 0-12 mm

6 Palpador tibial semi-constreñido primaria

Ref. D8220270

7 Gancho palpador

Ref. D8220290

8 Mango soporte para plantilla tibial

Ref. D8220520

9 Llave fija en "U" de 14 mm

Ref. D8271470

10 Pinza distal para guía tibial

Ref. D8220140

11 Plantilla tibial de revisión

Talla

Ref. D8270301 1

Ref. D8270302 2

Ref. D8270303 3

Ref. D8270304 4

Ref. D8270305 5

Bandeja inferior

1 Cíncel recto de revisión


Ref. D8277200

2 Cíncel excéntrico de revisión

Ref. D8277205

3 Barra roscada plantilla quilla de revisión

Ref. D8270400

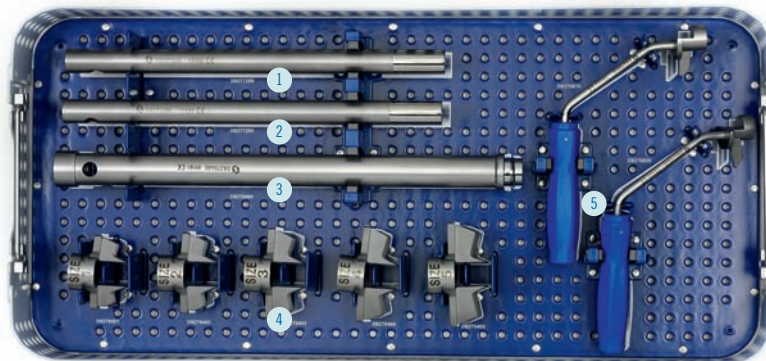

4 Plantilla quilla de revisión

Talla

Ref. D8270401 1

Ref. D8270402 2

Ref. D8270403 3

Ref. D8270404 4


Ref. D8270405 5

5 Hemiquilla de corte tibial de revisión

Ref. D8270810 Derecho


Ref. D8270820 Izquierdo

1	Medidor interlínea de revisión	
	Ref. D8271140	
2	Orientador angular 5° de revisión	
	Ref. D8271055	
3	Medidor femoral de revisión	Talla
	Ref. D8271441	1
	Ref. D8271442	2
	Ref. D8271443	3
	Ref. D8271444	4

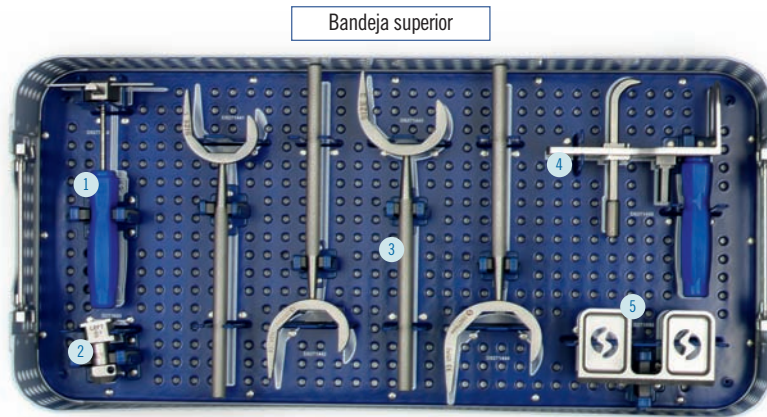

4	Medidor femoral primaria	
	Ref. D8271450	
5	Máscara de corte distal	
	Ref. D8271050	

1	Espaciador tibial de revisión	Longitud
	Ref. D8274110	10 mm
	Ref. D8274112	12 mm
	Ref. D8274114	14 mm
	Ref. D8274116	16 mm
	Ref. D8274118	18 mm
	Ref. D8274120	20 mm
	Ref. D8274122	22 mm
	Ref. D8274124	24 mm

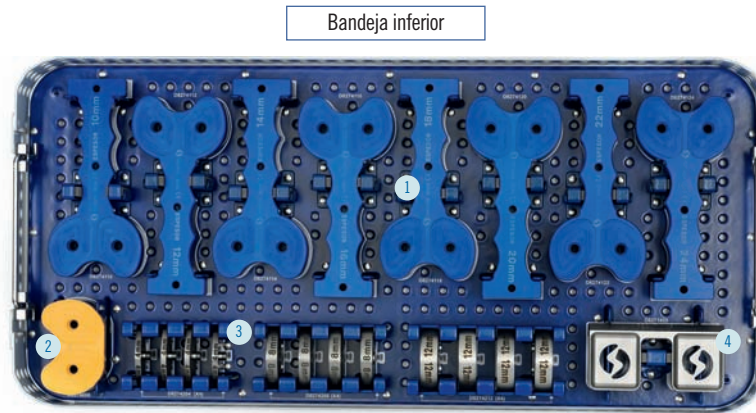

2	Espaciador fémur de revisión	
	Ref. D8274008	
3	Suplemento para espaciador	Longitud
	Ref. D8274204	4 mm
	Ref. D8274208	8 mm
	Ref. D8274212	12 mm
4	Máscara de recut distal de revisión	
	Ref. D8271455	

1	Máscara corte femoral de revisión	Talla
	Ref. D8270110	1
	Ref. D8270120	2
	Ref. D8270130	3
	Ref. D8270140	4

5	Postizo posicionador de revisión	
	Ref. D8271060	Derecho
	Ref. D8271065	Izquierdo


8	Eje de alineación	Longitud
	Ref. D8271425	250 mm
	Ref. D8271422	300 mm
	Ref. D8210080	400 mm

11	Postizo de corte de revisión	Talla
	Ref. D8271071	1
	Ref. D8271072	2
	Ref. D8271073	3
	Ref. D8271074	4

2	Cuña máscara distal de revisión	Longitud
	Ref. D8271204	4 mm
	Ref. D8271208	8 mm
	Ref. D8271212	12 mm

3	Plumilla semi-constrañida de revisión	Talla
	Ref. D8271301	1
	Ref. D8271302	2
	Ref. D8271303	3
	Ref. D8271304	4

4	Plumilla semi-constrañida primaria	Talla
	Ref. D8271251	1
	Ref. D8271252	2
	Ref. D8271253	3
	Ref. D8271254	4

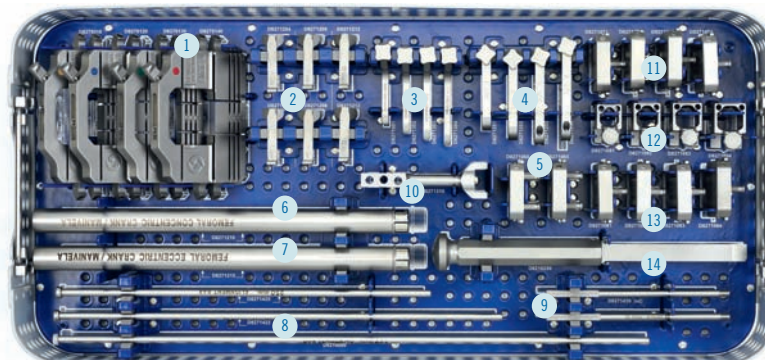

6	Manivela concéntrica de revisión	
	Ref. D8271210	

9	Varilla referencia horizontal máscara de revisión	
	Ref. D8271435	

7	Manivela excéntrica de revisión	
	Ref. D8271215	

10	Sistema de giro 3°	
	Ref. D8271310	

12	Plantilla de corte intercóndilo de revisión	Talla
	Ref. D8271091	1
	Ref. D8271092	2
	Ref. D8271093	3
	Ref. D8271094	4


13	Postizo de corte intercóndilo de revisión	Talla
	Ref. D8271081	1
	Ref. D8271082	2
	Ref. D8271083	3
	Ref. D8271084	4

14	Escoplo	
	Ref. D8210220	

Bandeja superior

1	Suplemento posterior de prueba	Talla	Espesor
	Ref. D8126010	1	4 mm
	Ref. D8126015	1	8 mm
	Ref. D8126020	2	4 mm
	Ref. D8126025	2	8 mm
	Ref. D8126030	3	4 mm
	Ref. D8126035	3	8 mm
	Ref. D8126040	4	4 mm
	Ref. D8126045	4	8 mm


2	Destornillador hexagonal 2,5 mm de bola
	Ref. D8220645

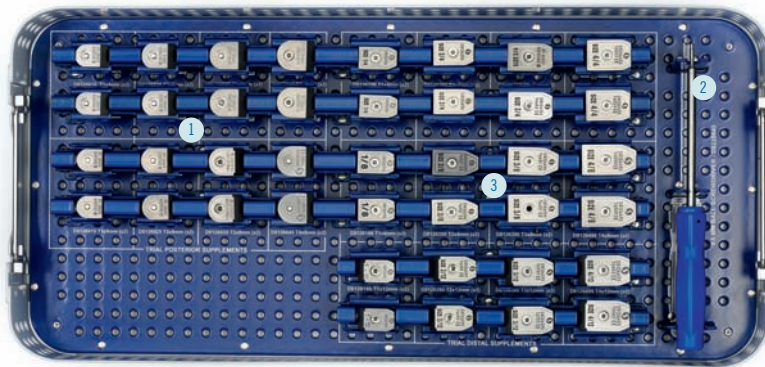

3	Suplemento distal de prueba	Talla	Espesor
	Ref. D8126150	1	4 mm
	Ref. D8126190	1	8 mm
	Ref. D8126195	1	12 mm
	Ref. D8126250	2	4 mm
	Ref. D8126290	2	8 mm
	Ref. D8126295	2	12 mm
	Ref. D8126350	3	4 mm
	Ref. D8126390	3	8 mm
	Ref. D8126395	3	12 mm
	Ref. D8126450	4	4 mm
	Ref. D8126490	4	8 mm
	Ref. D8126495	4	12 mm

Bandeja inferior

1	Componente femoral de prueba de revisión	Talla
	Ref. D8113110 Derecho	1
	Ref. D8113210 Derecho	2
	Ref. D8113310 Derecho	3
	Ref. D8113410 Derecho	4
	Ref. D8113120 Izquierdo	1
	Ref. D8113220 Izquierdo	2
	Ref. D8113320 Izquierdo	3
	Ref. D8113420 Izquierdo	4

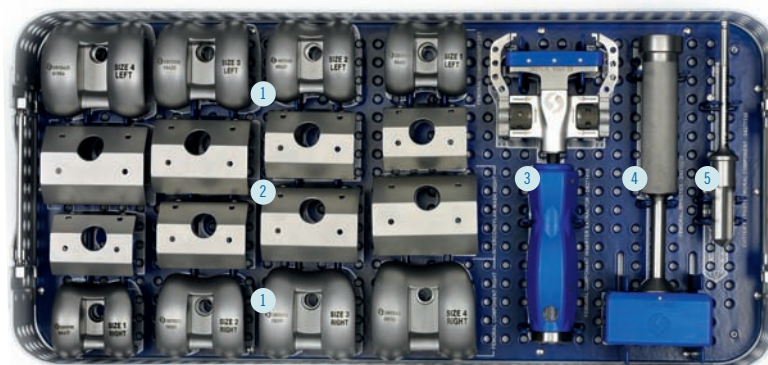


2	Máscara intercondilar	Talla
	Ref. D8273110 Derecho	1
	Ref. D8273210 Derecho	2
	Ref. D8273310 Derecho	3
	Ref. D8273410 Derecho	4
	Ref. D8273120 Izquierdo	1
	Ref. D8273220 Izquierdo	2
	Ref. D8273320 Izquierdo	3
	Ref. D8273420 Izquierdo	4

3	Introduccion/extractor componentes femorales
	Ref. D8271415S

4	Impactor femoral
	Ref. D8210210

5	Fresa para poste componente femoral	Diámetro
	Ref. D8277130	Ø 16 mm


Bandeja superior

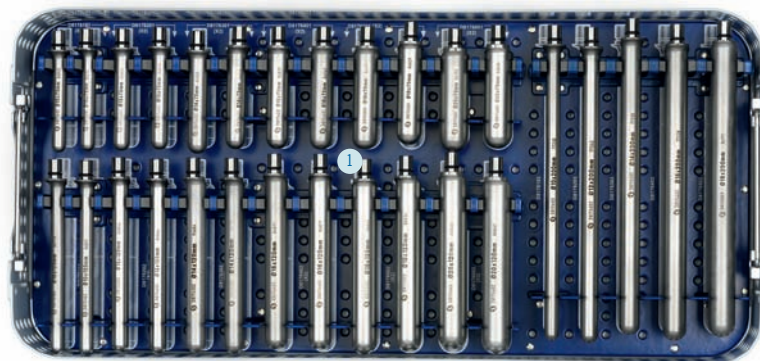

1 Vástago offset de prueba de revisión

	Diámetro	Longitud		Diámetro	Longitud		Diámetro	Longitud
Ref. D8176101	Ø 10 mm	70 mm	Ref. D8176102	Ø 10 mm	120 mm	Ref. D8176103	Ø 10 mm	200 mm
Ref. D8176201	Ø 12 mm	70 mm	Ref. D8176202	Ø 12 mm	120 mm	Ref. D8176203	Ø 12 mm	200 mm
Ref. D8176301	Ø 14 mm	70 mm	Ref. D8176302	Ø 14 mm	120 mm	Ref. D8176303	Ø 14 mm	200 mm
Ref. D8176401	Ø 16 mm	70 mm	Ref. D8176402	Ø 16 mm	120 mm	Ref. D8176403	Ø 16 mm	200 mm
Ref. D8176501	Ø 18 mm	70 mm	Ref. D8176502	Ø 18 mm	120 mm	Ref. D8176503	Ø 18 mm	200 mm
Ref. D8176601	Ø 20 mm	70 mm	Ref. D8176602	Ø 20 mm	120 mm			

Bandeja inferior

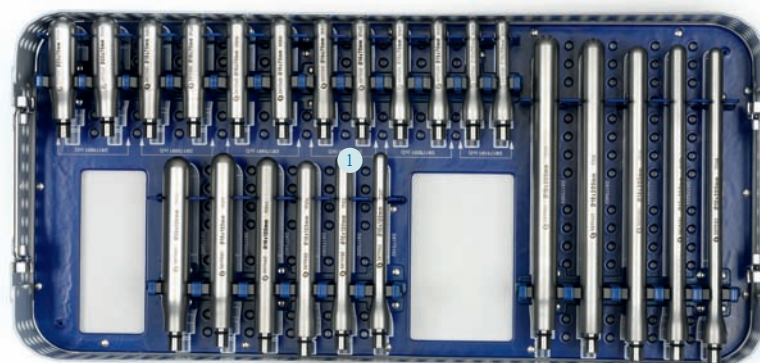


1 Vástago recto de prueba de revisión

	Diámetro	Longitud		Diámetro	Longitud		Diámetro	Longitud
Ref. D8175101	Ø 10 mm	70 mm	Ref. D8175102	Ø 10 mm	120 mm	Ref. D8175103	Ø 10 mm	200 mm
Ref. D8175201	Ø 12 mm	70 mm	Ref. D8175202	Ø 12 mm	120 mm	Ref. D8175203	Ø 12 mm	200 mm
Ref. D8175301	Ø 14 mm	70 mm	Ref. D8175302	Ø 14 mm	120 mm	Ref. D8175303	Ø 14 mm	200 mm
Ref. D8175401	Ø 16 mm	70 mm	Ref. D8175402	Ø 16 mm	120 mm	Ref. D8175403	Ø 16 mm	200 mm
Ref. D8175501	Ø 18 mm	70 mm	Ref. D8175502	Ø 18 mm	120 mm	Ref. D8175503	Ø 18 mm	200 mm
Ref. D8175601	Ø 20 mm	70 mm	Ref. D8175602	Ø 20 mm	120 mm			

1	Bandeja tibial de prueba de revisión	Talla
	Ref. D8133100	1
	Ref. D8133200	2
	Ref. D8133300	3
	Ref. D8133400	4
	Ref. D8133500	5

2	Suplemento tibial de prueba	Talla	Espesor
	Ref. D8132710	1	8 mm
	Ref. D8132715	1	12 mm
	Ref. D8132720	2	8 mm
	Ref. D8132725	2	12 mm
	Ref. D8132730	3	8 mm
	Ref. D8132735	3	12 mm
	Ref. D8132740	4	8 mm
	Ref. D8132745	4	12 mm
	Ref. D8132750	5	8 mm
	Ref. D8132755	5	12 mm

Bandeja superior

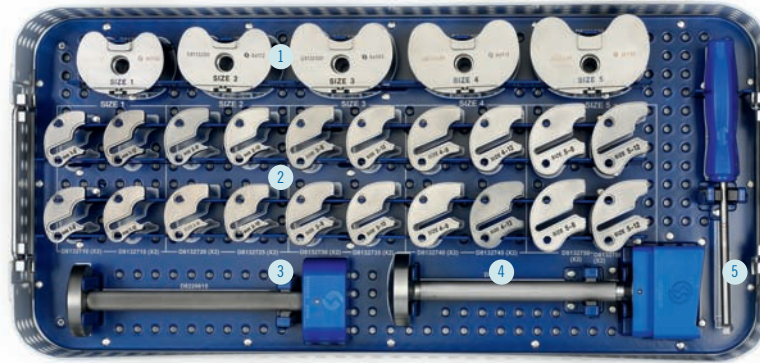

3 Impactor bandeja tibial

Ref. D8220615


4 Impactor componente tibial

Ref. D8220610

5 Extractor de inserto tibial

Ref. D8220620S

Bandeja inferior

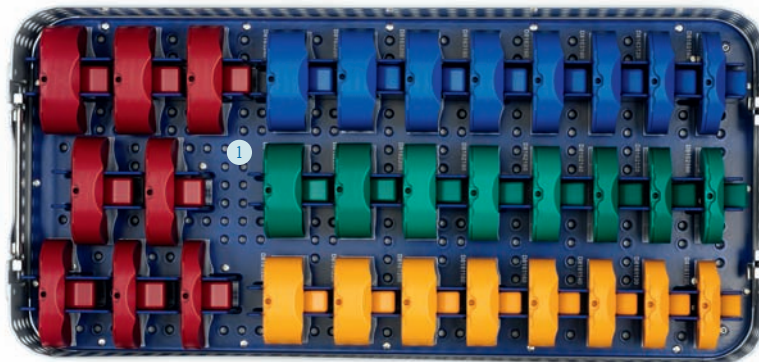

1	Inserto tibial de prueba de revisión													
	Talla	Longitud		Talla	Longitud		Talla	Longitud		Talla	Longitud			
	Ref. D8161100	1 10 mm	Ref. D8162100	2 10 mm	Ref. D8163100	3 10 mm	Ref. D8164100	4 10 mm						
	Ref. D8161120	1 12 mm	Ref. D8162120	2 12 mm	Ref. D8163120	3 12 mm	Ref. D8164120	4 12 mm						
	Ref. D8161140	1 14 mm	Ref. D8162140	2 14 mm	Ref. D8163140	3 14 mm	Ref. D8164140	4 14 mm						
	Ref. D8161160	1 16 mm	Ref. D8162160	2 16 mm	Ref. D8163160	3 16 mm	Ref. D8164160	4 16 mm						
	Ref. D8161180	1 18 mm	Ref. D8162180	2 18 mm	Ref. D8163180	3 18 mm	Ref. D8164180	4 18 mm						
	Ref. D8161200	1 20 mm	Ref. D8162200	2 20 mm	Ref. D8163200	3 20 mm	Ref. D8164200	4 20 mm						
	Ref. D8161220	1 22 mm	Ref. D8162220	2 22 mm	Ref. D8163220	3 22 mm	Ref. D8164220	4 22 mm						
	Ref. D8161240	1 24 mm	Ref. D8162240	2 24 mm	Ref. D8163240	3 24 mm	Ref. D8164240	4 24 mm						

Bandeja superior


1	Extractor de pins
	Ref. D8220280

2	Barra auxiliar extractora/impactora de pins
	Ref. D8271460

3	Pin con cabeza	Diámetro	Longitud
	Ref. D8210161	Ø 3,4 mm	30 mm
	Ref. D8210162	Ø 3,4 mm	40 mm
	Ref. D8210160	Ø 3,4 mm	55 mm

4	Pin sin cabeza para soporte	Diámetro	Longitud
	Ref. D8210165	Ø 3,4 mm	55 mm

5	Pin sin cabeza	Diámetro	Longitud
	Ref. D8210166	Ø 3,4 mm	80 mm

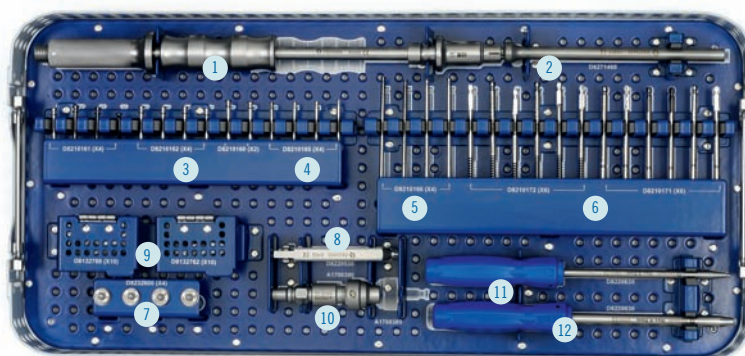

7	Tornillo fijación para bandeja tibial de prueba
	Ref. D8232600

9	Tornillo suplemento tibial de prueba	
	Ref. D8132760	8 mm
	Ref. D8132762	12 mm

10	Adaptador a A0drill
	Ref. A1700390 AOHEX

11	Destornillador	
	Ref. D8220635S	2,5 mm

6	Pin roscado de revisión	Diámetro	Longitud
	Ref. D8210172	Ø 4,4 mm	75 mm
	Ref. D8210171	Ø 4,4 mm	100 mm

8	Mango soporte perno de fijación
	Ref. D8220530

12	Llave dinamométrica 9N	*
	Ref. D8277250	4,5 mm

*La referencia no se corresponde con la imagen.

Bandeja inferior



1	Broca para patela
	Ref. D8230120

2	Pinza para resección patelar
	Ref. D8230110


3	Pinza abrazadera para patela
	Ref. D8230130

4	Patela de prueba	Diámetro
	Ref. D8130140	Ø 32 mm
	Ref. D8130150	Ø 34 mm
	Ref. D8130160	Ø 36 mm
	Ref. D8130170	Ø 38 mm
	Ref. D8130180	Ø 40 mm



Tecnología Europea de Vanguardia
Advanced European Technology

Distribuido por: Distributed by:

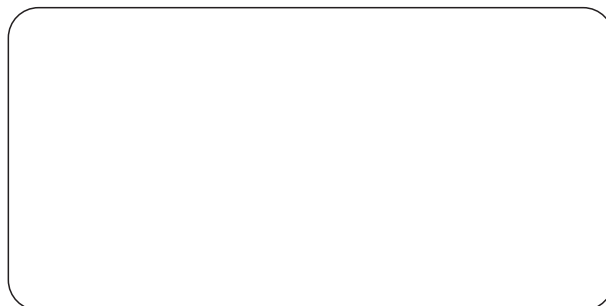

Parque Tecnológico - C/ Leonardo Da Vinci, 12-14 · 46980 Paterna · (Valencia, Spain)
Tel. (+34) 96 131 80 50 · Fax (+34) 96 131 80 95 · E-mail: surgival@surgival.com
www.surgival.com



IR06EKC000 / 07-2015 © Rev. 1
El marcado CE es válido únicamente si también está impreso en la etiqueta del producto.