

SURGIFEET®


Tornillo tipo Weil



Características técnicas

Technical details

Material: Titanio Ti6Al4V
Material: Titanium Ti6Al4V
Longitud: 11, 12, 13, 14, 15 mm
Length: 11, 12, 13, 14, 15 mm

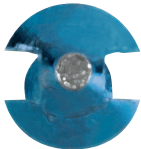

Cabeza plana de bajo perfil
y dispositivo de 2 ranuras
Low profile flat head
and device with 2 grooves

Auto-perforante
Self-drilling

Ø 2mm

Twist-off

Auto-roscante
Self-tapping

Indicaciones Tornillo tipo Weil

Indications for Weil type Screw

Osteotomía Cervicocapital:

En la hiperpresión de las cabezas metatarsianas de los dedos trifalángicos, con o sin luxación metatarsofalángica en que la fórmula metatarsal es index plus minus.

Osteotomía Cervicocapital triple:

En este caso debe realizarse cuando los acortamientos previstos sean mayores de 3 mm.





Cervicocapital Osteotomy:

In the hyperpressure of the metatarsal heads of triphalangeal digits, with or without metatarsophalangeal dislocation, in which the metatarsal formula is index plus minus.

Triple Cervicocapital Osteotomy:

In this case, this should be carried out when the anticipated shortening is greater than 3 mm.

Técnica Quirúrgica Surgical Technique

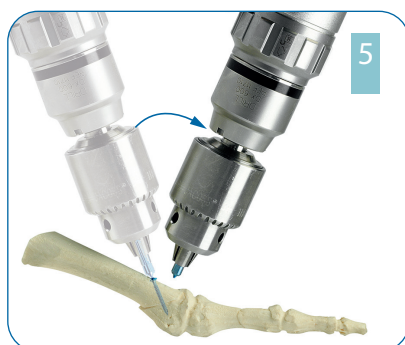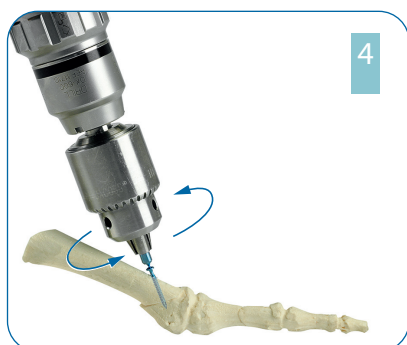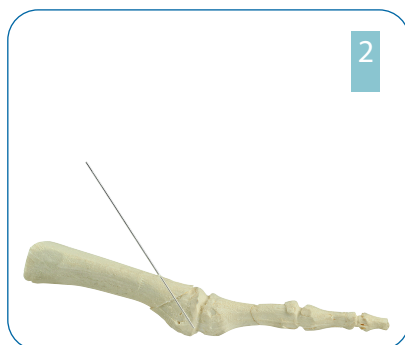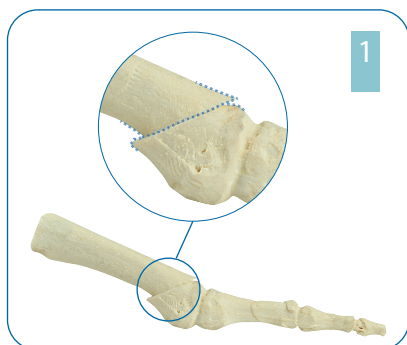

1. Osteotomía paralela a la planta del pie. Comenzar en la zona dorsal de la cabeza a 3 mm delante del cartílago articular. Una vez realizada, desplazar la cabeza también hacia proximal hasta obtener la posición deseada. **Osteotomy parallel to the sole of the foot. Begin in the dorsal area of the head, 3mm in front of the joint cartilage. Once completed, also move the head proximally until the desired position is obtained.**

2. Introducción de la aguja.
Introduction of the needle.

3. Medición de la longitud del tornillo.
Measurement of the length of the screw.

4. Inserción del Tornillo tipo Weil. Se mantendrá la osteotomía con la ayuda de una pinza reductora.

Precaución: No flexionar o aplicar excesivo par durante la introducción del tornillo para evitar roturas prematuras del dispositivo de anclaje.
Insertion of Weil type Screw. The osteotomy is held in place with a reduction clamp.

Warning: Do not flex or apply excessive torque when inserting the screw to prevent premature breakage of the anchoring device.


5. Rotura mediante flexión del dispositivo de anclaje del tornillo.
Breakage due to flexing the screw anchoring device.

6. Apriete definitivo con destornillador.
Final tightening with screwdriver.

Implantes e instrumental *Implants and instruments*

Tornillo tipo Weil Weil type screw	Longitud Length	Unidades Units
Ref. B3324711	11 mm	4
Ref. B3324712	12 mm	4
Ref. B3324713	13 mm	4
Ref. B3324714	14 mm	4
Ref. B3324715	15 mm	2

1 Destornillador para Tornillo tipo Weil
Screwdriver for Weil type Screw
Ref. B3324805

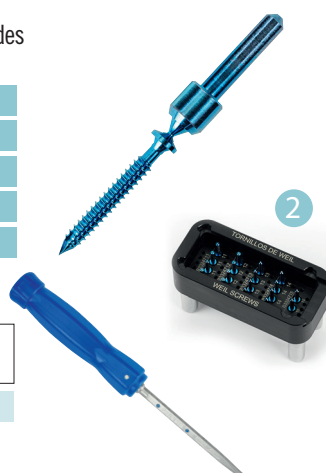

Set completo SURGIFEET®
SURGIFEET® complete set

Ref. B3324000

